

seca mBCA 555/seca TRU

RFID-Reader montieren

Jetzt
RFID-Reader
in wenigen
Schritten
montieren



seca mBCA 555/seca TRU



1. Platzieren Sie den RFID-Reader mittig an der Vorderseite des Displayhalters. Bringen Sie den RFID-Reader mit dem doppelseitigen Klebestreifen in dieser Position an.



2. Stecken Sie den USB-Stecker des RFID-Readers auf der Rückseite des Displays in den freien USB-Anschluss und führen Sie das Kabel wie abgebildet durch die dafür vorgesehene Öffnung.



3. Nachdem das Kabel komplett durch die dafür vorgesehene Öffnung geführt wurde, verlegen Sie das Kabel in dem Displayhalter wie abgebildet in der Kabelführung.



4. Setzen Sie die Abdeckung vorsichtig wieder auf den Displayhalter und verlegen Sie das überschüssige Kabel in der Führung des Aluminiumprofils. Abschließend setzen Sie die Kunststoffabdeckung auf das Aluminiumprofil, um die die Kabel zu verdecken.