

seca mBCA 555/seca TRU

Tenant-Anbindung

Jetzt
Tenant-Anbindung
in wenigen
Schritten
konfigurieren




EMR



seca mBCA 555/seca TRU

Konfiguration der WLAN-Verbindung
mittels integriertem Webserver und
einem mobilen Endgerät

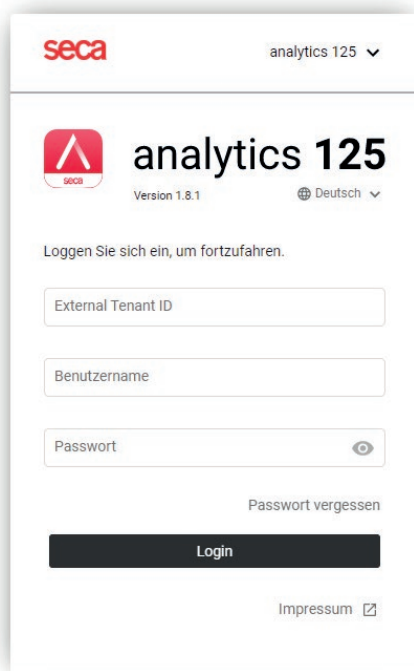

seca analytics 125

analytics 125
Version 1.8.1 Deutsch

Loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

External Tenant ID

Benutzername


Passwort

Passwort vergessen

Login

Impressum

1. Starten Sie auf einem Endgerät einen Browser (z.B. Chrome) und öffnen Sie die folgende Webseite:
<https://secacloud.com/guest/login?accountType=analytics125>
2. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein.

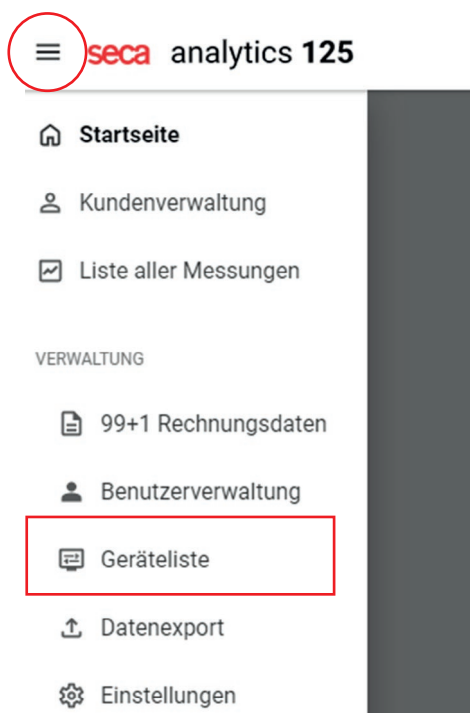

3. Öffnen Sie das Menü oben links und wählen sie den Punkt „Geräteliste“ aus.

seca mBCA 555/seca TRU

4. In der Geräteliste sind bislang noch keine Geräte hinzugefügt worden. Um Ihr Gerät hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf „Neues Gerät hinzufügen“.

← Startseite Gesamtanzahl Geräte: 0

Geräteliste

Neues Gerät hinzufügen

Gerätename	Modell	Gerätetest
Keine Daten gefunden		

5. Geben Sie dazu in der folgenden Maske die Seriennummer Ihres Gerätes ein und klicken auf „Hinzufügen“. Sie finden die Seriennummer Ihres Gerätes auf dem Typenschild links unten an der Plattform.

Neues Gerät hinzufügen

Seriennummer:

6. Jetzt wird das Gerät automatisch zu Ihrer persönlichen Datenbank (Tenant) hinzugefügt. Im Hintergrund wird noch ein Zertifikat installiert. Warten Sie, bis unter Ihrem hinzugefügten Gerät die Meldung „Zertifikat erfolgreich installiert“ erscheint.

← Startseite Gesamtanzahl Geräte: 22

Geräteliste

Neues Gerät hinzufügen

Gerätename	Modell	Gerätetest
10000000339795 Externe ID: 10000000339795_001b002d464b500a2039314d	 seca 555	✔ Vollständig abgeschlossen Durch Service verifiziert

7. Ihr Gerät ist jetzt erfolgreich mit Ihrer persönlichen Datenbank verbunden und Einsatzbereit.