

seca mBCA 555/seca TRU

Tenant-Anbindung





seca mBCA 555/seca TRU





- Starten Sie auf einem Endgerät einen Browser (z.B. Chrome) und öffnen Sie die folgende Webseite: <u>https://secacloud.com/guest/login?accountType=analytics125</u>
- 2. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein.

3. Öffnen Sie das Menü oben links und wählen sie den Punkt "Geräteliste" aus.

seca mBCA 555/seca TRU

4. In der Geräteliste sind bislang noch keine Geräte hinzugefügt worden. Um Ihr Gerät hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf "Neues Gerät hinzufügen".

← Startseite			Gesamtanzahl Geräte: 0
Geräteliste			Neues Gerät hinzufügen
Gerätename	Modell	Gerätetest	
1 Keine Daten gefunden			

5. Geben Sie dazu in der folgenden Maske die Seriennummer Ihres Gerätes ein und klicken auf "Hinzufügen". Sie finden die Seriennummer Ihres Gerätes auf dem Typenschild links unten an der Plattform.

Neues Gerät hinzuf	ügen	×
Seriennummer:		
	Abbrechen	Hinzufügen

6. Jetzt wird das Gerät automatisch zu Ihrer persönlichen Datenbank (Tenant) hinzugefügt. Im Hintergrund wird noch ein Zertifikat installiert. Warten Sie, bis unter Ihrem hinzugefügten Gerät die Meldung "Zertifikat erfolgreich installiert" erscheint.

← Startseite	Gesamtanzahl Geräte: 22		
Geräteliste			Neues Gerät hinzufügen
Gerätename	Modell	Gerätetest	
1000000339795 Externe ID: 10000000339795_001b002d464b500a2039314d	seca 555	Vollständig abgeschlossen Durch Service verifiziert	

7. Ihr Gerät ist jetzt erfolgreich mit Ihrer persönlichen Datenbank verbunden und Einsatzbereit.