

seca 354

Deklaracja zgodności



Firma seca gmbh & co. kg oświadcza niniejszym, że produkt spełnia wymogi stosujących się do niego dyrektyw europejskich. Pełna deklaracja zgodności jest dostępna na stronie: www.seca.com.

Medical Measuring
Systems and Scales
since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg • Germany

Telephone +49 40 20 00 00 0
Fax +49 40 20 00 00 50
info@seca.com

All contact data under www.seca.com

seca
group

seca deutschland

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria

seca polska


seca middle east

seca brasil

seca suomi

seca américa latina

seca asia pacific

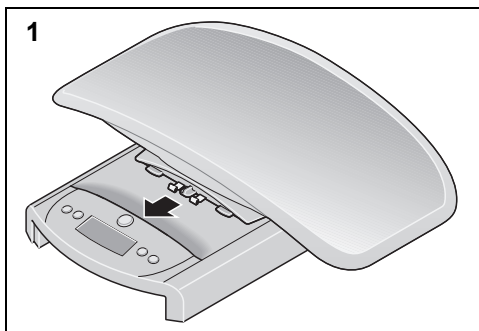

Ustawianie wagi

- Usunąć wszystkie elementy opakowania i włożyć baterie zgodnie z poniższym opisem.
- Wagę ustawić na stabilnym, równym podłożu. Następnie umieścić szalkę na ramie wagi w sposób przedstawiony na rysunku i przyciągnąć ją do przodu, tak aby szalka wskoczyła we właściwe miejsce (będzie słychać kliknięcie), powodując zmianę

położenia przycisku zwalniającego, który powinien znaleźć się u góry (rysunek 1). Szalka jest przymocowana do ramy wagi.

- Aby zdjąć szalkę, wystarczy mocno nacisnąć przycisk zwalniający i odsunąć szalkę do tyłu (rysunek 2).

Podłączanie zasilania

Waga jest zasilana z baterii. Dostarczone wraz z wagą 4 baterie typu Mignon umożliwiając wykonanie maks. 20000 ważeń. Przy wkładaniu baterii należy uważać na prawidłowe rozmieszczenie biegunów!

- Zdjąć szalkę i ostrożnie obrócić wagę spodem do góry.

- Otworzyć pokrywę komory na baterie i umieścić wewnątrz dostarczone baterie, zwracając przy tym uwagę na rozmieszczenie biegunów (rysunek 3).
- Starannie zamknąć pokrywę komory na baterie.

Prawidłowy sposób ważenia

Aby można było bezpiecznie odczytać ciężar powyżej 500g, wagę wyposażono w funkcję „AUTOHOLD”. Funkcja ta automatycznie „zatrzymuje” wynik na wyświetlaczu do czasu, aż waga wyłączy się samoczynnie po upływie 2 minut lub zostanie ponownie obciążona.



- Włączyć wagę, naciskając zielony przycisk. Na wyświetlaczu musi pojawić się wartość 0.000. Sygnał akustyczny informuje, że waga jest gotowa do pracy.
- Wąże niemowląt: Umieścić niemowlę na szalce. Zadbaj o to, aby dziecko leżało w miarę spokojnie (rysunek 4).
- Wąże dzieci, które potrafią stać: Zdjąć szalkę w sposób opisany powyżej. Należy uważać przy tym na stabilność ramy. Postawić dziecko na wadze i uważać, aby stało spokojnie (rysunek 5).
- Na wyświetlaczu odczytać wynik ważenia. Wagi nie wolno obciążać powyżej podanego maks. obciążenia!
- Dzięki zintegrowanej funkcji Tara wagę można wytarować po ewentualnym umieszczeniu na niej podkładki, pieluchy itp. Waga znajdujących się na

wadze przedmiotów zostanie następnie automatycznie odjęty od wyniku ważenia brutto:

- W tym celu należy najpierw położyć na wadze przedmiot, za pomocą którego zamierzamy wytarować wagę.
- Następnie nacisnąć przycisk **TARE**. Wyświetlacz wagi ponownie pokaże „0”, co oznacza, że można rozpocząć ważenie.

Wskazówka: Bardzo niespokojne niemowlęta mogą zakłócić dokładność ważenia różnicowego.

- Wagę można wyłączyć, naciskając przycisk **START**.

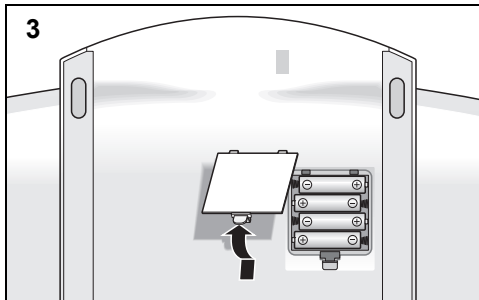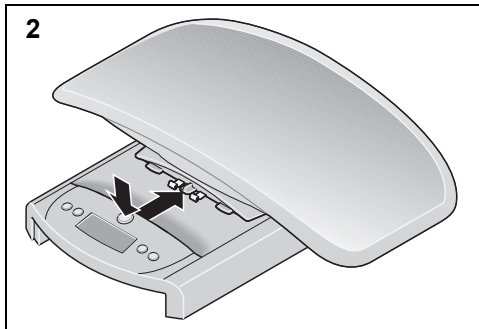

Korzystanie z funkcji wyniku różnicowego

- Po zakończeniu ważenia nacisnąć i przytrzymać przycisk **STO**, aż pojawi się wartość -> **M** i rozlegnie się sygnał akustyczny. Wynik ważenia został zapisany i pozostanie w pamięci również po wyłączeniu wagi.
- Podczas kolejnego ważenia można, przez krótkie naciśnięcie przycisku **STO**, przełączyć urządzenie na

tryb wyświetlania różnicy, tzn. wyświetlić aktualną wartość pomniejszoną o zapisaną wcześniej wartość. Funkcja ta umożliwia, np. zmierzenie ilości pokarmu, jaką dziecko otrzymało podczas karmienia lub zmierzenie przyrostu masy ciała od ostatniego ważenia.

Automatyczne wyłączenie / tryb energooszczędny

Waga jest gotowa do ważenia przez ok. 20 sek. po włączeniu. Po zważeniu wyświetlacz przez ok. 2 min. pokazuje zmierzoną wartość, po czym waga wyłącza się automatycznie.

Przełączanie jednostek wyświetlacza

Zmierzone wartości mogą być wyświetlane w kilogramach (kg) lub funtach: uncjach (lbs:oz) lub dziesiętnych wartościach funta (lbs); zmiana jednostki za pomocą przycisku **kg / lbs**.

Czyszczenie

W razie potrzeby szalkę i zewnętrzną część wagi można wyczyścić wilgotną szmatką. Do czyszczenia nie wolno używać środków powodujących zadrapania lub ostrych środków czyszczących, spirytusu, benzyny, itp.!


Co robić, jeżeli...

... pod obciążeniem nie wyświetla się wynik ważenia?

- Sprawdzić, czy baterie zostały prawidłowo włożone.
- ... pojawia się: **bAtE?**
- Wyczerpują się baterie. Wymienić baterie.

... pojawia się: **5t0P?**

- Przekroczono maks. obciążenie! Należy natychmiast odciążyć wagę, aby uniknąć jej trwałego uszkodzenia.

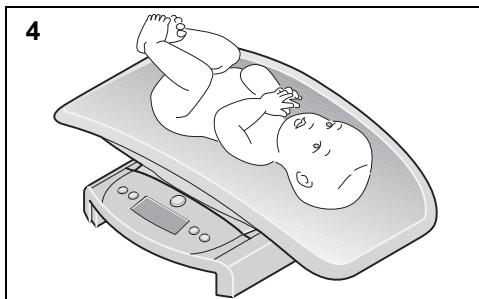

Utylizacja baterii

Nie wyrzucać zużytych baterii razem z odpadami domowymi. Baterie należy oddawać w odpowiednich punktach zbiórki. Kupując nowe baterie, należy wybierać baterie o zredukowanej ilości substancji niebezpiecznych, niezawierające rtęci (Hg), kadmu (Cd) i ołowiu (Pb).

Dane techniczne

seca 354 „lena“

Maks. obciążenie:	20 kg / 44 lbs
Działka elementarna:	0,005 kg < 10 kg > 0,01 kg
	0.2 oz < 22 lbs > 0.5 oz
	0.01 lbs < 22 lbs > 0.02 lbs
Dokładność:	±30 g lub ±0,6%
Wielkość cyfr:	22mm
Wymiary (S x W x G):	550 x 165 x 330 mm
Masa całkowita:	ok. 2,5 kg
Zakres temperatur:	+ 10 °C do + 40 °C
Baterie:	4 x typu Mignon AA (1,5V)

Gwarancja

Na braki spowodowane błędami materiałowymi albo produkcyjnymi udzielamy dwuletniej gwarancji (licząc od dnia dostawy). Gwarancja nie obejmuje części ruchomych, takich jak baterie, kable, zasilacze, akumulatory itp. Usterki podlegające gwarancji są usuwane bezpłatnie za okazaniem dowodu zakupu. Nie uwzględnia się innych roszczeń. Jeżeli urządzenie znajduje się w miejscu innym niż siedziba klienta, koszty transportu do naprawy i z naprawy ponosi klient. W przypadku uszkodzeń transportowych roszczenia z tytułu gwarancji można zgłaszać tylko pod warunkiem, że do transportu użyto kompletnego, oryginalnego opakowania, a produkt zabezpieczono i zamocowano w opakowaniu zgodnie ze stanem oryginalnym. Dlatego należy przechowywać wszystkie elementy opakowania.

Jeżeli urządzenie zostałoby otwarte przez osobę, która nie posiada wyraźnej autoryzacji producenta, wszelkie prawa z tytułu gwarancji wygasają.

Klientów zagranicznych prosimy, aby w przypadku usterek objętych gwarancją zwracali się bezpośrednio do sprzedawcy w danym kraju.

