

Lieber Neukunde!

Willkommen in der seca Familie! Mit dieser Checkliste stellen Sie sicher, dass Ihr mBCA vollständig und korrekt aufgebaut sowie erfolgreich in Ihr Netzwerk und die seca Cloud integriert wird. Folgen Sie den Schritten, um eine reibungslose Inbetriebnahme zu gewährleisten.

Schritt	Was ist zu machen?	Wie mache ich das?	Erledigt?
1	Gerät erhalten?	Für die Installation und Anbindung müssen Sie Ihr Gerät vor Ort haben, da auch auf dem Gerät Einstellungen gemacht werden müssen.	
2	Port freigeben	Damit die Datenübertragung in die Cloud funktioniert muss auf Ihrem Router der Port 22020 und 443 ausgehend freigeschaltet sein. Protokoll: TCP; HTTPS; Ziel Adresse ist: gpx.secacloud.com Bitte wenden Sie sich an Ihren IT-Dienstleister, wenn Sie dies nicht selbst machen können.	
3	Anbindung ins Netzwerk	Sie haben die Möglichkeit, Ihr Gerät mit WLAN oder Netzwerkkabel in Ihr Netzwerk anzubinden. Hier finden Sie dazu eine Anleitung. Bitte beachten Sie, dass die Netzwerkdose innerhalb von 3 m liegen und aktiviert sein muss. Für größere Abstände halten Sie bitte ein entsprechendes Netzwerkkabel bereit.	
4	Cloud Zugang	Die seca Cloud ist über https://www.secacloud.com erreichbar und hier finden Sie eine Anleitung für die Anbindung Ihres Geräts an Ihre Tenant. Folgende Anmeldedaten haben Sie vorab per E-Mail erhalten: - <i>Ihren Registrierungsschlüssel</i> Sie sollten sich schon einen eigenen Tenantzugang angelegt haben.	
5	Termin buchen	Sie brauchen Hilfe? Buchen Sie sich einen Termin bei unseren Remote Service Mitarbeitern hier .	