

## seca mBCA Alpha (545) seca TRU Alpha (452)

LAN-Konfiguration







seca.com

## LAN-Konfiguration

- 1. Stellen Sie sicher, dass Port 22020 für ein- und ausgehende Verbindungen innerhalb Ihrer Firewall aktiviert ist.
- 2. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät über das mitgelieferte Original-Netzteil mit Strom versorgt wird.
- 3. Verbinden Sie das Gerät über ein LAN-Kabel mit dem Netzwerk.
- 4. Oben rechts im Display erscheint ein LAN-Symbol, sobald sich das Gerät mit dem Netzwerk verbunden hat.



- 5. Um das Gerät mit dem seca analytics 125 zu verbinden, geben Sie die Serveradresse wie unten gezeigt ein.
- 6. Geben Sie die Serveradresse gpx.secacloud.com ein und drücken Sie die Bestätigungstaste unten rechts

<b>〈</b> Settings	ជ្រ	🕻 Network	ជ្រ	<	S	er١	/er	a	dd	re	ss	ធា
Restart	>	Server address	>	 gpx.secacloud.com				n				
Autohold		WiFi	>						-			
Filter	>	Access Point	0	٩v	N	e I	r t	: у	/ι	ıi	C	o p
Display	۵ ک	Anon.	0	a	S	d	f	g	h	j	k	I
Network	>			↔	z	х	C	۷	b	n	m	$\langle \times \rangle$
				123					•			
^	~			×				~				

7. Mit diesem Schritt werden die Netzwerkeinstellungen auf dem Gerät abgeschlossen.

## seca.com