

seca mBCA Alpha (545) seca TRU Alpha (542)


LAN-Konfiguration

Konfigurieren
Sie Ihre LAN-
Verbindung in
nur wenigen
Schritten




LAN-Konfiguration

1. Stellen Sie sicher, dass Port 22020 und 443 für ein- und ausgehende Verbindungen innerhalb Ihrer Firewall aktiviert ist.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät über das mitgelieferte Original-Netzteil mit Strom versorgt wird.
3. Verbinden Sie das Gerät über ein LAN-Kabel mit dem Netzwerk.
4. Oben rechts im Display erscheint ein LAN-Symbol, sobald sich das Gerät mit dem Netzwerk verbunden hat.

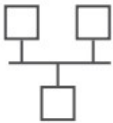

5. Um das Gerät mit dem seca analytics 125 zu verbinden, geben Sie die Serveradresse wie unten gezeigt ein.
6. Geben Sie die Serveradresse **gpx.secacloud.com** ein und drücken Sie die Bestätigungstaste unten rechts

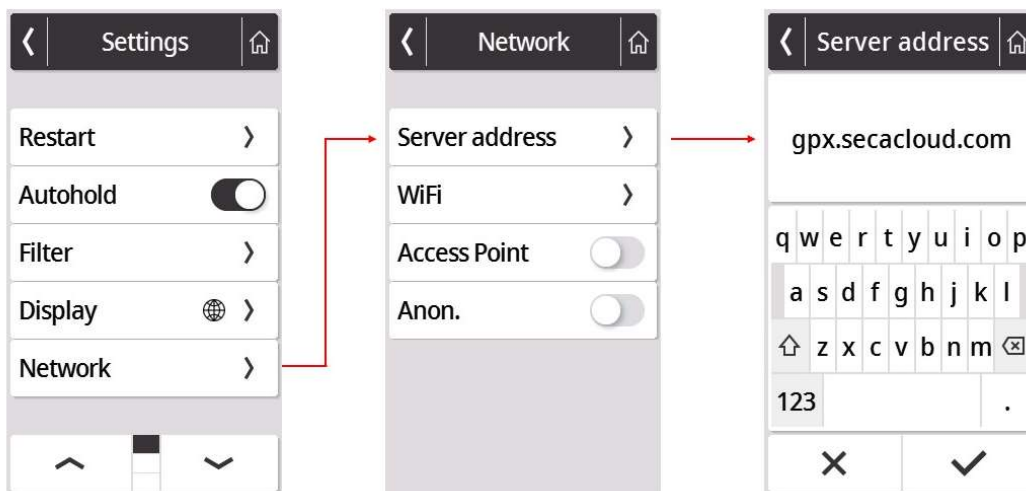

7. Mit diesem Schritt werden die Netzwerkeinstellungen auf dem Gerät abgeschlossen.