

## Lieber Neukunde!

Willkommen in der seca Familie! Mit dieser Checkliste stellen Sie sicher, dass Ihr mBCA vollständig und korrekt aufgebaut sowie erfolgreich in Ihr Netzwerk und die seca Cloud integriert wird. Egal, ob Sie den Aufbau selbst durchführen oder es für Sie gemacht wurde. Folgen Sie den Schritten, um eine reibungslose Inbetriebnahme zu gewährleisten.

Schritt	Was ist zu machen?	Wie mache ich das?	Erledigt?
1	Aufbau des Gerätes	<b>Hier</b> finden Sie die Aufbau Instruktionen. Alle Geräte sollten 1 m frei zu anderen technischen Geräten stehen	
2	Port freigeben	Damit die Datenübertragung in die Cloud funktioniert muss auf Ihrem Router der Port <b>22020</b> ausgehend freigeschaltet sein. Protokoll: TCP; HTTPS; Ziel Adresse ist: <b>gpx.secacloud.com</b> Bitte wenden Sie sich an Ihren IT-Dienstleister, wenn Sie dies nicht selbst machen können.	
3	Anbindung an Ihr Netzwerk	Wenn Ihr seca mBCA per <b>WLAN</b> angebunden werden soll, finden Sie <b>hier</b> die Anleitung dazu. Wenn Ihr seca mBCA per <b>Netzwerkkabel</b> angebunden werden soll, finden Sie <b>hier</b> die Anleitung. Bitte beachten Sie, dass die Netzwerkdose innerhalb von 3 m liegen und aktiviert sein muss. Für größere Abstände halten Sie bitte ein entsprechendes Netzwerkkabel bereit.	
4	Cloud Zugang	Die seca Cloud ist über <a href="https://www.secacloud.com">https://www.secacloud.com</a> erreichbar. Folgende Anmeldedaten haben Sie vorab per E-Mail erhalten:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- external Tenant ID</li> <li>- Ihren Benutzernamen</li> <li>- Ihre genutzte E-Mail-Adresse</li> </ul> Sie sollten sich schon einen eigenen Benutzer angelegt haben. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie auf Passwort vergessen gehen und bekommen dann auf Ihre obenstehende E-Mail-Adresse einen Link für das Erstellen eines neuen Passworts.	
5	Termin buchen	Sie brauchen Hilfe? Buchen Sie sich einen Termin bei unseren Remote Service Mitarbeitern <b>hier</b> .	