

Statische (feste) IP vergeben


In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie eine statische IP-Adresse, auf einem Windows 10 Computer, einrichten.

Ausgangslage:


Der Anwender möchte dem PC, mit der installierter seca analytics 115, eine statische IP-Adresse zuweisen. Dies kann notwendig sein, um z. B eine Netzwerkverbindung zu einem mBCA herzustellen.

Vorgehensweise:


Gehen Sie zu "Einstellungen" (Klicken Sie auf die Windows-Schaltfläche und anschließend auf das Einstellungssymbol.)
(Sie können auf in das Suchfeld direkt „Netzwerk & Internet“ eingeben)

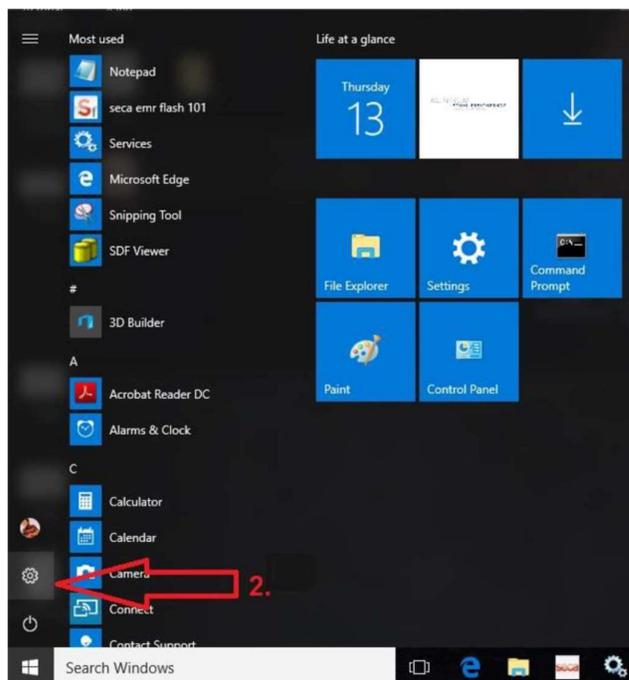


Öffnen Sie „Netzwerk & Internet“

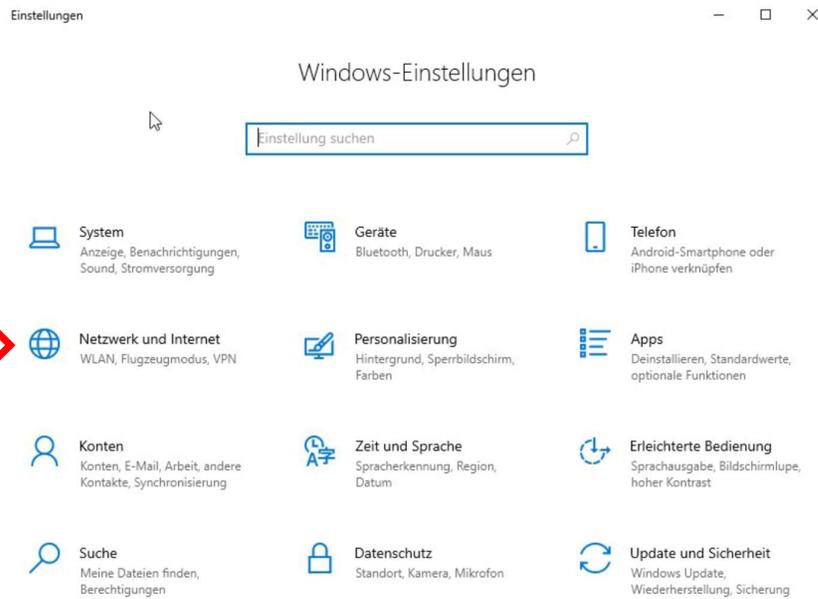


Auf „Adapteroptionen ändern“ klicken

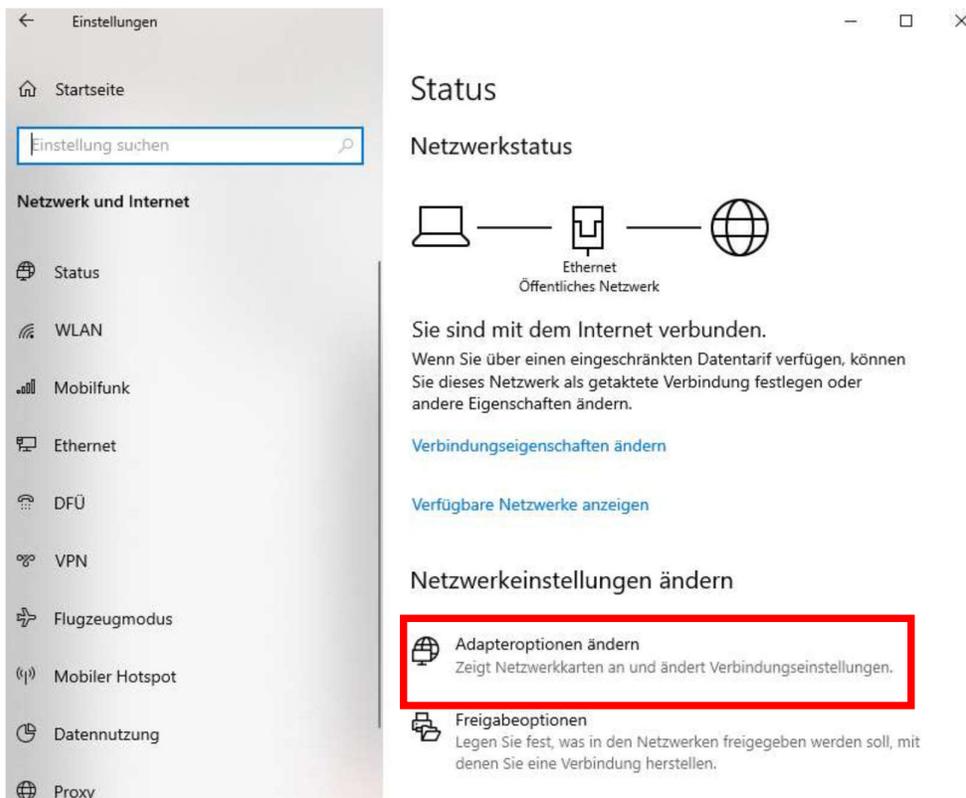


Rechter Mausklick auf „Ethernet“ und dann auf „Eigenschaften“ klicken

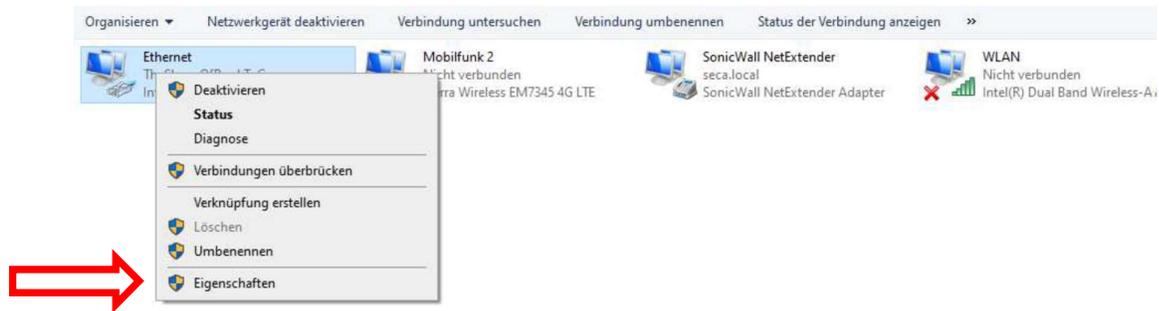

Doppelklick auf „Internetprotokoll, Version 4 /TCP/IPv4“

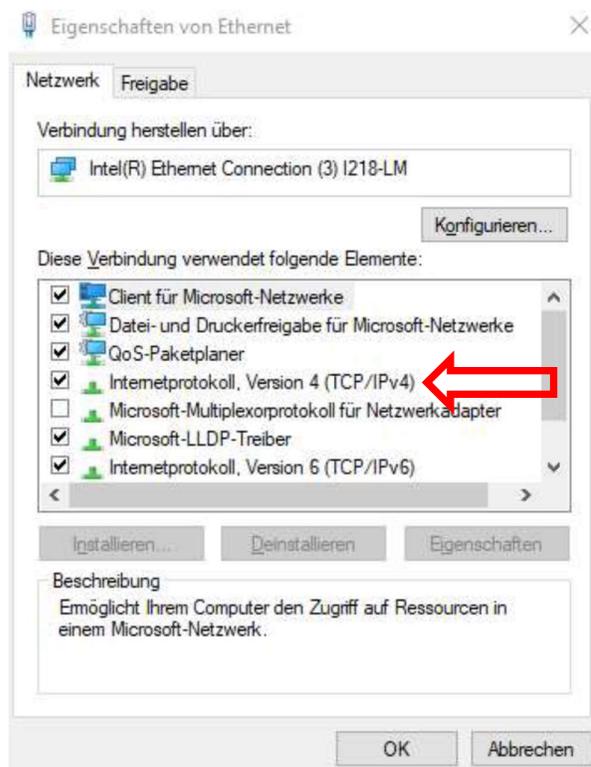

Hier können die IP-Adresse, Subnetzmaske und (wenn notwendig) ein Standardgateway definiert werden.

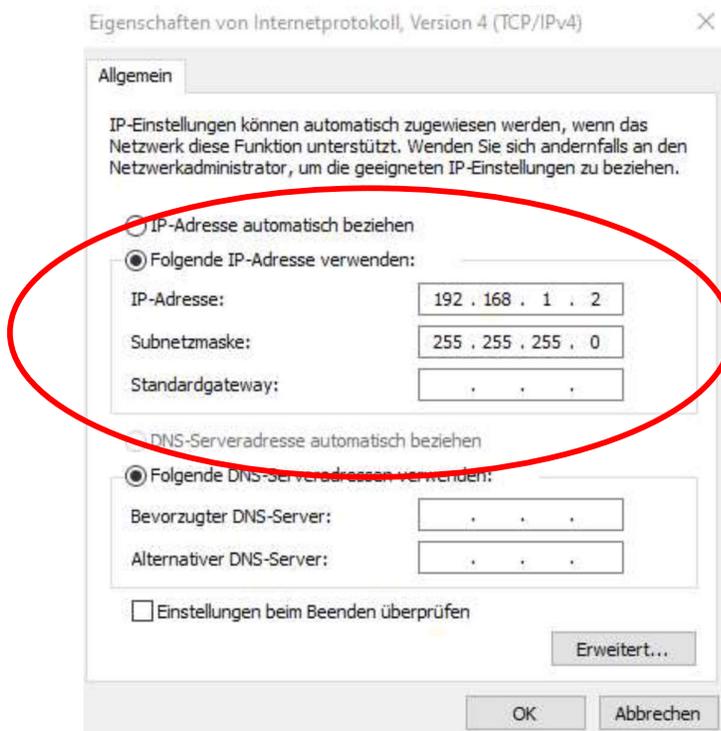

IP-Adresse und Subnetzmaske definieren:

Subnetzmaske: 255.255.255.0

(Bitte beachten Sie, dass die Subnetzmaske in dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, auf die gleiche Weise eingerichtet werden muss.)

IP-Adresse: z.B. 192.168.1.2

(Bitte beachten Sie, dass gemäß der oben ausgewählten Subnetzmaske die ersten drei Werte der IP-Adresse sowohl für den PC als auch für das Gerät, das Sie verbinden möchten, identisch sein müssen. Der vierte Wert muss unterschiedlich sein.)