

seca mBCA Pro / Ultra (555 / 554)

seca TRU Pro / Ultra (552)

Tenant-Anbindung

Jetzt
Tenant-Anbindung
in wenigen
Schritten
konfigurieren

EMR



seca mBCA Pro / Ultra (555 / 554) seca TRU Pro / Ultra (552)

seca analytics 125

Loggen Sie sich in Ihr Geschäftskonto ein

Tenant ID
|

Benutzername

Passwort 

[Passwort vergessen?](#)


Login

 SSO-Anmeldung

Sie haben kein Geschäftskonto? [Registrieren](#)

1. Starten Sie auf einem Endgerät einen Browser (z.B. Chrome) und öffnen Sie die folgende Webseite:
<https://eu.secacloud.com/guest/login?accountType=analytics125>

2. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein oder erstellen Sie sich eine eigene Tenant über die Schaltfläche "Registrieren".

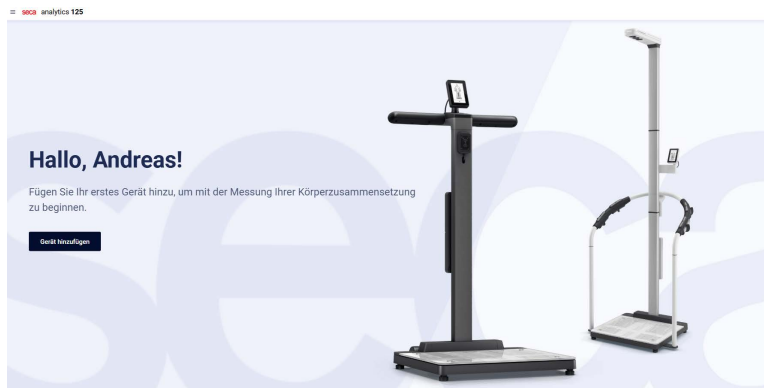

3. Nach dem ersten Login erscheint diese Startseite, sofern noch kein Gerät hinzugefügt wurde. Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“.

Gerät hinzufügen 

Seriennummer *

Registrierungsschlüssel *

Adressdaten eingeben

Straße *

Stadt

Bundesland/Provinz/Region

PLZ/Postleitzahl

Land * 

Kontaktanten eingeben

Vorname *

Nachname *

E-Mail *

Telefonnummer *


[Abbrechen](#) **Hinzufügen**

4. Bitte geben Sie anschließend alle Pflichtfelder ein, die mit einem Stern (*) markiert sind.
Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild unten links an der Plattform. Den Registrierungsschlüssel haben Sie vorab per E-Mail erhalten.

seca mBCA Pro / Ultra (555 / 554)


seca TRU Pro / Ultra (552)

seca analytics 125

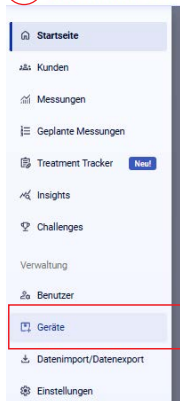

3. Wenn Sie schon ein Gerät in Ihrer Cloud haben, können Sie weitere Geräte hinzufügen. Öffnen Sie dazu das Menü oben links und wählen Sie den Punkt „Geräte“ aus.

4. Um Ihr Gerät hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf „Neues Gerät hinzufügen“.

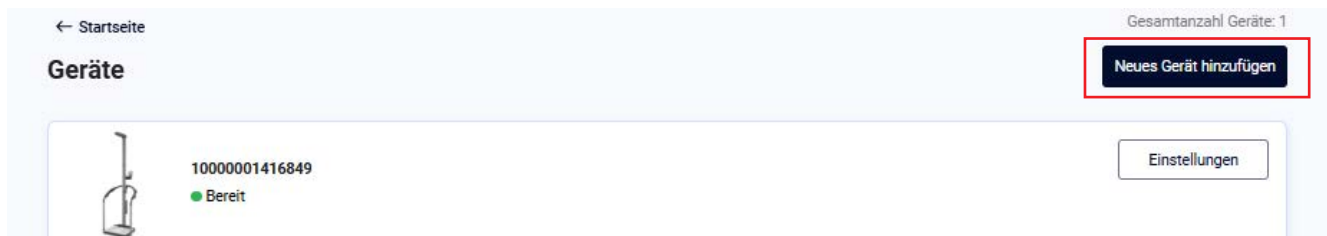

Gerät hinzufügen

Seriennummer *

Registrierungsschlüssel *

Adressdaten eingeben

Straße *

Stadt

Bundesland/Provinz/Region

PLZ/Postleitzahl

Land *

Kontaktdaten eingeben

Vorname *

Nachname *

E-Mail *

Telefonnummer *

Abbrechen **Hinzufügen**

5. Bitte geben Sie in der folgenden Maske alle Pflichtangaben ein, die mit einem Stern (*) markiert sind und klicken Sie anschließend auf „Hinzufügen“.
Die Seriennummer Ihres Geräts finden Sie auf dem Typenschild unten links an der Plattform. Den Registrierungsschlüssel haben Sie vorab per E-Mail erhalten.
6. Jetzt wird das Gerät automatisch zu Ihrer persönlichen Datenbank (Tenant) hinzugefügt. Im Hintergrund wird noch ein Zertifikat installiert. Danach ist das Gerät betriebsbereit.

