


# Montageanweisung • Assembly instructions

## Notice d'assemblage • Instrucciones de montaje

### seca mBCA 545/seca mBCA 542

### BIA-Handgriff • BIA handle • Poignée AIB • Asa BIA

#### 1. VERWENDUNGSZWECK • INTENDED USE • DOMAINE D'UTILISATION • USO PREVISTO

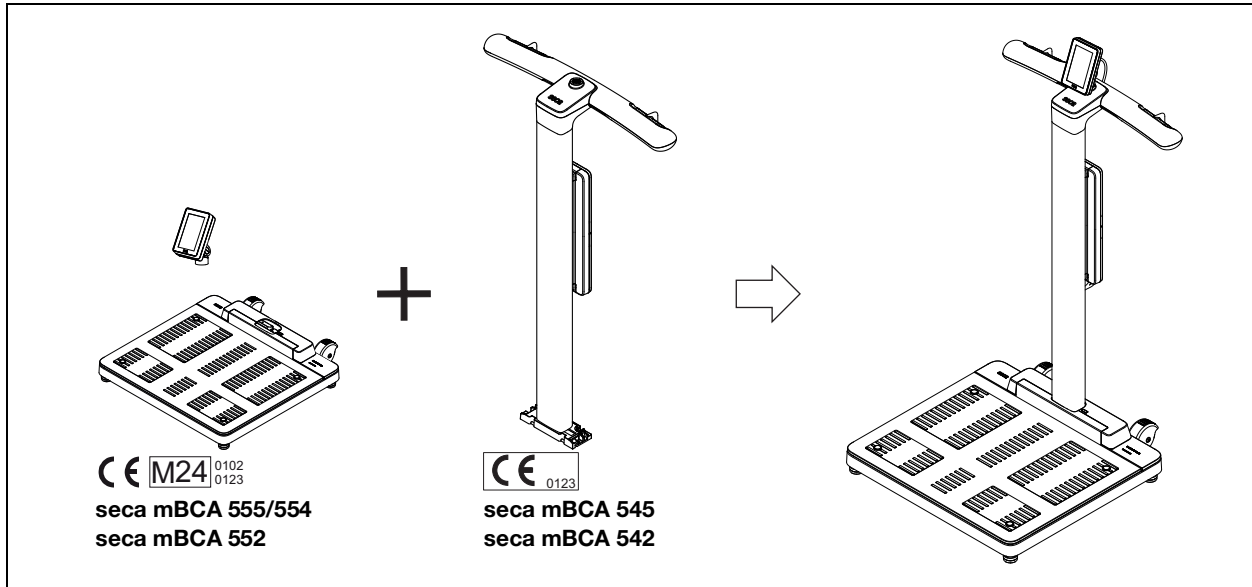

#### 2. SICHERHEITSHINWEISE • SAFETY PRECAUTIONS • CONSIGNES DE SÉCURITÉ • INDICACIONES DE SEGURIDAD

**! WARNING!**  
**Verletzungsgefahr/Fehlfunktionen**

- Schrauben mit Drehmomentschlüssel festziehen wie in den Abbildungen dargestellt.
- Schraubverbindungen mindestens einmal jährlich prüfen und festziehen.

**! WARNING!**  
**Risk of injury, malfunction**

- Tighten screws as indicated in figures using a torque wrench.
- Check and retighten screw connections at least once every year.


**! AVERTISSEMENT !**  
**Risque de blessure/dysfonctionnement**

- Serrer les vis avec une clé dynamométrique comme indiqué sur les illustrations.
- Vérifier et resserrer les raccords vissés au moins une fois par an.


**! ¡ADVERTENCIA!**  
**Peligro de lesiones / Mal funcionamiento**

- Apretar los tornillos con una llave dinamométrica como se muestra en la figura.
- Comprobar y apretar las uniones roscadas al menos una vez al año.


**3. seca mBCA 545/seca mBCA 542 – LIEFERUMFANG • SCOPE OF DELIVERY • ÉLÉMENTS LIVRÉS •  
VOLUMEN DE SUMINISTRO**

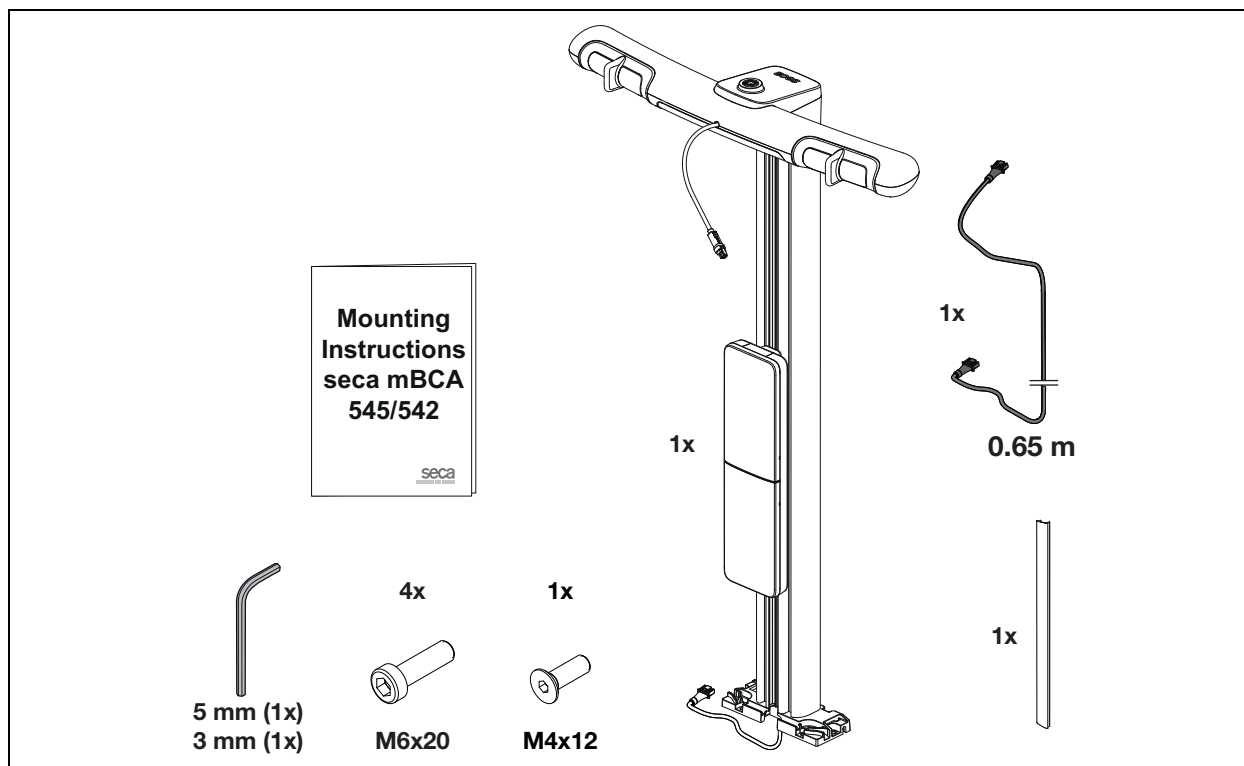


**4. ABDECKUNG DES SÄULENANSCHLUSSES ENTFERNEN • REMOVING COLUMN SOCKET COVER • RETIRER LE  
CACHE DE LA SURFACE D'ASSEMBLAGE DE LA COLONNE • SACAR LA CUBIERTA DE UNIÓN DE LA COLUMNA**

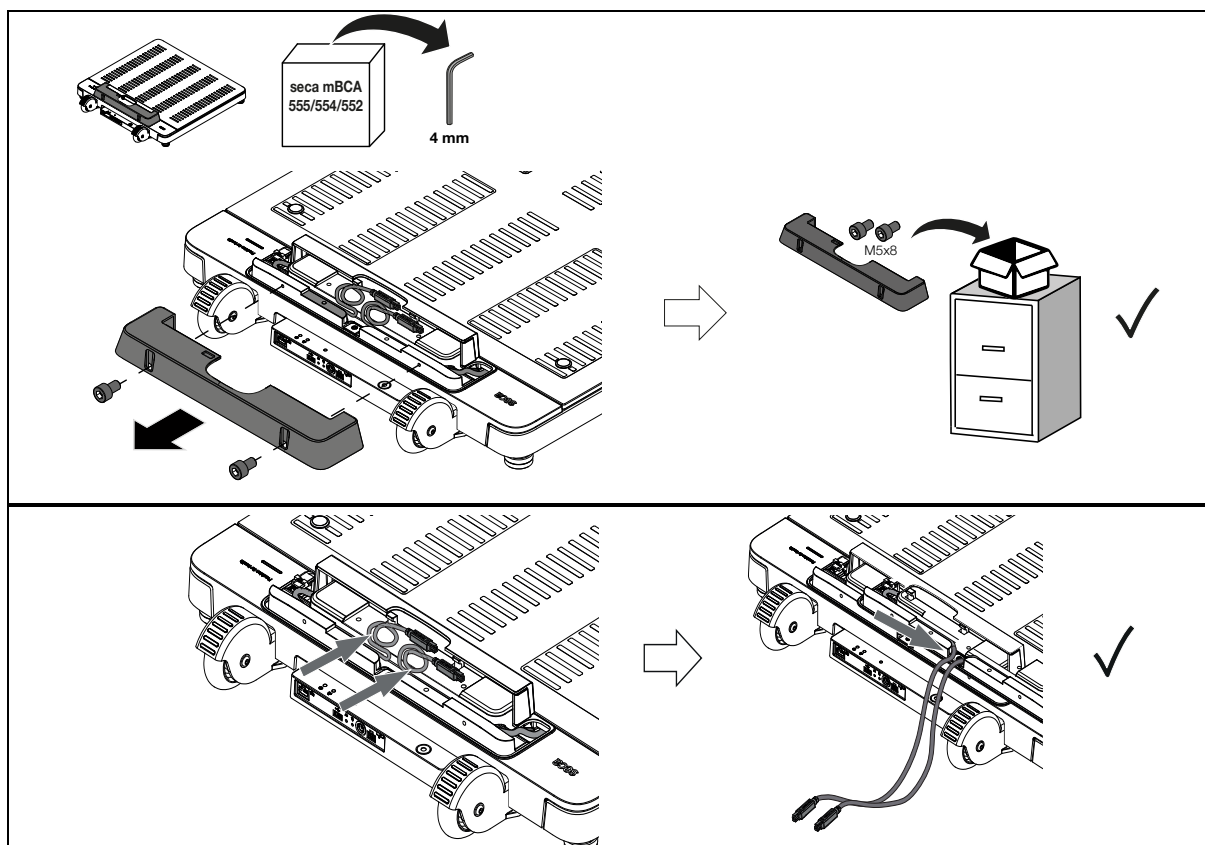


5. SÄULE MONTIEREN • MOUNTING COLUMN • MONTER LA COLONNE • MONTAR LA COLUMNA

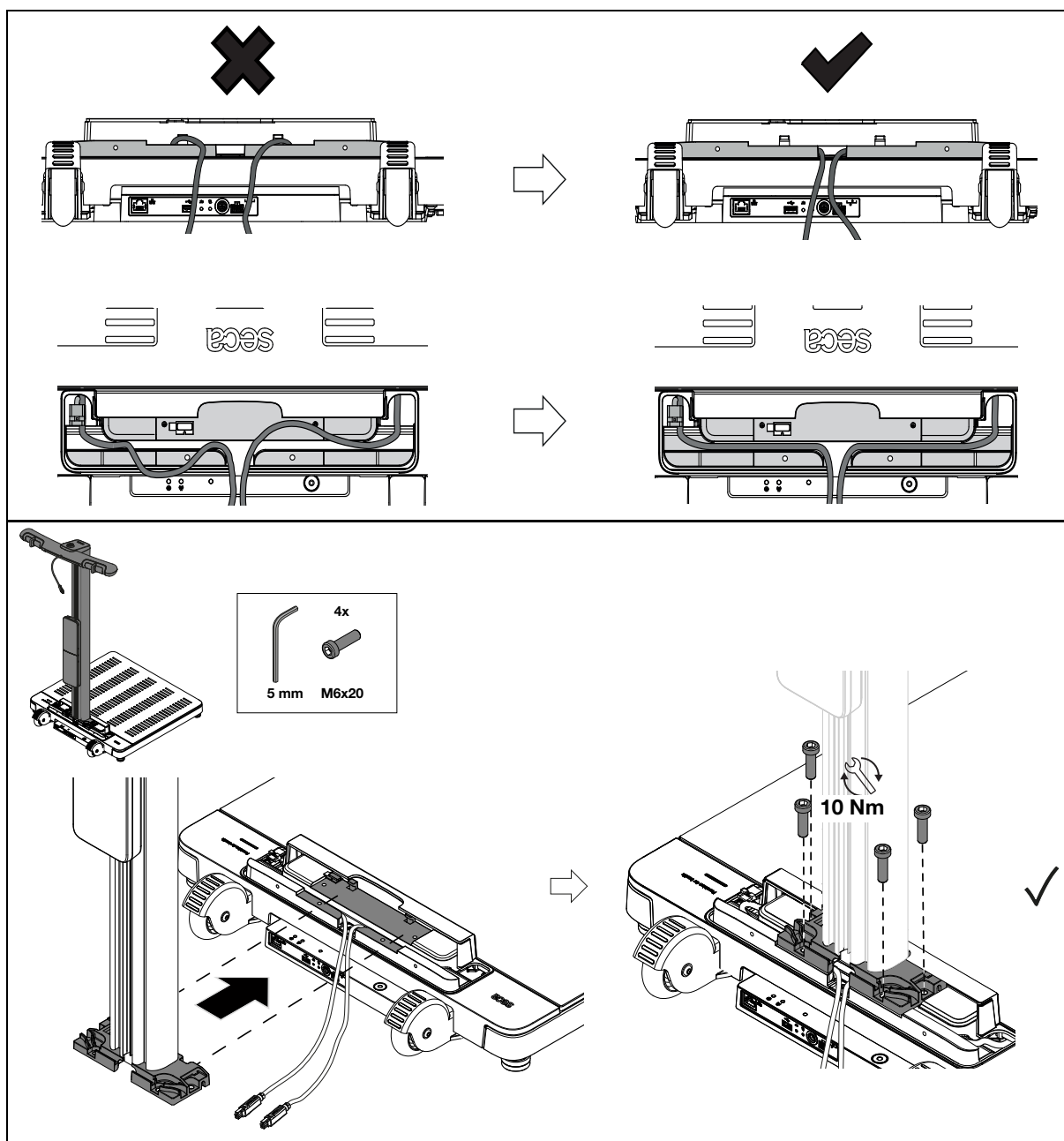


## 6. MULTIFUNKTIONSDISPLAY MONTIEREN • MOUNTING MULTIFUNCTIONAL DISPLAY • MONTER L'ÉCRAN MULTIFONCTIONS • MONTAR EL VISOR MULTIFUNCIONAL

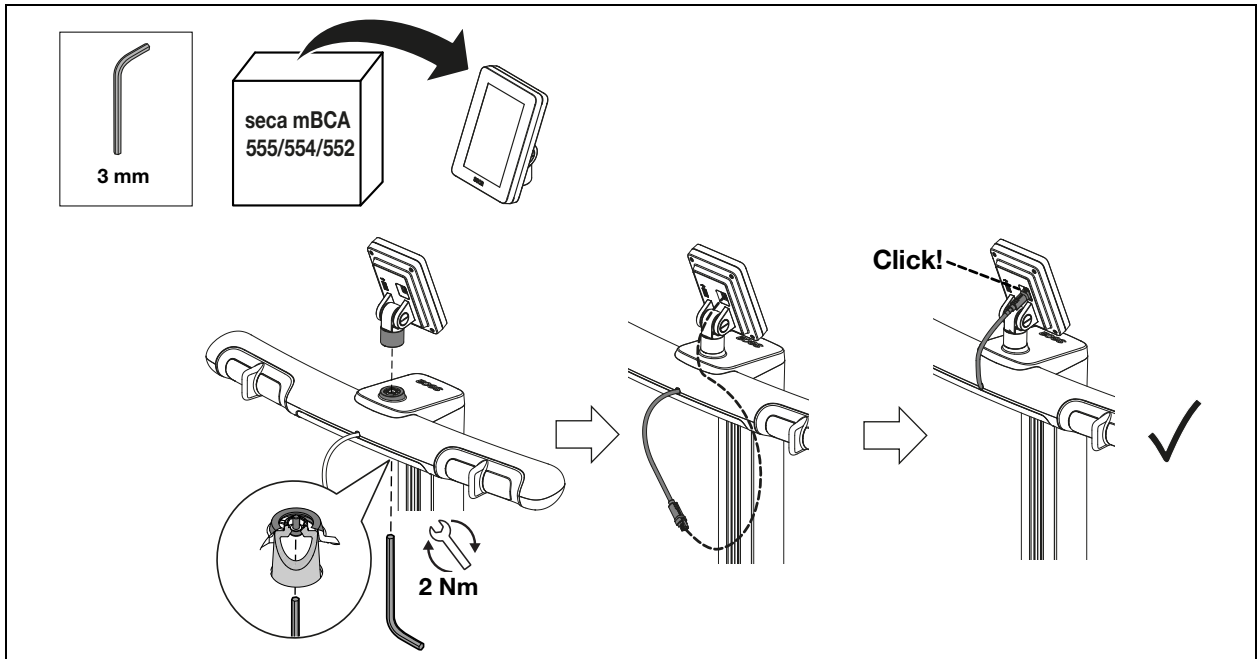


**7. ABDECKUNGEN DER BIA-BOX ENTFERNEN • REMOVING COVERS OF THE BIA BOX • RETIRER LES CACHES DU BOÎTIER AIB • SACAR LAS CUBIERTAS DE LA CAJA BIA**

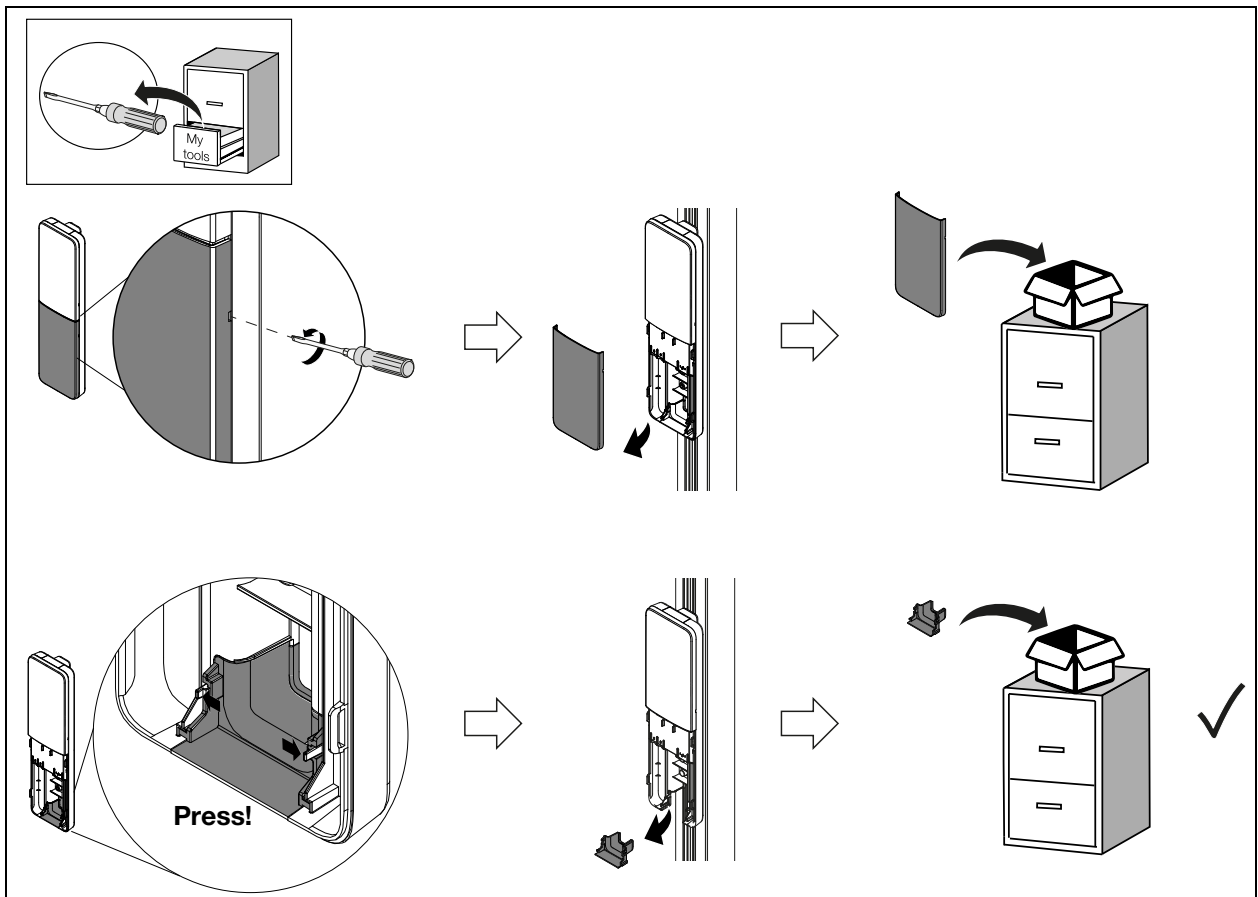


**8. KABEL DER FUßELEKTRODEN ANSCHLIEßEN • CONNECTING FOOT ELECTRODE CABLES • BRANCHER LES CABLES DES ÉLECTRODES PIEDS • CONECTAR LOS CABLES DE LOS ELECTRODOS PARA LOS PIES**

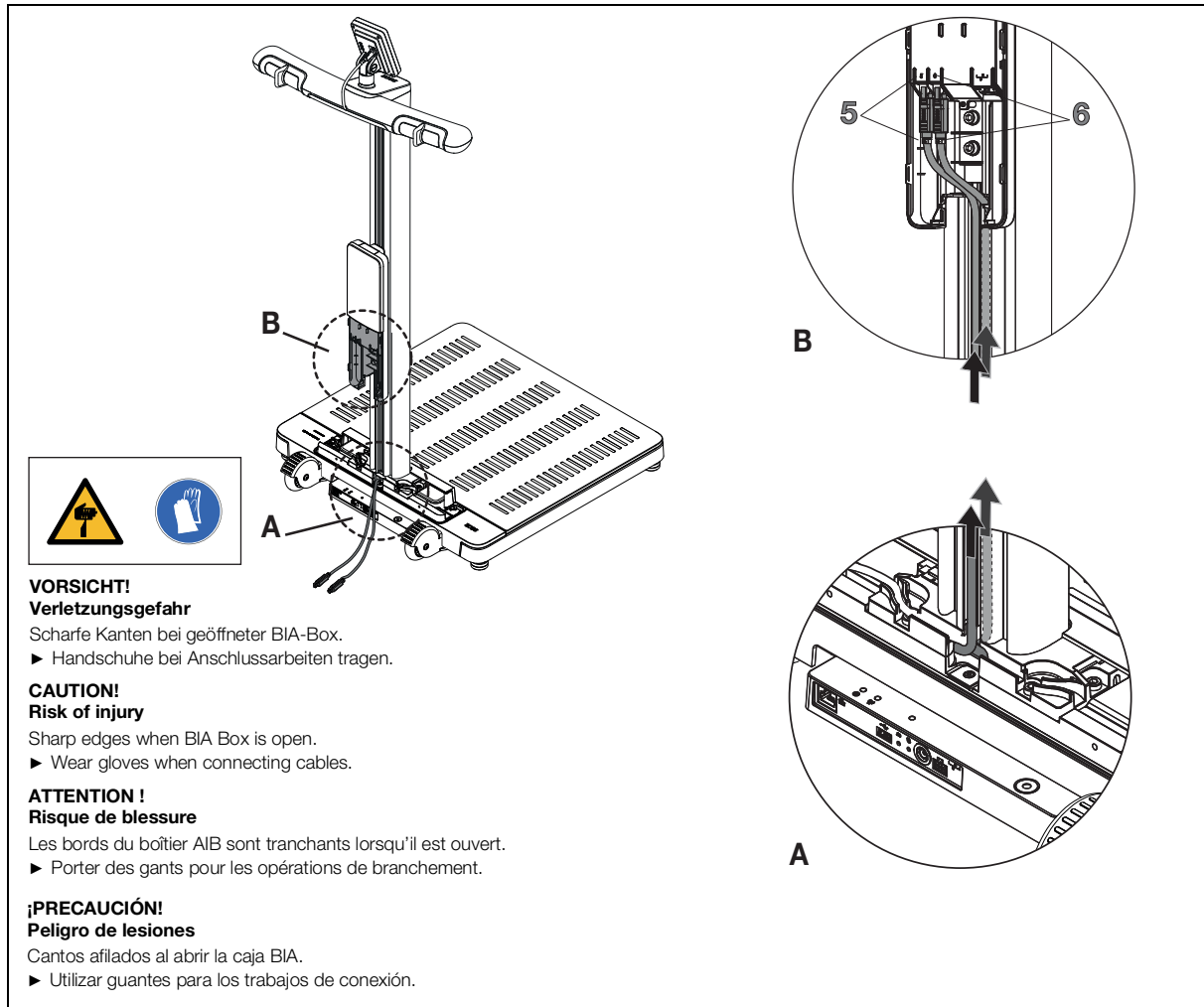


**9. KABEL DER WÄGEPLATTFORM ANSCHLIEßEN • CONNECTING PLATFORM CABLE • BRANCHER LE CÂBLE DE LA PLATEFORME DE PESÉE • CONECTAR EL CABLE DE LA PLATAFORMA DE PESAJE**

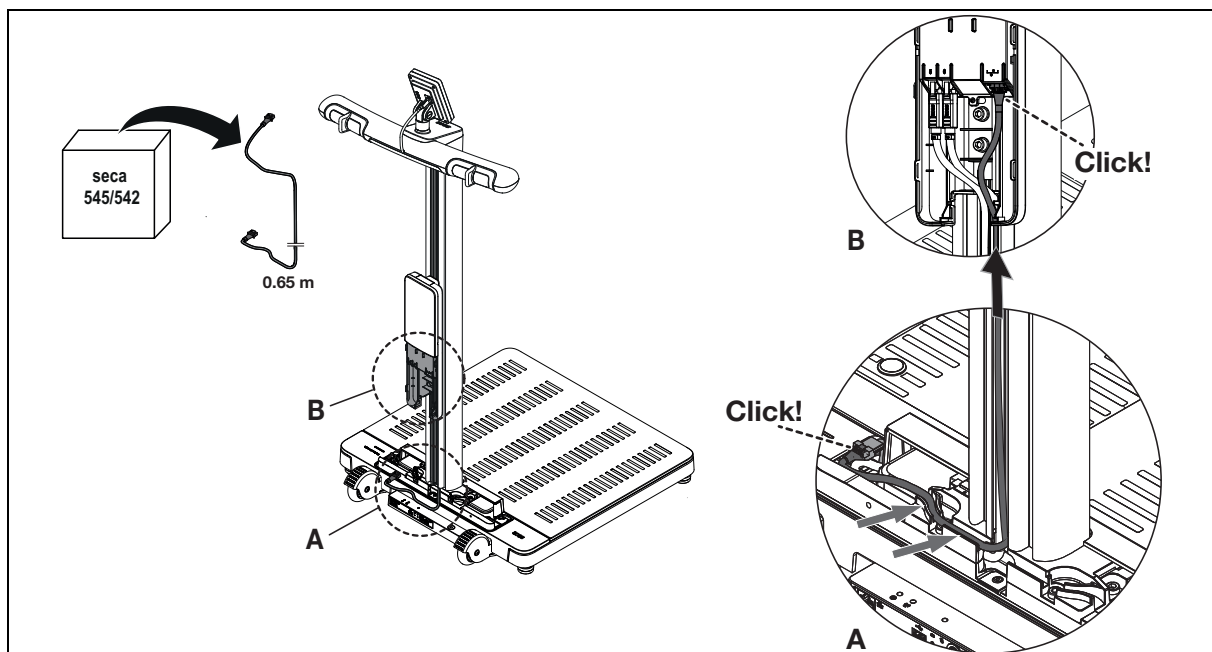


**10. ABDECKUNGEN DER BIA-BOX MONTIEREN • MOUNTING COVERS OF BIA BOX • MONTER LES CACHES DU BOÎTIER AIB • MONTAR LAS CUBIERTAS DE LA CAJA BIA**

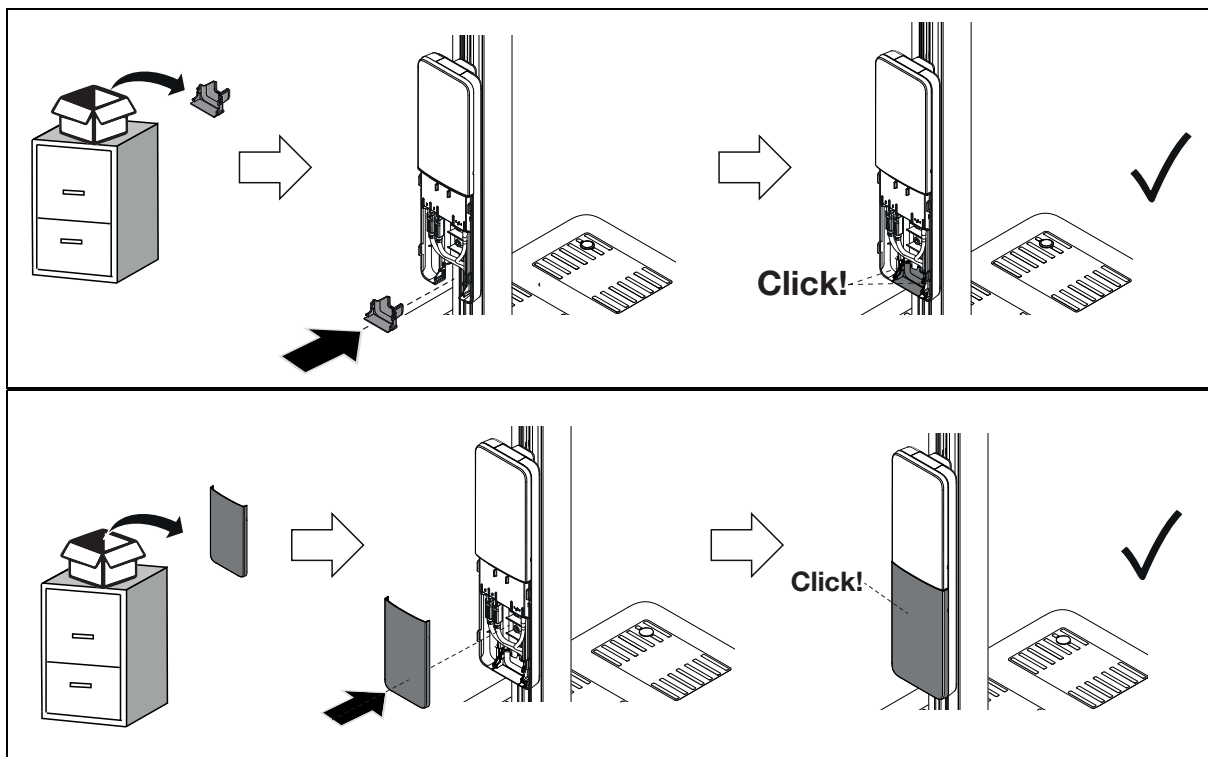


**11. ABDECKUNG DES SÄULENANSCHLUSSES MONTIEREN • MOUNTING COLUMN SOCKET COVER • MONTER LE CACHE SUR LA SURFACE D'ASSEMBLAGE DE LA COLONNE • MONTAR LA CUBIERTA DE LA UNIÓN DE LA COLUMNA**

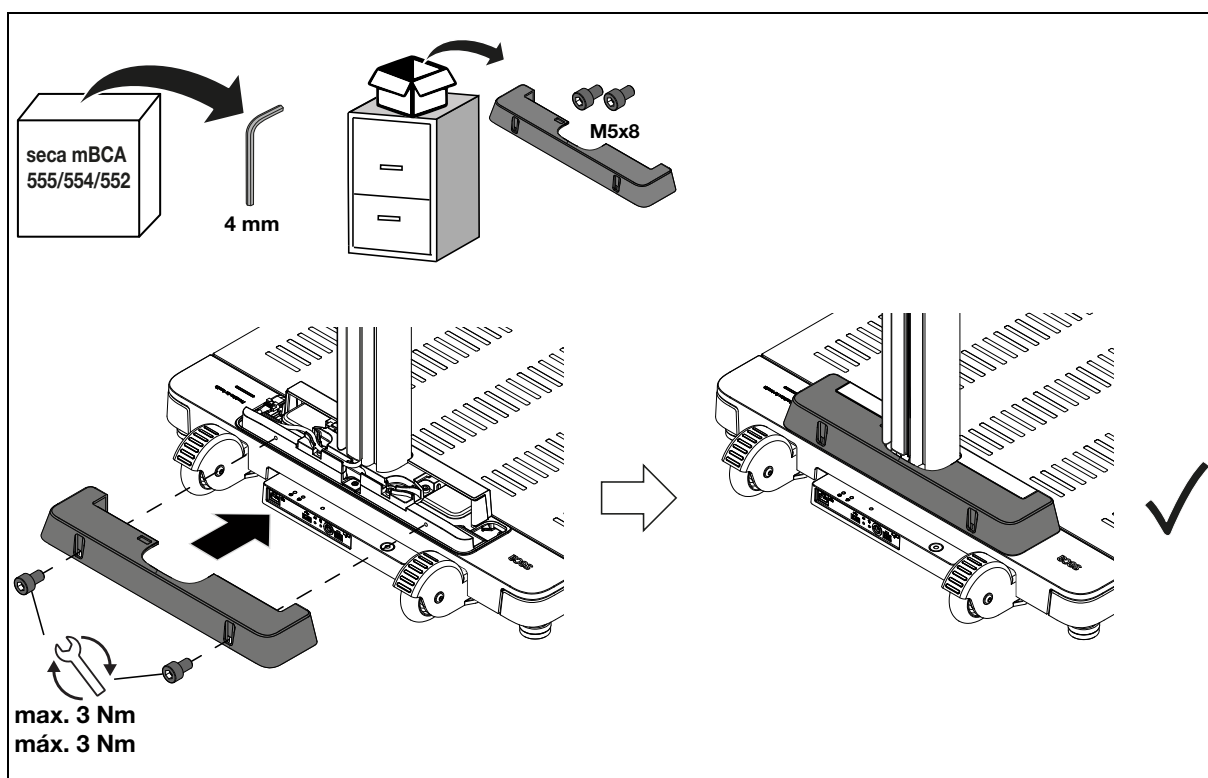

**12. SÄULENABDECKUNGEN MONTIEREN • MOUNTING COLUMN COVERS • MONTER LES CACHES SUR LA COLONNE  
• MONTAR LAS CUBIERTAS DE LA COLUMNA**

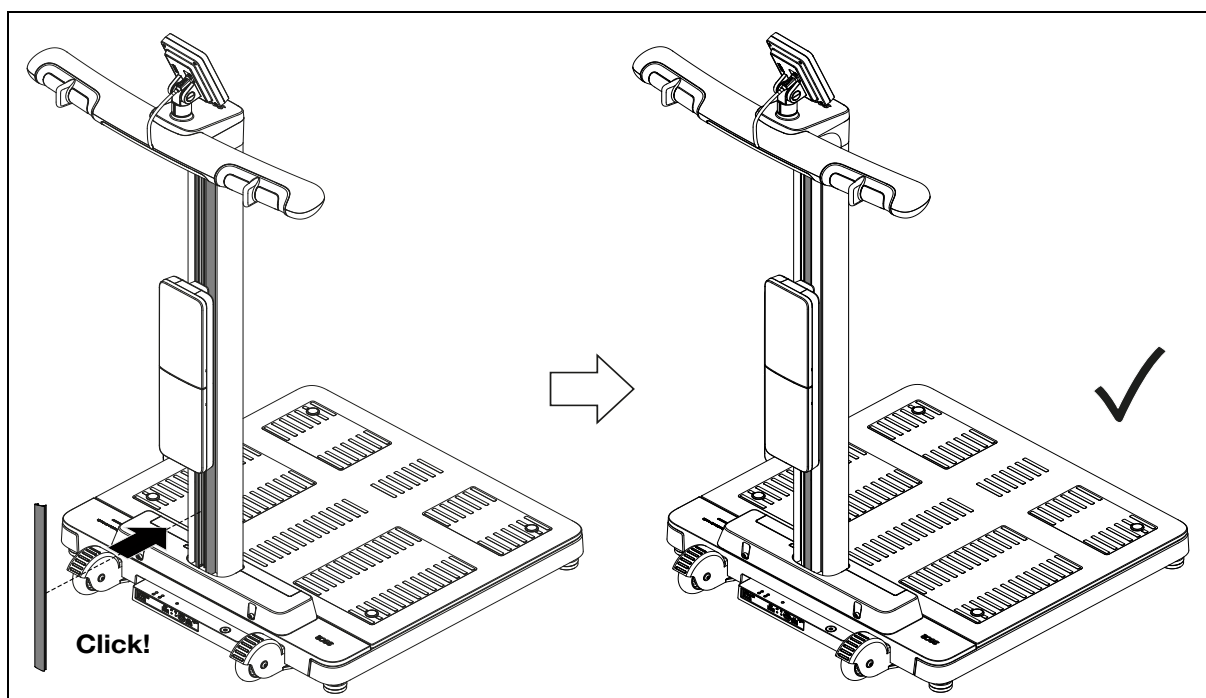

**13. VOR INBETRIEBNAHME • PRIOR TO OPERATION • AVANT LA MISE EN SERVICE • ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA**

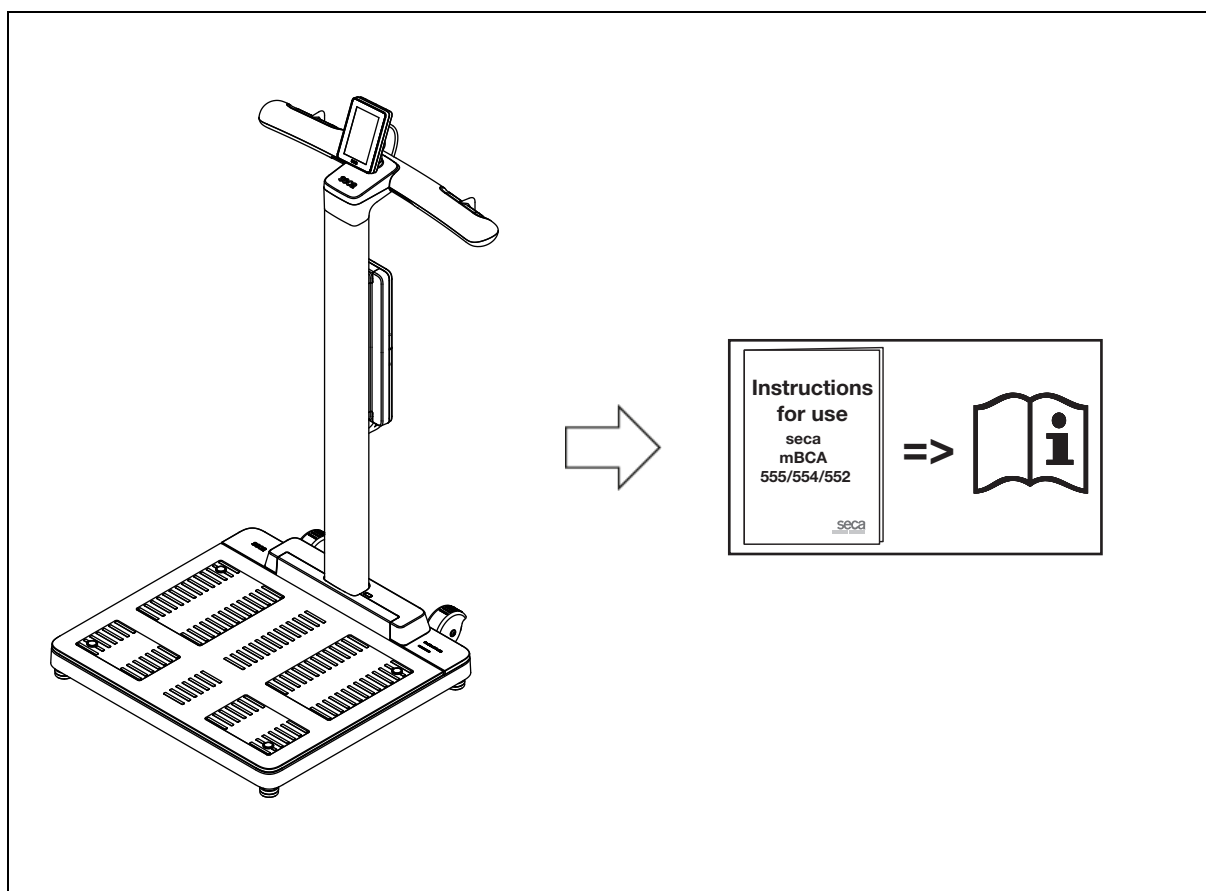

# Medical Measuring Systems and Scales since 1840

seca gmbh & co. kg  
Hammer Steindamm 3–25  
22089 Hamburg · Germany  
T +49 40 20 00 00 0  
F +49 40 20 00 00 50  
E [info@seca.com](mailto:info@seca.com)

seca operates worldwide with headquarters  
in Germany and branches in:

[seca france](#)  
[seca united kingdom](#)  
[seca north america](#)  
[seca schweiz](#)  
[seca zhong guo](#)  
[seca nihon](#)  
[seca mexico](#)  
[seca austria](#)  
[seca polska](#)  
[seca middle east](#)  
[seca suomi](#)  
[seca américa latina](#)  
[seca asia pacific](#)  
[seca danmark](#)  
[seca benelux](#)  
[seca lietuva](#)

and with exclusive partners in  
more than 110 countries.

All contact data at [seca.com](https://seca.com)