


組立


下図に従って組立をお願いします

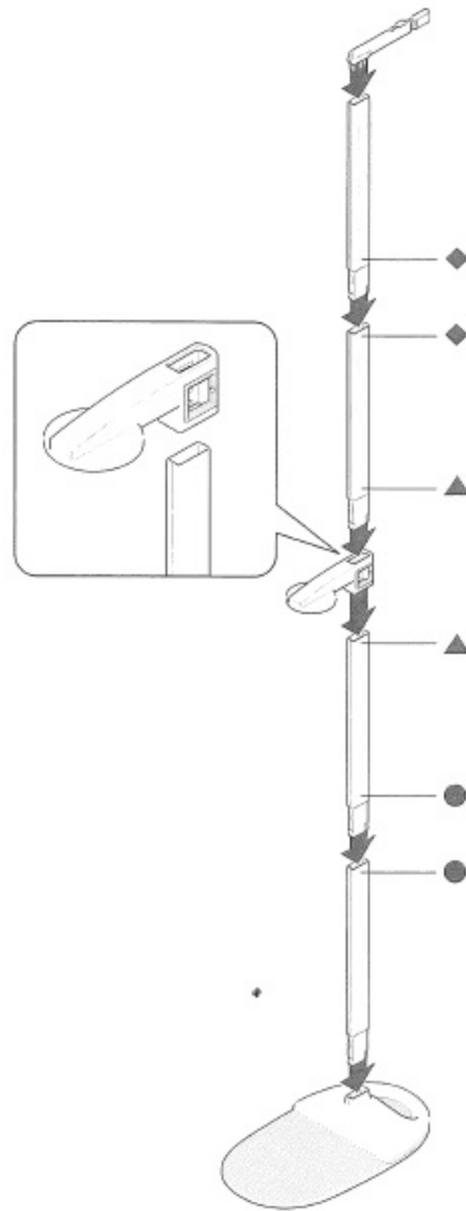

2

ご使用上の注意

本製品は軽量性をコンセプトにしております。測定時、後ろに体重をかけないで下さい。お手入れの際は、水ぶきでお願いします。洗剤等はご使用にならないで下さい。

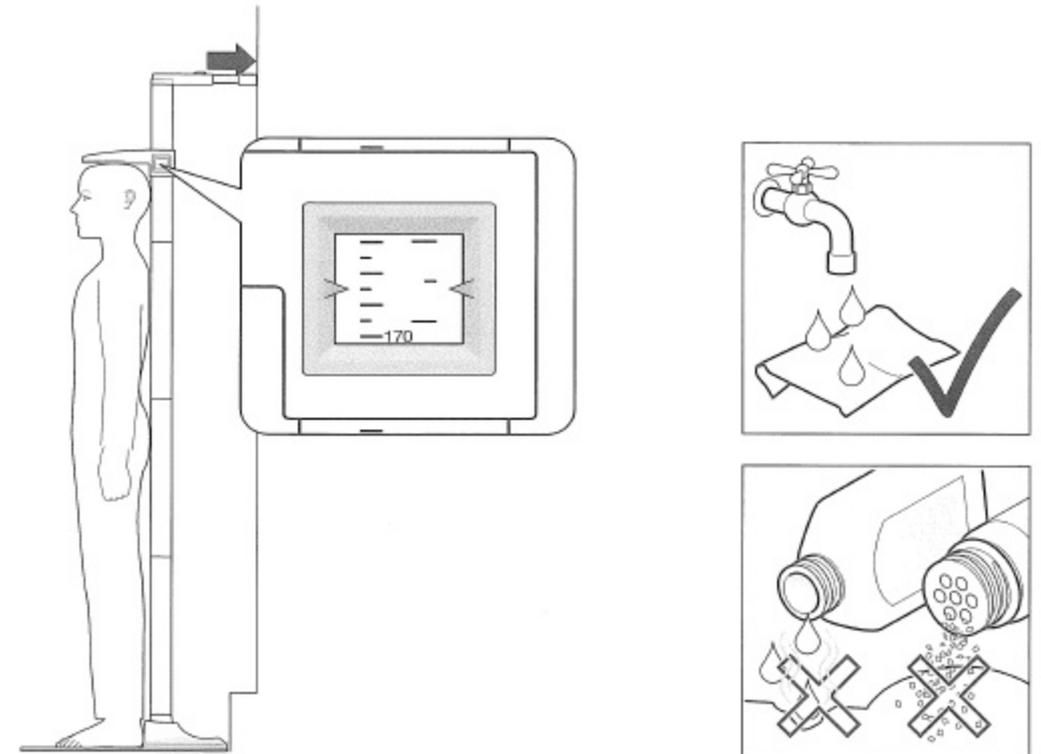

テクニカルデータ

表示単位 / 精度 / 測定範囲 / 温度 / サイズ / 重量


1 mm	±5 mm	20 - 205 cm	+10°C ... +40°C	a = 330 mm	3,7 kg
1/8 inch		8 - 81 inch		b = 575 mm	
				c = 2150 mm	

3

1.


seca 217

seca217の一番下の台を横にずらして外してください

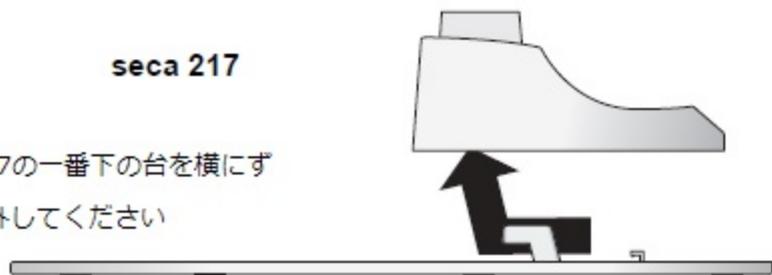


2.

seca 217

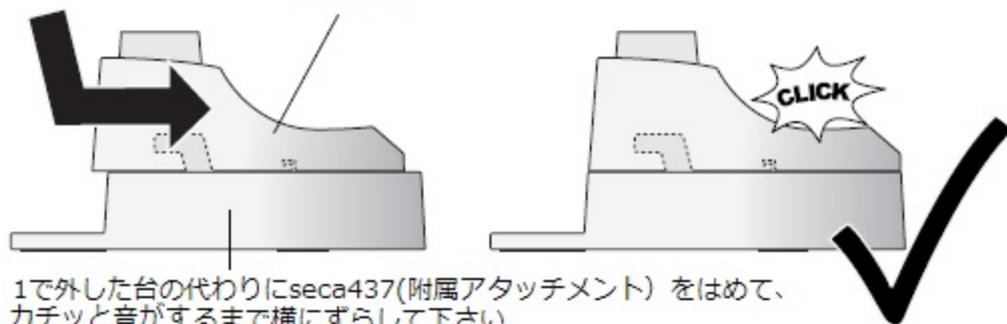


1で外した台の代わりにseca437(附属アタッチメント)をはめて、カチッと音がするまで横にずらして下さい

3.

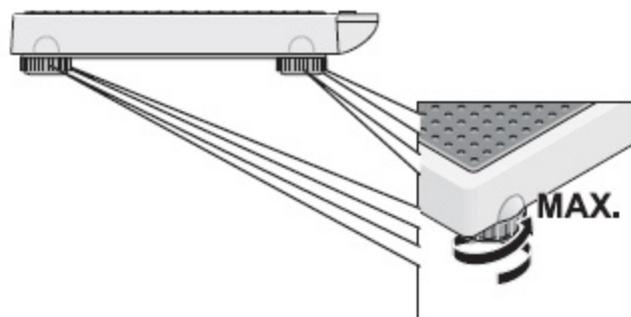

4.

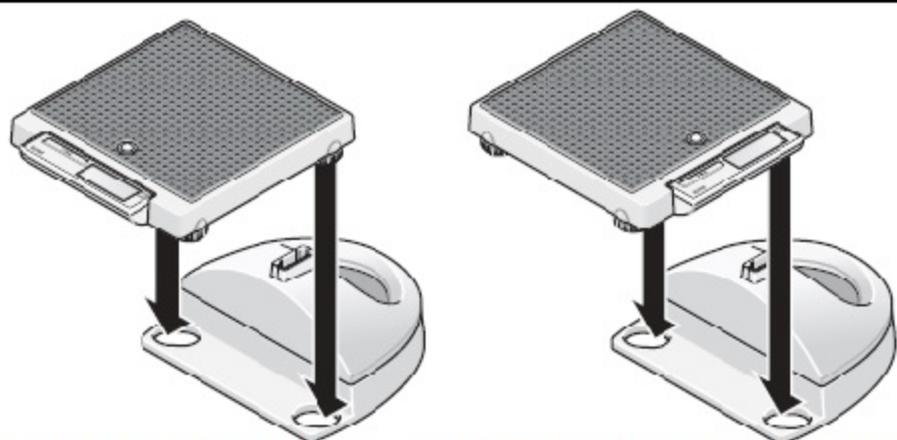

好きな方向に向けて、4つの足のうち、2つをアタッチメントの穴にあわせて下さい

5.

附属アタッチメント取付完成図

