

seca 354

Declaração de conformidade



Pela presente, seca gmbh & co. kg declara que o produto está em conformidade com as diretivas europeias aplicáveis. A declaração de conformidade integral encontra-se em: www.seca.com.

Medical Measuring
Systems and Scales
since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg • Germany

Telephone +49 40 20 00 00 0

Fax +49 40 20 00 00 50

info@seca.com

All contact data under www.seca.com

seca
group

seca deutschland

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria

seca polska


seca middle east

seca brasil

seca suomi

seca américa latina

seca asia pacific

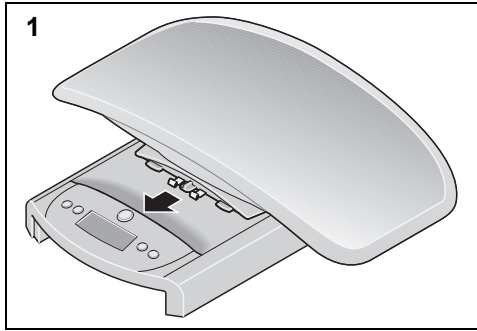

Montar a balança

- Remova a totalidade da embalagem e coloque as pilhas da forma a seguir descrita.
- Coloque a balança sobre uma superfície segura e plana. Depois coloque o prato de pesagem, tal como ilustrado, sobre a estrutura da balança e puxe-o para


- fora até encaixar de forma audível e o botão de desbloqueio se encontrar na posição superior. (figura 1)
- O prato de pesagem está agora fixo à estrutura.
- Para retirar o prato de pesagem, basta premir o botão de desbloqueio e empurrar o prato de pesagem para trás (figura 2).

Providenciar a alimentação de corrente

A alimentação de corrente da balança é feita através de pilhas. As 4 pilhas tipo Mignon AA (1,5V) permitem efectuar até 2 0000 pesagens. Ao introduzir as pilhas, certifique-se de que as coloca na posição correcta!

- Retire o prato de pesagem e vire cuidadosamente a balança ao contrário de forma a que a parte de baixo da balança fique acessível.

- Abra a tampa do compartimento das pilhas e coloque as pilhas fornecidas no respectivo compartimento, colocando-as na posição correcta (figura 3).
- Volte a fechar a tampa do compartimento das pilhas.

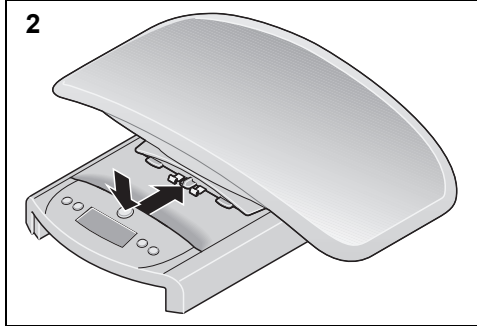

Pesar corretamente


Para pesos superiores a 500 g, a balança dispõe de uma função "AUTOHOLD" para uma leitura segura. Esta função "retém" automaticamente o resultado de pesagem no mostrador digital, até que a balança se desligue após 2 minutos ou seja efectuada uma nova pesagem.

- Ligue a balança premindo a tecla verde. No mostrador tem de aparecer **0.000**. O sinal acústico indica que a balança está pronta para a pesagem.
- No caso de pesagem de lactentes: coloque o lactente sobre o prato de pesagem. Certifique-se de que a criança permanece o mais quieta possível (figura 4).
- No caso de pesagem de crianças que já sejam capazes de se manter em pé: retire o prato de pesagem da forma descrita. Certifique-se da colocação segura da estrutura. Coloque a criança sobre a balança e certifique-se de que esta permanece quieta. (figura 5)
- Leia o resultado de pesagem no mostrador. Não pode ser excedida a carga máxima da balança!

- Com a ajuda da função TARA podem ser tarados objectos que se encontrem na balança, como bases, fraldas, etc. O peso destes é depois subtraído automaticamente ao peso total apurado:
- coloque primeiro o objecto a tarar na balança.
- Depois prima a tecla **TARE**. A indicação da balança volta ao "0", sendo possível iniciar uma nova pesagem.

Nota: os lactentes muito agitados podem prejudicar a precisão da medição da diferença.

- A balança pode ser desligada accionando a tecla **START**.

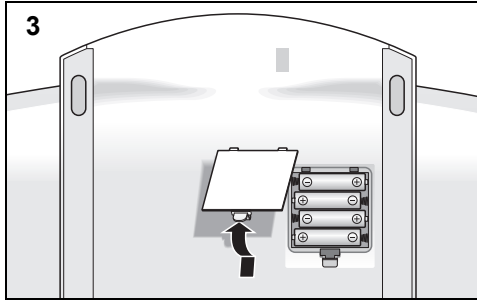

Utilização da função de indicação diferencial

- Após a pesagem, prima a tecla **STO**, até que seja exibida a indicação **-> M** e se ouça o sinal acústico. O peso foi agora memorizado e permanece guardado depois de desligada a balança.
- Na próxima pesagem, premindo brevemente a tecla **STO**, é possível passar para a indicação diferencial,


ou seja, a indicação do valor actual já com o valor memorizado subtraído. Esta função permite determinar p. ex. a quantidade de leite absorvida durante uma mamada ou o aumento de peso do lactente desde a última pesagem.

Desligamento automático/modo econômico

A balança fica operacional aprox. após 20 segundos. Se tiver sido efectuada uma pesagem, o valor permanece indicado durante aprox. 2 minutos, até que a balança se desligue automaticamente.

Mudar a unidade de peso

A indicação do peso pode ser comutada entre quilogramas (kg) e libras (lbs); onças (lbs:oz) e décimas de libras (lbs) através da tecla **kg / lbs**.

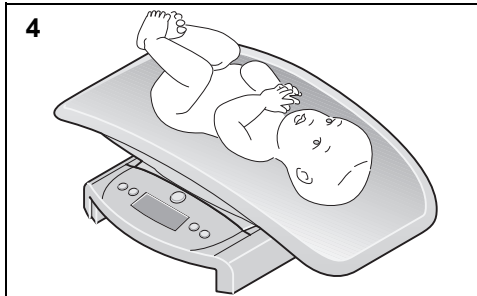

Limpeza

Limpe o prato de pesagem e a carcaça conforme necessário com um produto de limpeza ou um desinfectante convencionais. Respeite as instruções do fabricante. Nunca limpe com produtos abrasivos ou cáusticos, álcool, benzina ou semelhantes.

O que fazer quando ...

... não aparece a indicação do peso?

- Verifique as pilhas.

... aparece a indicação "bAtt"?

- As pilhas estão descarregadas. Substitua-as por pilhas novas.

... aparece a indicação "5LOP"?

- Foi excedida a carga máxima. Retire o mais rapidamente possível o peso para evitar danos permanentes na balança.

Eliminação das baterias

Não deite fora as pilhas usadas junto com o lixo doméstico. Use os pontos de recolha colocados à disposição para esse fim. Da próxima vez que comprar pilhas, prefira as mais ecológicas sem mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb).

Dados técnicos

seca 354 « lena »

Carga máxima:	20 kg / 44 lbs
Divisão mínima:	0,005 kg < 10 kg > 0,01 kg 0.2 oz < 22 lbs > 0.5 oz 0.01 lbs < 22 lbs > 0.02 lbs
Exatidão:	±20 g / ±0,4%
Tamanho dos dígitos:	22 mm
Dimensões (L x A x P):	550 x 165 x 330 mm
Peso próprio:	aprox. 2,5 kg
Faixa de temperatura:	+10°C a +40°C
Pilhas:	4 x tipo Mignon AA (1,5V)

Garantia

A garantia para falhas decorrentes de defeito do material ou de fabrico é de dois anos, a partir da data do fornecimento. Excluem-se todas as partes móveis, como sejam pilhas, cabos, alimentadores, acumuladores, etc.. As falhas abrangidas pela garantia serão corrigidas gratuitamente mediante a apresentação do talão de compra. Não serão tidas em conta outras reclamações. Os custos de transporte de e para as instalações do cliente, caso se aplique, ficará a cargo do cliente. No caso de danos de transporte, a garantia só se aplica se tiver sido utilizada a

embalagem original completa para acondicionar a balança, de forma bem imobilizada e fixa, tal como se encontrava originalmente. Por este motivo, guarde todos os componentes da embalagem.

A garantia cessa se o aparelho tiver sido aberto por pessoas não expressamente autorizadas, pela seca, para o efeito.

Solicitamos aos nossos clientes de fora da Alemanha que, caso tenham direito à garantia, se dirijam directamente ao revendedor do país onde se encontram.

