


seca 677

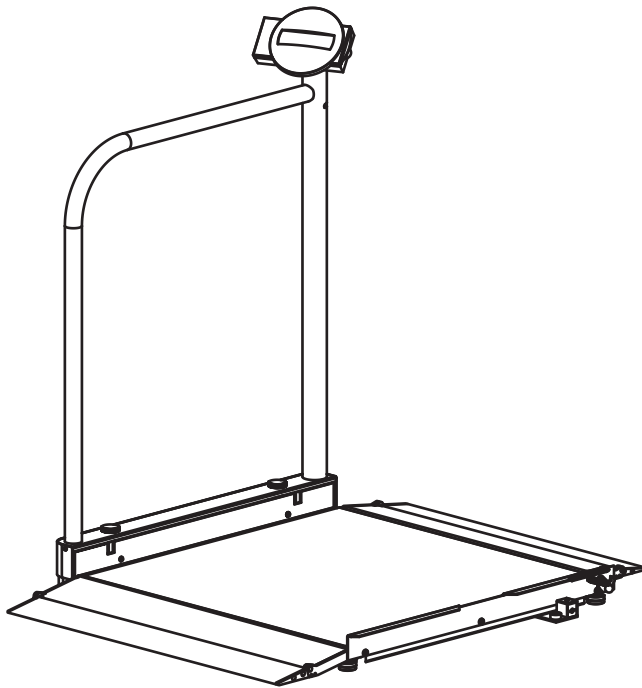

目次

1. 装置についての説明	4
1.1 用途	4
1.2 機能の説明	4
1.3 使用者に求められる資格	4
組み立て	4
操作	5
2. 安全に関する情報	5
2.1 この取扱説明書での安全上 のご注意	5
2.2 基本的な安全上のご注意	6
装置の取り扱い	6
感電の回避	7
感染の回避	8
負傷の回避	8
装置損傷の回避	8
測定結果の取り扱い	9
梱包材の取り扱い	10
3. 概観	11
3.1 操作部	11
3.2 ディスプレイのアイコン	12
3.3 装置および型番プレートに 記されているマーク	13
3.4 梱包材に表記されているマ ーク	14
3.5 メニュー構造	15
4. ご使用になる前に	16
4.1 納品物	16
4.2 装置を組み立てる	17
レールを立てる	17
ディスプレイ筐体を 取り付け	18
最終作業	18
4.3 電源を供給する	18
AC アダプターを接続する	18
5. 操作	19
5.1 体重計を作動できる状態に する	19
体重計を移動する	19
体重計を調整する	20
ディスプレイ筐体を 回転させる	20
5.2 体重を測定する	21
体重計の電源を オンにする	21
体重測定を開始する	21
風袋重量を差し引く (TARE)	21
測定結果を表示し 続ける (HOLD)	22
体格指数を算出・ 評価する (BMI)	23
BMI を自動的に算出し、 印刷する	24
測定結果をワイヤレス 受信装置に送信する	25
自動体重測定領域切替	25
体重計をオフにする	25
5.3 その他の機能 (メニュー)	26
メニュー内を移動する	26
保存した値を自動的に 削除する (AClr)	27
風袋重量を保存した ままにする (Pt)	27
自動保持機能を オンにする (Ahold)	29
シグナル音をオンにする (BEEP)	29
減衰を設定する (Fil)	30
工場出荷時の設定に戻す (RESET)	30
6. ワイヤレスネットワーク seca 360° wireless	31
6.1 はじめに	31
seca ワイヤレスグループ	31
チャンネル	32
装置の認識	32
6.2 ワイヤレスグループ内の体 重計の使用 (メニュー)	33
ワイヤレスモジュールをオ ンにする (SYS)	33
ワイヤレスグループを設定 する (Lrn (記憶させる))	33
自動送信をオンにする (ASend (自動送信))	35

印刷オプション (APrt (自動印刷)) を選ぶ	36	10.1 メンテナンスおよび再検定 についての情報	41
時刻を設定する (Time (時刻))	36	10.2 度量衡メーター内容を検証 する	42
7. 衛生管理	37	11. 技術データ	43
7.1 清掃	38	11.1 一般的な技術データ	43
7.2 消毒	38	11.2 重量測定データ	44
7.3 滅菌	38	12. オプションの付属品	44
8. 機能点検	38	13. 交換部品	45
9. こんなときはどうする?	39	14. 廃棄処分について	45
10. メンテナンス / 再検定	41	15. 保証	46

1. 装置についての説明

1.1 用途

このデジタル台はかり **seca 677** は、各国の規定に準拠した上で、主に病院、クリニック、老人福祉介護施設で使用されています。

この体重計は、従来の体重測定や全般的栄養状態の把握に対して使用でき、また担当の医師が診断を下し、あるいは治療法を決定するのを支援します。

ただし正確な診断を下すには、体重測定以外にも担当医師が適切なその他の検査を手配し、その結果を考慮する必要があります。

1.2 機能の説明

多機能電子体重計 **seca 677** は、4つのロードセルで体重を検知します。**seca 677** は、通常の体重測定だけでなく、体格指数 (Body-Mass-Index (BMI)) を算出する機能も備えています。キーボードで身長を入力すると、体重値に見合った体格指数 (Body-Mass-Index (BMI)) が自動的に算定されます。**seca 360° wireless** システムの身長計は、身長を **seca 677** へワイヤレスで送信することができます。

測定結果は、ワイヤレスネットワーク **seca 360° wireless** を通じて **seca** ワイヤレスプリンターや **seca** USB ワイヤレスアダプターに、また互換性のある **seca** PC ソフトウェア搭載のパソコンにワイヤレスで送信されます。

seca 677 は、キャスターで移動させることができます。

本体重量計は、4 ページ「用途」に明記されている目的にのみご使用ください。

1.3 使用者に求められる資格

組み立て

製品の組み立てに関しては、必ず十分な知識を有する人物（例えば専門業者、病院の技術者または **seca** サービス）が組み立てるようにしてください。

操作 この製品の操作は、必ず医療関係の専門家が行ってください。

2. 安全に関する情報

2.1 この取扱説明書での安全上のご注意



危険！

危険な状況が甚大であることを表示しています。この注意を無視した場合、重大で取り返しのつかない事故あるいは死傷事故につながります。



警告！

危険な状況が甚大であることを表示しています。この注意を無視した場合、重大で取り返しのつかない事故あるいは死傷事故につながることがあります。



注意！

危険な状況を示します。この注意を無視した場合、軽度から中程度の負傷事故につながる可能性があります。

気をつけて！

製品の操作を誤っている可能性があることを表示します。この注意事項を無視した場合、製品の損傷や誤った測定結果につながる可能性があります。

注意事項

この製品の使用に関する追加的な情報を含んでいます。

2.2 基本的な安全上のご注意

- 装置の取り扱い**
- ▶ 取扱説明書に記載されている注意事項を守ってください。
 - ▶ 取扱説明書は大切に保管してください。本取扱説明書は製品の一部であり、常時参照できる状態にしておいてください。



危険！ 爆発の危険

この製品は、以下のガスが充満する環境に設置しないでください。

- ▶ 酸素
- ▶ 可燃性の麻酔ガス
- ▶ その他の発火するおそれのある物質 / 混合気



注意！ 患者の身に危険、製品の破損

- ▶ 電子医療機器と接続する追加製品は、適切な IEC または ISO 規格（例えば電算処理機器には IEC 60950）に準拠していることが証明されているものでなければなりません。その他、設定はすべて、医療システム用の規格要件を満たしている必要があります（IEC 60601-1-1 または IEC 60601-1 第 3 版第 16 章を参照）。電子医療機器に追加製品を接続する方は、システム設定者であり、システムがそのシステムに対する規格要件に一致していることに責任を負います。ただし各地域の法律は、上に挙げた規格要件よりも優先されることを指摘しておきます。ご不明の点がありましたら、現地の専門業者か技術サービスにご連絡ください。
- ▶ 本文書の該当する節に説明されているように、定期的にメンテナンスと再検定をご依頼ください。
- ▶ 本文書の該当する節に説明されているように、定期的にメンテナンスをご依頼ください。
- ▶ 製品における技術的な変更は許可されていません。本製品には、使用者様がご自分でメンテナンスを行う部品は含まれていません。メンテナンスおよび修理は、必ず正規の seca サービス担当者にご依頼ください。

最寄のサービス担当者は、www.seca.comでお探してください。あるいは info@seca.co.jp にメールしてください。

- ▶ 必ず seca の純正部品と、同じく純正の交換部品をご使用ください。その他のものを使用した場合には保証が適用されません。



注意！

患者の身に危険、誤作動

- ▶ 誤測定や無線転送時の障害を避けるために、高周波機器といった電子医療機器とは、最低でも約 1 メートルの距離をあけてください。
- ▶ 誤測定や無線転送時の障害を避けるために、携帯電話といった HF（短波）機器とは、最低でも 1 メートルの距離をあけてください。
- ▶ HF 機器の実際の送信能力によって、最低でも 1 m を超える距離が必要な場合があります。詳細は www.seca.com をご覧ください。

感電の回避



**警告！
感電**

- ▶ AC アダプターを使用する製品は、電源コンセントへ容易にアクセスできるように、かつ電源の遮断をすぐに実行できるように設置してください。
- ▶ お住まいの地域の電源供給が AC アダプターの記載と一致していることを確認してください。
- ▶ AC アダプターに濡れた手で触れることは、かたく禁じます。
- ▶ 延長コードやマルチコンセントタップは使用しないでください。
- ▶ ケーブルが押しつぶされたり、あるいは鋭い角で損傷しないよう注意してください。
- ▶ ケーブルが、熱を持った物体に接触しないよう注意してください。
- ▶ この製品は、海拔 3000 m よりも高いところで使用しないでください。

感染の回避



警告！ 感染の危険

- ▶ この製品は、本文書の該当する節で説明したように、定期的に衛生管理を行ってください。
- ▶ 患者が感染性の疾患にかかっていないことを確認してください。
- ▶ この製品に接触する可能性のある、患者の身体部分に口のあいた傷や伝染性の皮膚の変容がないことを確認してください。

負傷の回避



警告！ 転落による負傷

- ▶ 装置がしっかりかつ水平に設置されていることを確認してください。
- ▶ 接続ケーブル（ある場合）は、使用者と患者が足を引っかけてつまずかないように敷設します。
- ▶ 本装置は、起立補助具としては設計されていません。体が思うように動かない人が車椅子から立ちあがる際などに、身体を支えてあげてください。
- ▶ 患者が計量台の角に直接乗り降りしないことを確認してください。
- ▶ 患者がゆっくりと確実に計量台に乗り降りするようにしてください。



警告！ 足を滑らせる危険

- ▶ 患者が計量台に載る前に、計量台が乾いていることを確認してください。
- ▶ 患者が計量台に載る前に、患者の足が濡れていないことを確認してください。
- ▶ 患者がゆっくりと確実に計量台に乗り降りするようにしてください。

装置損傷の回避

気をつけて！ 装置の破損

- ▶ 液体が装置の内部に入らないように注意してください。液体が入ると電子機器が壊れることがあります。
- ▶ AC アダプターをコンセントから抜く前に、装置の電源をオフにしてください。

- ▶ 装置を長期間にわたって使用しないときには、電源装置をコンセントから抜いておきます。そうしないと装置には電流が流れ続けます。
- ▶ 装置を落とさないでください。
- ▶ この装置に衝撃や振動を与えないでください。
- ▶ この文書の該当する節で説明したように、定期的に機能点検を実施してください。正常に機能しない、または損傷している状態でこの装置を使用することは許されません。
- ▶ この装置は直射日光にさらさないでください。また熱源のすぐ近くに置かないでください。温度が高すぎると電子機器が壊れることがあります。
- ▶ 急な温度変化も避けてください。この装置を移送し、環境の気温変化が 20 °C を上回る場合には、スイッチを入れるまで最低 2 時間は装置を新しい環境になじませてください。そうしないと結露が生じ、それが電子機器を壊すことがあります。
- ▶ 必ずアクリルガラスおよびその他のデリケートな表面に適した、塩素およびアルコールを含まない消毒液を使用してください（作用物質：第四級アンモニウム化合物など）。
- ▶ クレンザーや刺激性のクリーナーは使用しないでください。
- ▶ 有機溶剤（アルコールやベンジンなど）は使用しないでください。

測定結果の取り扱い



警告！

患者の身に危険

この製品は、診断用機器ではありません。この製品は、担当の医師が診断を下すのを支援します。

- ▶ 正確な診断を下し、治療開始するには、この製品を使用する他に、担当の医師は適切な検査を指示し、その結果に配慮する必要があります。
- ▶ 診断とそこから導き出される治療の責任は、担当する医師が負います。

気をつけて！

整合性を欠いた測定結果

- ▶ この製品による測定値を保存、再利用（例えば、seca PC ソフトウェアや病院内情報システムでの利用）する前に、その測定値が妥当なものであることを確認してください。
- ▶ 測定値が seca PC ソフトウェアへ、または病院内情報システムへ転送される場合、それを再利用する前に、その測定値が妥当なもので、本当に対象としている患者のものであることを確認してください。

梱包材の取り扱い



警告！

窒息の危険

プラスチックフィルム製の梱包材（ビニール袋）には、窒息を引き起こす危険があります。


- ▶ 梱包材は、子供の手が届かないように保管してください。
- ▶ 本来の梱包材がなくなっている場合、窒息の危険を低下させるために、使用するビニール袋には必ず安全のための穴をあけてください。なるべく再利用できる材料をご使用ください。

注意事項

製品納品時に使用されていた梱包剤は、後でできるように保管しておいてください（例えば、メンテナンスのための返送のため）。

3. 概観

3.1 操作部

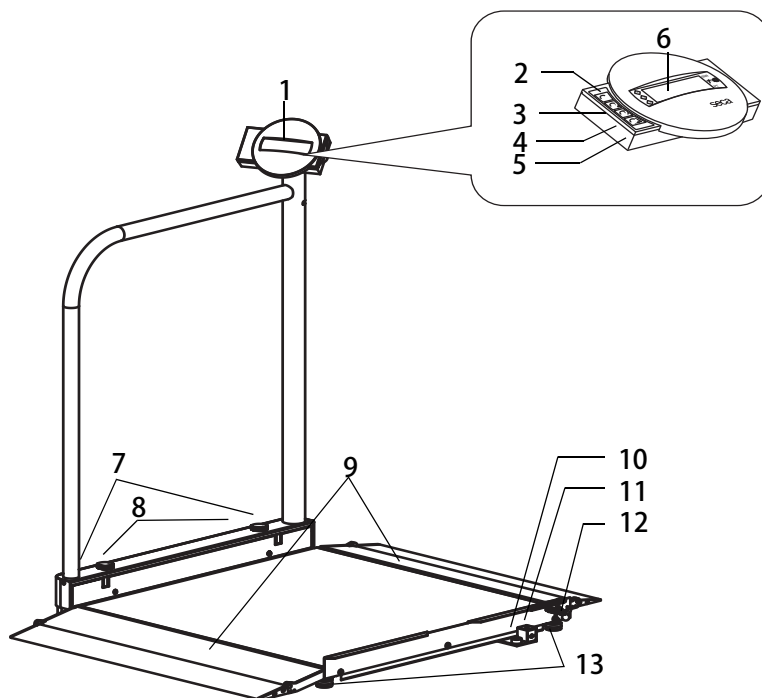

No.	操作部	機能
1	ディスプレイ筐体	左右に向きを 180° 変えられるセントラル操作 / 表示部
2		体重計のオン / オフ
3		矢印ボタン ・ 体重測定中： - 短く押す：保持機能をオンにする - 長く押す：風袋引き機能をオンにする ・ メニュー内： - サブメニューを選択する、メニュー項目を選択する - 値を大きくする

No.	操作部	機能
4		矢印ボタン ・ 体重測定中： - 短く押す：BMI 機能をオンにする - 長く押す：メニューを呼び出す ・ メニュー内： - サブメニューを選択する、メニュー項目を選択する - 値を小さくする
5		エンターボタン ・ 体重測定中（ワイヤレスネットワークが設定されている場合）： - 短く押す：測定結果を受信可能な装置（USB ワイヤレスアダプター搭載のパソコン）に送信する - 長く押す：測定結果を印刷する（ワイヤレスプリンター） ・ メニュー内： - 選択したメニュー項目を確定する - 設定した値を保存する
6	ディスプレイ	測定結果および装置の設定のための表示部
7	移動用 キャスター	これらのキャスターで体重計を移動できる
8	固定ねじ	ハンドレールを起こした状態で固定するために使用する
9	スロープ	・ 上げ起こし式 ・ 車椅子を体重計に上がりやすくする
10	水準器	本装置が水平に設置されているか表示する
11	AC アダプター コネクター	同梱の AC アダプターの接続に使用する
12	ロック	輸送中にハンドレールを倒した状態で固定する
13	脚部調整ねじ	4 個、正確に位置調整するために使用する


3.2 ディスプレイのアイコン



	アイコン	意味
A		AC アダプターによる運転
B		検定不能機能がオンになっている
C		現在使用中のメモリ

	アイコン	意味
D		現在使用中の体重測定範囲 (43 ページ「技術データ」を参照)

3.3 装置および型番プレートに記されているマーク

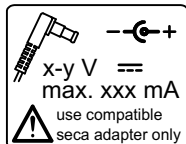
テキスト / 表示マーク	意味
Mod	モデル番号
S/N	シリアル番号
ProdID	製品識別番号
	取扱説明書に留意
	電子医療機器（タイプ B）（ヨーロッパ内）
	保護絶縁された装置、保護クラス II（ヨーロッパ内）
e	体重計の評価や検定に使用される質量値
d	二つの連続する表示値の差異を示す質量値
	有効な測定領域
	指令 2014/31/EU に準じて検定 クラス III（ヨーロッパ内に限定） 精度等級 3 級（日本国内に限定）
	特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に適合。 認証番号：202WW09118012
	電源接続ポートの型番プレート • x-y V 必要な供給電圧 • max xxx mA 最大電力消費 •  電源プラグの極性に注意 •  装置は直流電流のみを使用
	装置を家庭ゴミとして廃棄しないこと

3.4 梱包材に表記されているマーク

	水から保護すること
	必ず製品の箱を矢印の向きが上になるようにする 直立状態で輸送・保管を行うこと
	取扱注意 投げたり落としたりしないこと
	輸送・保管時の最小 / 最大許可温度
	輸送・保管時の最小 / 最大許可湿度
	ここで梱包材を開きます
	梱包材はリサイクルプログラムで廃棄可能


3.5 メニュー構造

この装置のメニューでは、その他の機能もご使用いただけます。そのため、本装置をご利用条件に最もよく合うように設定できます（詳細は 26 ページ以降を参照）。

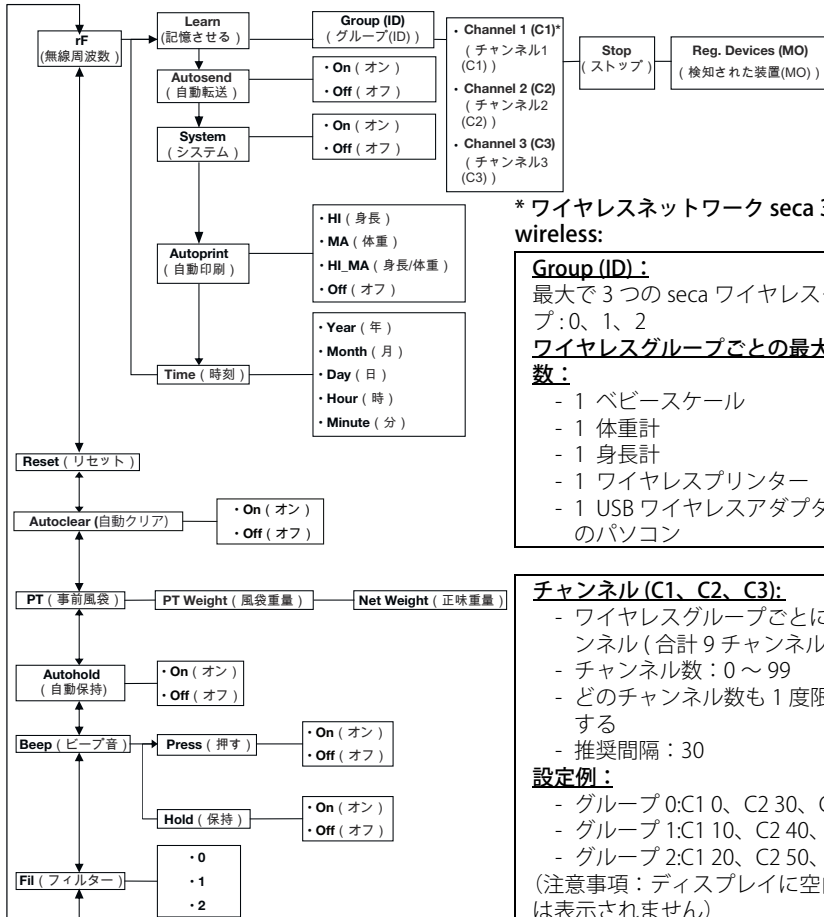

ナビゲーション:

メニューを呼び出す:

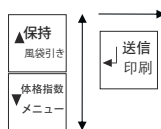


検知される装置 (Mo):

- 1: 体重計
- 2: 身長計
- 3: ワイヤレスプリンター
- 4: USB ワイヤレスアダプター搭載のパソコン
- 7: ベビースケール

4. ご使用になる前に …


4.1 納品物

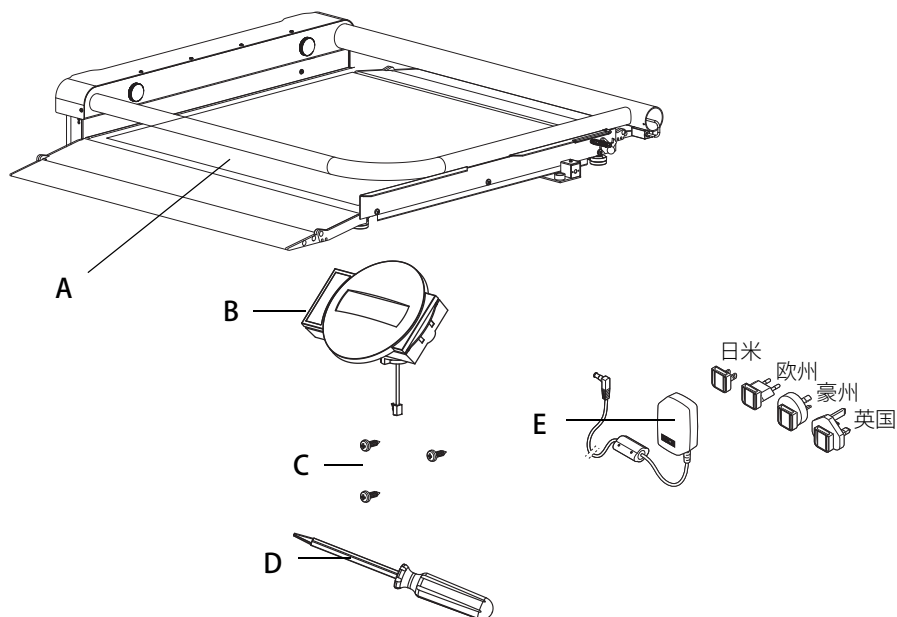

No.	構成部品	個数
A	折り畳みレール付き体重計	1
B	接続ケーブル付きディスプレイ筐体	1
C	なべタッピンねじ B 3.5 x 9.5	3
D	ドライバー	1
E	アダプター付き AC アダプター (モデルごとに異なる：ユーロプラグ付き AC アダプター)	1
	取扱説明書 (図なし)	1

4.2 装置を組み立てる


レールを立てる

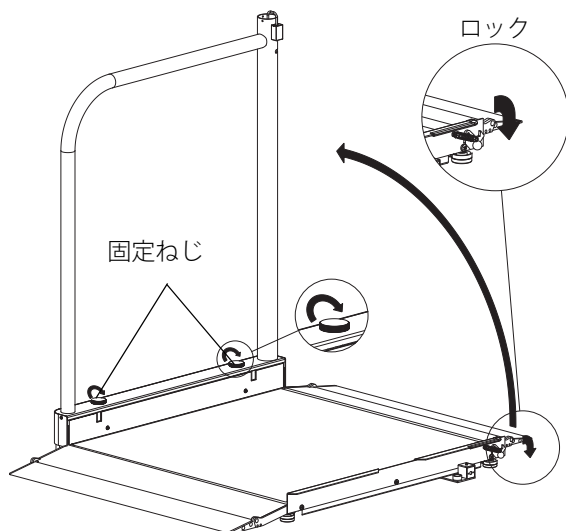

1. 体重計は安定した平坦な面に置いてください。
2. ハンドレールのねじを緩めます。
3. ハンドレールを起こし、この位置で保持します。
4. ハンドレールが、遊びなくしっかり直立するまで、両固定ねじを締め付けます。

ディスプレイ筐体を取り付ける

1. モニターケーブルをハンドレールの留め具から取り外します。
2. ハンドレール内のモニターケーブルをディスプレイ筐体のケーブルに接続します。

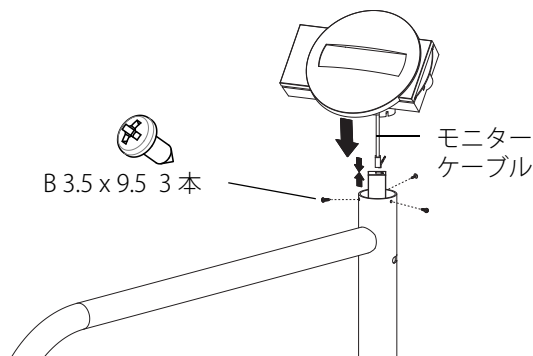

3. ケーブルを慎重にハンドレールに押し入れます。
4. ディスプレイ筐体をハンドレールにセットします。
5. ディスプレイ筐体の穴とハンドレールの穴が、重なり合っていることを確認してください。
6. ディスプレイ筐体をハンドレールにねじで締め付けます。

最終作業

1. すべての部品が正しく取り付けられていることを確認してください。
2. すべてのねじが締め付けられていることを確認してください。

4.3 電源を供給する

体重計への電力供給は、AC アダプターで行います。

AC アダプターを接続する





警告！

正規品ではない AC アダプターによる人の負傷および装置の破損

市販の AC アダプターは、本製品に指定されている電圧より高い電圧を供給することがあります。体重計がオーバーヒートし、出火し、溶解、ショートすることがあります。

- ▶ 制御された12ボルトの電圧を供給するsecaの正規 AC アダプターのみをご利用ください。

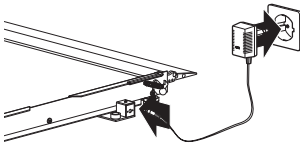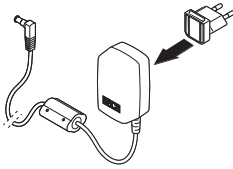

1. 必要に応じて、電力供給に必要な電源プラグをACアダプターに差し込んでください。
2. ACアダプターの電源プラグを体重計の接続ジャックに差し込みます。
3. ACアダプターを電源コンセントに差し込みます。
4. 38 ページ「機能点検」の章に記載されている手順で、機能点検を行ってください。

5. 操作


注意！

人身傷害

装置の使用前には、必ず 38 ページ「機能点検」の章の説明に従って機能点検を行ってください。

5.1 体重計を作動できる状態にする

体重計を移動する

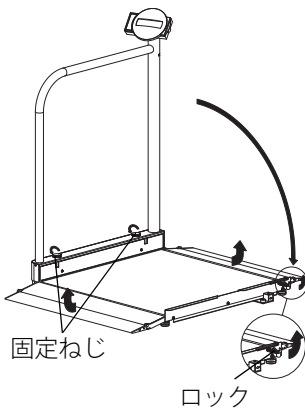

1. ACアダプターのプラグを電源コンセントから抜き取ります。
2. ACアダプターのプラグを体重計の接続ジャックから抜き取ります。
3. 固定ねじを緩め、ハンドレールが完全に平らになるまで慎重に倒します。
4. ロックがハンドレールにしっかり噛み合うまで、ロックを起こします。
5. スロープを格納します。
6. 装置を慎重にハンドレール上に立てて置きます。
7. この状態で、装置を目的の設置場所または保管場所へ移動します。

体重計を調整する



気をつけて！

フォースシャントによる誤測定

体重計が筐体と共に タオルなどの上に乗っていると、体重を正しく測定することができません。

▶ 体重計の脚部調整ねじだけが床と接触するように体重計を設置してください。

1. 体重計は堅い平面上に設置するようにしてください。
2. サムホイールを緩めます。
3. 脚部調整ねじを回して、装置の位置を調整します。

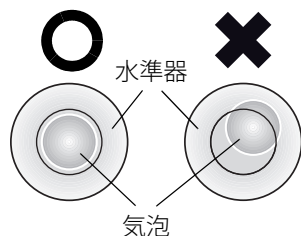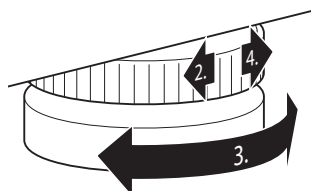


水準器の気泡が正確に円の中央に来るように調整してください。

4. サムホイールを矢印方向に回して締めます。
脚部調整ねじは、位置ずれを防止するよう設計されています。

ディスプレイ筐体を 回転させる

本装置のディスプレイ筐体は、向きを変えることができます。そのため、どんな使用状況でも最適に位置調整できます。

▶ ディスプレイ筐体を、操作しやすく、また読み取りやすいよう向きを変えてください。

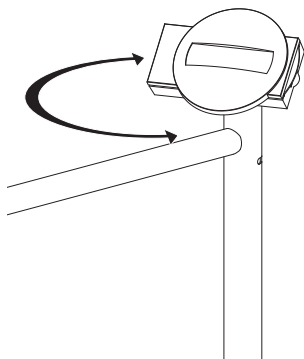

5.2 体重を測定する



注意！

患者が転倒して負傷する危険

体が思うように動かない人は、体重計への乗り降りの際や体重計に座る際に転倒することがあります。

- ▶ 体が思うように動かない人が体重計へ乗り降りするときおよび着座 / 起立する際は、身体を支えてあげてください。

体重計の電源を オンにする



- ▶ スタートボタンを押します。
ディスプレイのすべての操作部が一瞬表示された後、ディスプレイに **SECA** と表示されます。
ディスプレイに **0.0** が表示されたら、体重計は作動可能になっています。

体重測定を開始する

1. 体重計に負荷がかかっていないことを確認してください。
2. 患者に体重計に乗ってもらいます。
3. 患者に静かに立ってもらいます。
4. 測定結果を読み取ります。



風袋重量を差し引く (TARE)

風袋引き (TARE) 機能を使って、風袋重量（例えば、計量面に敷くタオルや敷物）が体重測定結果に影響を与えるのを回避することができます。

気をつけて！

フォースシャントによる誤測定

大きなタオルなどの風袋重量が、体重計を設置した床面に触れていると、体重を正しく測定することができません。

- ▶ 風袋重量が体重計の計量台にのみかかっていることを確認してください。

1. 体重計の電源をオンにします。
2. 風袋重量を体重計の上に載せます。
3. 矢印ボタン（保持 / 風袋引き）を、「NET」というメッセージがディスプレイに表示されるまで押し続けます。





4. その表示が点滅しなくなり、代わりに **0.0** が表示するまで待ちます。
5. 患者の体重を「体重測定を開始する」の手順に従って計量します。
6. 測定結果を読み取ります。
風袋重量が自動的に差し引かれています。
7. 風袋引き (TARE) 機能をオフにするには、矢印ボタン (保持 / 風袋引き) を「NET」というメッセージが表示されなくなるまで押すか、または体重計の電源をオフにします。

注意事項

最大表示可能体重は、すでに載っている物の重さだけ差し引かれます。

測定結果を表示し続ける (HOLD)



保持 (HOLD) 機能をオンにすると、体重値は体重計に重さがかからなくなっても表示され続けます。そのため、まだ体重値を記録していなくても患者のケアをすることができます。

1. 体重計に負荷がかかっていないことを確認してください。
2. 体重計の電源をオンにします。
3. 患者の体重を「体重測定を開始する」の手順に従って計量します。
4. 矢印ボタン (保持 / 風袋引き) を短く押します。






表示は、測定されている体重が安定するまで点滅します。安定すると体重値が表示されたままになります。△ アイコン (検定不能機能) および「HOLD」というメッセージが表示されます。

5. 保持 (HOLD) 機能をオフにするには、矢印ボタン (保持 / 風袋引き) を短く押します。
△ アイコンおよび「HOLD」というメッセージが表示されなくなります。

注意事項

自動保持機能がオンになっていると、体重計の電源がオフになるか、または電源をオフにするまで、体重値が自動的に常時表示され続けます (29 ページ「自動保持機能を オンにする (Ahold)」を参照)。

体格指数を算出・ 評価する (BMI)

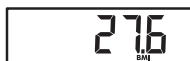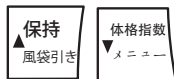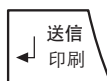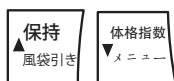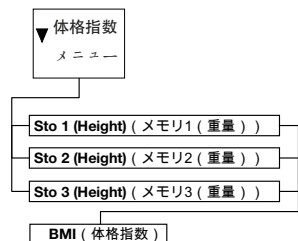

体格指数は、身長と体重の相互関係を表します。そのため、ブローカ指数に基づく理想体重などよりも、正確なデータを得ることができます。健康的に最適とみなされる許容範囲が表示されます。

本装置では、身長に関して3つのメモリが用意されています。これらのメモリに、特定の患者の身長を入力し記録することができます。あるいは複数の開始値を保存し、患者の実際の身長をより迅速に設定することもできます。

1. 体重計に負荷がかかっていないことを確認してください。
2. 体重計の電源をオンにします。
3. 矢印ボタン (**体格指数 / メニュー**) を短く押します。
「BMI」というメッセージが表示されます。
最後に使用したメモリが表示されます (この場合：メモリ 2)。
4. 表示されたメモリを使用したり、矢印ボタンで別のメモリを選択することができます。

5. エンターボタン (**送信 / 印刷**) で、選択した設定を確定します。
ディスプレイに矢印が点滅します。

選択されたメモリに最後に保存された身長が表示されます。


6. 表示された身長を受け入れるか、または矢印ボタンを使って他の身長を設定することができます。

7. エンターボタン (**送信 / 印刷**) で、選択した設定を確定します。
入力された身長が保存され、次回の BMI 算出用に再利用できます。

注意事項

BMI の再算出用に身長を再び呼び出せるよう、そのメモリを書き留めておいてください。

8. 患者の体重を「体重測定を開始する」の手順に従って計量します。
患者の BMI が自動的に算出・表示されます。
9. BMI を読み取り、その値をさらに下に表示されるカテゴリと比較します。

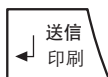

10. BMI 機能をオフにするには、エンターボタン（送信 / 印刷）を短く押します。

BMI	評価
18.5 未満	患者の体重は軽すぎます。食欲不振の傾向があるかもしれません。健康と体力を増進するために、体重を増やすことが推奨されます。よく分からない場合は、専門医に相談してください。
18.5 ～ 24.9	患者は標準的な体重です。
25 ～ 30（前肥満）	患者は、軽度から中度の肥満です。すでに罹患している病気（例えば糖尿病、高血圧、痛風、脂質代謝異常）がある場合は、体重を減らすべきです。
30 超	早急な減量が必要です。代謝、循環、骨格に負担がかかっています。継続的な食餌療法、多くの運動、行動トレーニングが推奨されます。よく分からない場合は、専門医に相談してください。

BMI を自動的に算出し、印刷する

この体重計を **seca 360° wireless** システムのワイヤレスプリンターおよび身長計と共に使用すると、BMI を自動的に算出し、印刷することができます。

注意事項

この機能を使用するためには、装置が 1 つのワイヤレスグループに共に登録されていることが前提条件になります（31 ページ「ワイヤレスネットワーク seca 360° wireless」を参照）。

- 身長を測定します。
- 身長計のエンターボタン（**送信 / 印刷**）を短く押します。
測定値がワイヤレスプリンターに送信されます。
ただし印刷はされません。
- 体重を測定します。
- 体重計のエンターボタン（**送信 / 印刷**）を長く押します。
測定値がワイヤレスプリンターに送信されます。
BMI が算出されます。
身長、体重、BMI が印刷されます。

測定結果をワイヤレス 受信装置に送信する



体重計が **seca 360° wireless** ワイヤレスネットワークに組み込まれていると、ボタンを押して測定結果を受信可能な装置（例えば、ワイヤレスプリンターやUSB ワイヤレスアダプター搭載のパソコン）に送信することができます。

- ▶ エンターボタン（**送信 / 印刷**）を押します。
 - ボタンを短く押す：測定結果を受信可能なすべての装置に送信する
 - ボタンを長く押す：測定結果をワイヤレスプリンターで印刷する

自動体重測定領域切替

この体重計では、2つの体重測定範囲を使用することができます。体重測定範囲1（→H←）では秤量が低く、体重表示部の目盛りが精緻に表示されます。体重測定範囲2（→H←）では、最大秤量を利用できません。

体重計の電源をオンにすると、体重測定範囲1がアクティブになります。特定の体重値を超えると、体重計が自動的に体重測定範囲2に切り替わります。

体重測定範囲1に再度戻すには、次の手順に従ってください：

- ▶ 体重計からすべての物を取り除きます。
体重測定範囲1が再びアクティブになります。


体重計をオフにする



- ▶ スタートボタンを押します。

5.3 その他の機能（メニュー）

この体重計のメニューでは、その他の機能もご使用いただけます。そのため、体重計をご利用条件に最もよく合うように設定できます。

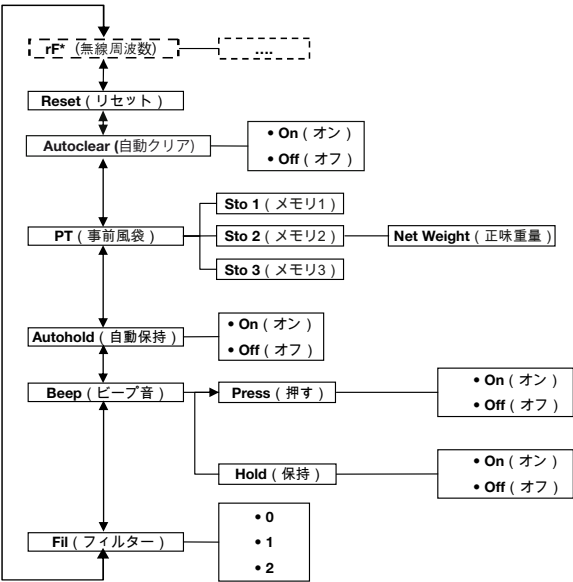

*メニュー項目「rF」の説明については、33 ページ「ワイヤレスグループ内の体重計の使用（メニュー）」をご覧ください。

メニュー内を移動する

1. 体重計の電源をオンにします。
2. 矢印ボタン（**体格指数 / メニュー**）を、メニューが呼び出されるまで押し続けます。
最後に選択したメニュー項目がディスプレイに表示されます（この場合：自動保持「AHOLD」）。



3. 矢印ボタンを、目的のメニュー項目がディスプレイに表示されるまで数回押します（この場合：減衰「FIL」）。
4. エンターボタン（**送信 / 印刷**）で選択を確定します。
メニュー項目またはサブメニューの現在の設定が表示されます（この場合：レベル「0」）。



F IL 2



F IL 2

- 設定を変更したり、他のサブメニューを呼び出すには、目的の設定（この場合：レベル「2」）が表示されるまで矢印ボタンを数回押してください。
- エンターボタン（送信 / 印刷）で設定を確定します。メニューは自動的に終了します。
- その他の設定を行うには、メニューを再度呼び出し、すでに説明した方法で作業を進めます。

注意事項

約 24 秒間にわたってボタンが押されないと、メニューは自動的に終了します。

保存した値を自動的に削除する (AClr)

現在の測定結果が装置のメモリに残り、誤った体格指数算出が行われるのを防ぐために、測定結果が測定後 5 分後に自動削除されるよう体重計を設定することができます。

注意事項

モデルによっては、この機能が工場出荷時にオンになっているものがあります。ご希望に応じて、この機能をオフにすることができます。


AClr

On

- メニューの項目「AClr」を選択します。
- 選択を確定します。
- ご希望の設定を選択します：
 - On (オン)
 - Off (オフ)
- 選択を確定します。
メニューは自動的に終了します。

風袋重量を保存したままにする (Pt)

事前風袋機能を使うと、追加重量を保存しておき、測定結果から自動的に差し引くことができます。例えば靴や衣服の総重量を保存しておき、患者が靴や服を着たまま体重を測定し、そこから靴や衣服の総重量を差し引くことができます。

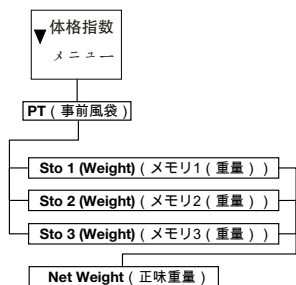

Pt

▼
◆ Sto 2

本装置では、重量値に関して3つのメモリが用意されています。重量値が測定結果から自動的に差し引かれるよう、複数の重量値を保存し、開始状況に応じて個別に呼び出すことができます。

1. メニューの項目「Pt」を選択します。
「Pt」というメッセージが表示されます。
2. 選択を確定します。
最後に使用したメモリが表示されます。
3. 表示されたメモリを使用したり、別のメモリを選択することができます。
4. 選択を確定します。
ディスプレイに矢印が点滅します。
選択されたメモリに保存されていた風袋重量が表示されます。
5. 保存されている値を使用したり、あるいは矢印ボタンを使って変更することができます。

注意事項

値「0」を入力すると、この機能はオフになります。「Pt」というメッセージがディスプレイに表示されなくなります。

Pt

6. 選択を確定します。
7. 患者に体重計の上に乗ってもらってください。
患者の体重が表示されます。
保存されている風袋重量が自動的に差し引かれています。
8. この機能をオフにするには、メニューで項目「Pt」を再度選択します。
9. 選択を確定します。
機能がオフになりました。
メニューは自動的に終了します。

注意事項

体重計の電源をオフにすると、この機能もオフになります。再び電源をオンにしても、「Pt」というメッセージはディスプレイに表示されません。

自動保持機能を オンにする (Ahold)

自動保持機能をオンにすると、体重測定を行ったときの測定結果は体重計に重さがかからなくなっても表示され続けます。そのため、体重測定を行うたびに保持機能を手動でオンにする必要がありません。

注意事項

モデルによっては、この機能が工場出荷時にオンになっていることがあります。ご希望に応じて、この機能をオフにすることができます。

AHOLD

On

1. メニューの項目「AHOLD」を選択します。
2. 選択を確定します。
現在の設定が表示されます。
3. ご希望の設定を選択します：
 - On (オン)
 - Off (オフ)
4. 選択を確定します。
メニューは自動的に終了します。

シグナル音をオンにする (BEEP)

このボタンを押すたびに、ならびに体重値が安定した時点で、シグナル音を鳴らすかどうか設定することができます。後者は、保持 / 自動保持の機能にとって重要です。

注意事項

「体重値が安定した時点でシグナル音を鳴らす」機能は、工場出荷時にオンになっています。ご希望に応じて、この機能はオフにすることができます。

bEEP

Press

On

1. メニューの項目「BEEP」を選択します。
2. 選択を確定します。
3. メニュー項目を1つ選択してください：
 - Press (押す)：ボタンを押すとシグナル音が鳴る
 - Hold (保持)：体重値が安定するとシグナル音が鳴る
4. 選択を確定します。
現在の設定が表示されます。
5. ご希望の設定を選択します：
 - On (オン)
 - Off (オフ)
6. 選択を確定します。
メニューは自動的に終了します。

- 2つ目の機能に関してもシグナル音をオンにした場合は、この手順を繰り返してください。

減衰を設定する (Fil)

F IL

F IL 0

F IL 2

減衰 (FIL = フィルター) によって、体重測定時のノイズ (例えば、患者の動きで生じるノイズ) を減らすことができます。

- メニューの項目「FIL」を選択します。
- 選択を確定します。

現在の設定が表示されます。

- 減衰レベルを選択します。
 - 0: 減衰なし
 - 1: 中程度の減衰
 - 2: 大きな減衰

- 選択を確定します。
メニューは自動的に終了します。

工場出荷時の設定に戻す (RESET)

以下の機能は、工場出荷時の設定に戻すことができます：

機能	工場出荷時の設定
自動保持 (Ahold)	モデルごとに異なる
シグナル音 (Press)	Off (オフ)
シグナル音 (Hold)	On (オン)
減衰 (Fil)	0
自動クリア (Aclear)	モデルごとに異なる
事前風袋 (Pt)	0 kg
体格指数 (Body Mass Index (BMI)) のための身長	170 cm
ワイヤレスモジュール (SYS)	Off (オフ)
自動送信 (ASend)	Off (オフ)
自動印刷 (APrt)	Off (オフ)

注意事項

工場出荷時の設定に戻すと、ワイヤレスモジュールはオフになります。既存のワイヤレスグループに関する情報は維持されます。ワイヤレスグループを新たに再設定する必要はありません。

rESet

- メニューの項目「rESet」を選択します。

2. 選択を確定します。
メニューは自動的に終了します。
3. 体重計の電源をオフにします。
工場出荷時の設定に戻ります。体重計の電源を再びオンにすれば、その設定を使用できるようになります。

6. ワイヤレスネットワーク SECA 360° WIRELESS


6.1 はじめに

この装置はワイヤレスモジュールを備えています。ワイヤレスモジュールがあれば、測定結果を評価、記録するためにそのデータをワイヤレスで送信することができます。データの送信は、以下に挙げる装置に対して可能です。

- seca ワイヤレスプリンター
- seca USB ワイヤレスアダプター付パソコン

seca ワイヤレスグループ

このワイヤレスネットワーク **seca 360° wireless** は、ワイヤレスグループとともに機能します。ワイヤレスグループとは、発信装置と受信装置のバーチャルグループです。同じタイプの複数の発信装置と受信装置を運用する場合、3つまでのワイヤレスグループ（0、1、2）を設定できます。

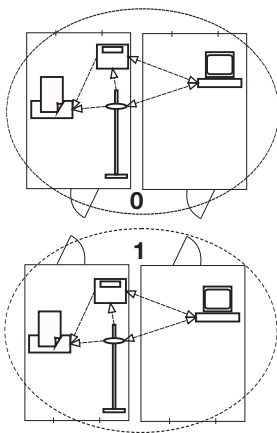


複数の検査室がそれぞれ同等の装置を備えて運用される場合、複数のワイヤレスグループを設定すれば、信頼できる方法で、かつ送信先を誤らずに測定値を送信することが可能になります。

発信装置と受信装置の最大間隔は約 10 m です。それぞれの場所の特定の条件、例えば壁の厚さや特性により、この到達距離は短くなることもあります。

ワイヤレスグループごとに、以下の装置のコンビネーションが可能になります。

- 1 乳児用体重計
- 1 体重計
- 1 身長計
- 1seca ワイヤレスプリンター
- 1 seca USB ワイヤレスアダプター付パソコン

チャンネル

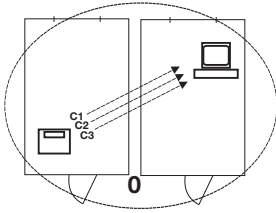

1 グループ内で、装置は3つのチャンネル（C1、C2、C3）で互いに通信します。それにより信頼でき、かつ支障のないデータ送信が可能になります。

この体重計でワイヤレスグループを設定すると、装置、最適なデータ送信を可能にする3つのチャンネルを提案します。提案されたチャンネル数を採用するようにお奨めします。

もっと多くのワイヤレスグループを設定したいときなどは、チャンネル数（0から99まで）をマニュアルで選択することもできます。

データ送信を支障なく行うには、チャンネルはお互いに十分に離してください。チャンネル数は30以上の間隔をあけることを推奨します。どのチャンネル数も1つのチャンネルに対してのみ使用することができます。

設定例 クリニック内で3つのワイヤレスグループを設定する際のチャンネル数

- ・ ワイヤレスグループ 0 C1=_0、C2=30、C3=60
- ・ ワイヤレスグループ 1 C1=10、C2=40、C3=70
- ・ ワイヤレスグループ 2 C1=20、C2=50、C3=80


装置の認識

この体重計でワイヤレスグループを設定すると、グループはその他のアクティブな装置を **seca 360° wireless** システムから探します。認識された装置は、この体重計のディスプレイにモジュール（例えば「MO 3」）として表示されます。その数値には以下の意味があります。

- ・ 1: 体重計
- ・ 2: 身長計
- ・ 3: ワイヤレスプリンター
- ・ 4: seca USB ワイヤレスアダプター付パソコン
- ・ 7: 乳児用体重計
- ・ 5、6 および 8～12: システム拡張のための予備

6.2 ワイヤレスグループ内の体重計の使用（メニュー）

この装置を seca ワイヤレスグループの中で使用するのに必要なすべての機能は、サブメニュー「rF（無線周波数）」で説明されています。メニュー設定のための情報は、26 ページに記載されています。

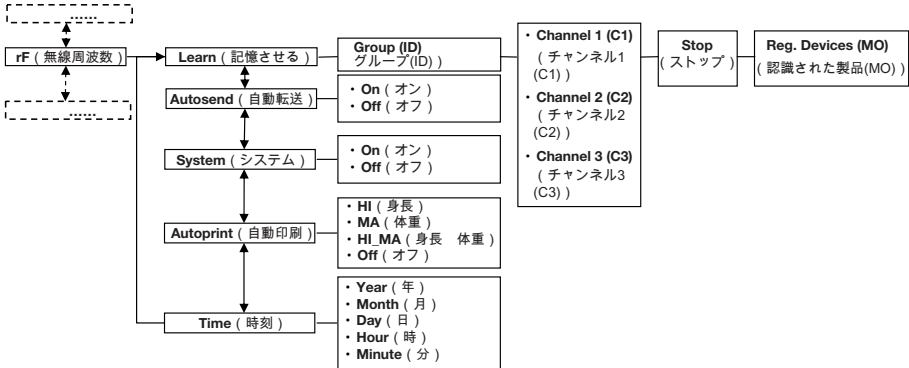

ワイヤレスモジュールを オンにする (SYS)

この装置はワイヤレスモジュールをオフにして納品されます。ワイヤレスグループを設定する前にそれをオンにしてください。

1. 装置をオンにします。
2. サブメニュー「rF（無線周波数）」でメニュー項目「SYS（システム）」を選択します。
3. その選択を確定してください。
4. 設定「On（オン）」を選択します。
5. その選択を確定してください。
メニューは自動的に終了します。

595

On

ワイヤレスグループを設定する (Lrn (記憶させる))

ワイヤレスグループを設定するには、次の手順で行ってください。

1. 装置をオンにします。
2. メニューを呼び出します。
3. メニューで項目「rF」を選択します。
4. その選択を確定してください。
5. サブメニュー「rF」でメニュー項目「Lrn（記憶させる）」を選択します。
6. その選択を確定してください。

rF

Lrn

ld 0

現在設定されているワイヤレスグループ（ここではワイヤレスグループ 0「ld 0」）が表示されます。

ld 1

ワイヤレスグループ「0」が既に存在する場合は、矢印ボタンで他の ID を選択してください（ここではワイヤレスグループ 1「ld 1」）。

C10

7. ワイヤレスグループの選択を確定してください。

装置は、チャンネル 1 のチャンネル数を提案します（ここでは「C10」）。

提案されたチャンネル数を受け入れるか、あるいは矢印ボタンを使って他のチャンネル数を設定します。

C230

8. チャンネル 1 に対する選択を確定してください。

装置は、チャンネル 2 のチャンネル数を提案します（ここでは「C230」）。

提案されたチャンネル数を受け入れるか、あるいは矢印ボタンを使って他のチャンネル数を設定します。

注意事項

二桁のチャンネル数の表記は、空きスペースなしで行います。「C230」という表示は、チャンネル「2」、チャンネル数「30」を意味しています。

C360

9. チャンネル 2 に対する選択を確定します。

装置は、チャンネル 3 のチャンネル数を提案します（ここでは「C360」）。

提案されたチャンネル数を受け入れるか、あるいは矢印ボタンを使って他のチャンネル数を設定します。

StOP

10. チャンネル 3 に対する選択を確定してください。

「StOP（ストップ）」というメッセージがディスプレイに表示されます。

装置は、電波が届く範囲にある他のワイヤレス通信装置からのシグナルを待ちます。

注意事項

装置の中には、それをワイヤレスグループに統合しようとする際に、スイッチをオンにするための特別な手続きを必要とするものがあります。それぞれの装置の取扱説明書に留意してください。

11. ワイヤレスグループに統合したい装置、例えばワイヤレスプリンターをオンにしてください。
ワイヤレスプリンターが認識されると、ピーという音が聞こえます。

注意事項

ワイヤレスプリンターがワイヤレスグループに統合されたら、続いて印刷オプションを選択し（メニュー \rF\APrt）、時刻を設定します（メニュー \rF\time）。

12. このステップ 11. を、このワイヤレスグループに統合しようとするすべての装置に対して繰り返してください。
13. エンターボタンを押してサーチ手続きを終了します。
14. 矢印ボタンを押して、どの装置が認識されたかを表示してください（ここでは「MO 3」）。
複数の装置をワイヤレスグループに統合したときには、矢印ボタンを複数回押し、すべての装置がこの体重計によって認識されていることを確認してください。
15. エンターボタンでメニューを終了させるか、メニューが自動的に終了するまで待ちます。

MO 3

自動送信をオンにする (ASend (自動送信))

測定結果を同じワイヤレスグループに登録されている、受信可能なすべての受信装置（例えばワイヤレスプリンター、USB ワイヤレスアダプター付パソコン）に自動的に送られるように、この装置を設定することができます。

注意事項

ワイヤレスプリンターを使用するときには、印刷オプションとして「Off」が設定されていないことを確認してください（36 ページ「印刷オプション（APrt（自動印刷））を選ぶ」を参照）。

1. 装置をオンにします。
2. サブメニュー「rF（無線周波数）」でメニュー項目「ASend（自動送信）」を選択し、その選択を確定します。
3. 設定「On（オン）」を選択し、その選択を確定します。
メニューは自動的に終了します。

ASend

On

印刷オプション (APrt (自動印刷)) を選ぶ

APrt

PA

測定結果をそのワイヤレスグループに登録されているワイヤレスプリンターで自動的に印刷できるように測定ステーションを設定することができます。

注意事項

この機能にアクセスできるのは、「Learn (記憶させる)」機能を通じて seca ワイヤレスプリンターがワイヤレスグループに統合された場合に限られます。

1. 装置をオンにします。
2. サブメニュー「rF (無線周波数)」でメニュー項目「APrt」を選択し、その選択を確定します。
3. 装置の組み合わせに該当する設定を選びます。
 - HI: 身長計の測定結果
 - MA: 体重計の測定結果
 - HI_MA: 身長計および体重計の測定結果
 - Off (オフ): 自動印刷なし、体重測定中はエンターボタンを長く押し続けると印刷しません。
4. 選択を確定してください。
メニューは自動的に終了します。

時刻を設定する (Time (時刻))

tIME

YEA 10

ワイヤレスプリンターが測定結果に自動で日付と時刻を追加するようにこのシステムを設定することができます。それには一度この装置で日付と時刻を設定し、ワイヤレスプリンターの内蔵時計にそのデータを送信する必要があります。

注意事項

この機能にアクセスできるのは、「Learn (記憶させる)」機能を通じて seca ワイヤレスプリンターがワイヤレスグループに統合された場合に限られます。

1. 装置をオンにします。
2. サブメニュー「rF (無線周波数)」でメニュー項目「tIME」を選択します。
3. その選択を確定してください。
現在の「年」(YEA) の設定が表示されます。
4. 正しい年数を設定してください。
5. その選択を確定してください。
6. ステップ 4. とステップ 5. を「月」(Mon)、「日」(dAy)、「時」(hour)、「分」(Min) に対して繰り返します。

7. その都度、選択を確定します。
分の設定を確定するとメニューは自動的に終了します。
設定は自動的にワイヤレスプリンターに送信されます。
ワイヤレスプリンターは、自動的にすべてのプリントアウトに日付と時刻を追加します。

注意事項

ワイヤレスプリンターのその他の操作に関しては、その取扱説明書に留意してください。

7. 衛生管理

**警告！
感電**

この製品は、オン/オフボタンが押されると、たとえディスプレイが消えていても、電気が流れています。製品で液体を使用する場合、感電の可能性があります。

- ▶ 衛生管理を実施する前は、必ず製品のスイッチがオフになっていることを確認してください。
- ▶ 衛生管理を実施する前は、必ず電源プラグを引き抜いてください。
- ▶ 液体が製品に入り込まないようにしてください。

**注意！
製品の破損**

不適切な洗浄剤および消毒剤は、製品のデリケートな表面を損傷する可能性があります。

- ▶ 必ずアクリルガラスおよびその他のデリケートな表面に適した、塩素およびアルコールを含まない消毒液を使用してください（作用物質：第四級アンモニウム化合物など）。
- ▶ アルコールやベンジンは使用しないでください。
- ▶ 必ず、デリケートな表面に適した消毒液（中性洗剤）を使用してください。適切な消毒液（中性洗剤）は、専門店で購入できます。

7.1 清掃

- ▶ 装置の表面は必要に応じて、マイルドな石鹼液で湿らせた柔らかい布で清掃してください。

7.2 消毒

1. 使用する消毒剤が、敏感な表面やアクリルガラスに適しているかどうか確認してください。
2. 消毒剤の使用説明書を参照してください。
3. 柔らかい布を消毒剤で湿らせ、その布で製品の表面を清掃してください。

消毒するタイミング	対象
皮膚が直接接​​触する測定の前	計量台
皮膚が直接接​​触した測定の後	計量台
必要に応じて	ディスプレイ フィルムキーボード

7.3 滅菌

装置の滅菌は許可されていません。

8. 機能点検

- ▶ 製品の使用前には必ず機能点検を行ってください。

完全な機能点検には以下が含まれます。

- ・ 機械的損傷の目視検査
- ・ 製品の調整の検査
- ・ 表示部の目視検査および機能検査
- ・ 「概観」の節で説明されている全操作部の機能検査
- ・ オプション・アクセサリーの機能検査

機能検査でエラーや異常が発見された場合は、まずはこの文書の「こんなときはどうする？」の節をたよりにそのエラーに対処してください。



注意！
人身傷害

機能検査でエラーや異常が発見され、それを「こんなときはどうする？」の節をたよりにしても解決できなかった場合、それ以降、製品の使用は許されません。

- ▶ 製品の修理は seca サービスまたは正規のサービス担当者に依頼してください。
- ▶ この文書の「メンテナンス / 再検定」の節に留意してください。

9. こんなときはどうする？

症状	原因 / 対処法
体重がかかっているにもかかわらず表示されない。	体重計に電力が供給されていない。 - 体重計の電源がオンになっているか確認してください。
体重測定の前に 0.0 が表示されない。	体重計の電源をオンにする前に、何か載っていた。 - 体重計から載っているものを降ろしてください。 - 体重計の電源をオフにした後、再度オンにしてください。
あるセグメントが常時点灯している、またはまったく点灯しない。	該当する箇所に故障がある。 - メンテナンスサービスに連絡してください。
「StOp」が表示されている。	最大測定重量を超過してしまった。 - 体重計から載っているものを降ろしてください。
「tEMP」が表示されている。	体重計の周囲温度が高すぎる、または低すぎる。 - 体重計を、周囲温度が +10 °C ~ +40 °C の場所に設置してください。 - 体重計が周囲温度になじむまで約 15 分待ちます。

症状	原因 / 対処法
電源オン後、初めて測定結果を送信し、シグナル音が2回聞こえた。	装置が、ワイヤレス受信装置（seca ワイヤレスプリンターまたは USB ワイヤレスアダプター搭載のパソコン）に測定結果を送信できなかった。 - 体重計がワイヤレスネットワークに組み込まれていることを確認してください。 - 受信装置の電源がオンになっていることを確認してください。 受信が、近くにある高周波装置（例えば携帯電話）によって妨げられている。 - 高周波装置と、seca ワイヤレスネットワーク内の送信装置および受信装置との間の最低間隔を 1 m 空けてください。高周波装置の実際の送信電力によっては、1 m 以上の最低間隔が必要な場合もあります。詳細は、www.seca.com をご覧ください。 注意事項 この障害が解消されない場合、以降の送信を試みても、再びアラーム音が鳴ることはありません。
「rF」メニューに項目「SYS」しか表示されない。	ワイヤレスモジュールがオフになっている。 - ワイヤレスモジュールをオンにしてください（33 ページ「ワイヤレスモジュールをオンにする（SYS）」を参照）。
「rF」メニューに項目「SYS」および「Lrn」のみ表示される。	ワイヤレスモジュールはオンになっているが、ワイヤレスグループが未設定になっている。 - ワイヤレスグループを設定してください（33 ページ「ワイヤレスグループを設定する（Lrn（記憶させる））」を参照）。
「rF」メニューに項目「APrt」と「Time」が表示されない。	ワイヤレスプリンターがワイヤレスグループに登録されていない。 - ワイヤレスプリンターを、メニュー項目「Lrn」からワイヤレスグループに登録してください（33 ページ「ワイヤレスグループを設定する（Lrn（記憶させる））」を参照）。
メニューを呼び出した後、項目「rF」が表示されない。	体重計のワイヤレスモジュールが故障している。 - seca サービスに連絡してください。
「Er:X:11」が表示される。	体重計に過大な重さがかかっているか、体重計の一角に偏った重さがかかっている。 - 体重計から載っているものを降ろすか、体重が均等にかかるようにしてください。 - 体重計を再起動させます。

症状	原因 / 対処法
「Er:X:12」が表示される。	体重計に過大な重さがかかった状態で、電源がオンになった。 - 体重計から載っているものを降ろしてください。 - 体重計を再起動させます。
「Er:X:16」が表示される。	体重計がぐらついて、ゼロ値を検出できなかった。 - 体重計を再起動させます。
エンターボタン（送信 / 印刷）を押すと、「Er:X:71」が表示される。	データを送信できない、ワイヤレスモジュールがオフになっている。 - ワイヤレスモジュールをオンにしてください（33 ページ「ワイヤレスモジュールをオンにする（SYS）」を参照）。
エンターボタン（送信 / 印刷）を押すと、「Er:X:72」が表示される。	データを送信できない、ワイヤレスグループが設定されていない。 - ワイヤレスグループを設定してください（33 ページ「ワイヤレスグループを設定する（Lm（記憶させる））」を参照）。

10. メンテナンス / 再検定

10.1 メンテナンスおよび再検定についての情報

製品の再検定の前に、メンテナンスを実施することを推奨します。

気をつけて！

不適切なメンテナンスによる誤測定

- ▶ メンテナンスおよび修理は、必ず seca サービスまたは正規のサービス担当者にご依頼ください。
- ▶ 最寄のサービス担当者は、www.seca.com でお探してください。あるいは info@seca.co.jp にメールしてください。

国内の法的規定に基づいて再検定は有資格者に依頼して行ってください。

1 つもしくは複数の安全標に抵触しているとき、もしくは度量衡メーター内容が有効な度量衡メーター標に一致していない場合には、その都度、再検定が必要になります。安全標に傷が付いている場合、seca サービスに直にご連絡ください。

10.2 度量衡メーター内容を検証する

この seca の体重計は検定を受けています。検定は、資格を有する機関の手によってのみ実施されます。これを確実に行うために、この体重計は度量衡メーターを備えています。メーターは検定技術関連のデータの変更をすべて記録します。

この体重計が規定通りの検定を受けているかを確認したいときには、次のように行ってください。

1. 必要があれば体重計をオフにします。
2. 任意のボタンを押し続け、体重計をスタートさせます。

ディスプレイに数秒間、現在の度量衡メーター内容が点滅します。

3. 提示された度量衡メーター内容を度量衡メーター標に登録された数値と比較します。



度量衡の検定が有効であるためには、両方の数値が一致している必要があります。標識とメーターの数値が一致していない場合には、再検定を行ってください。サービス担当者または seca サービスにお問い合わせください。再検定が実施された場合、新しい、更新された度量衡メーター標が度量衡メーター状態の標示に使用されます。この標識は、再検定を実施する有資格者によって追加スタンプによって固定されます。この度量衡メーター標は、seca サービスから入手できます。

11.技術データ

11.1 一般的な技術データ

一般的な技術データ seca 677	
体重計を折り畳んだ状態の外形寸法 ・ 奥行 ・ 幅 ・ 高さ	965 mm 1089 mm 151 mm
体重計を立てた状態の外形寸法 ・ 奥行 ・ 幅 ・ 高さ	965 mm 920 mm 1120 mm
計量台の外形寸法 ・ 奥行 ・ 幅 ・ 高さ	965 mm 800 mm 54 mm
重量量	約 34.7 kg
運転時の環境条件 ・ 温度 ・ 気圧 ・ 湿度	+10 ° C ~ +40 ° C (50 ° F ~ 104 ° F) 700 ~ 1060 hPa 30 % ~ 80 % で結露しないこと
保管時の環境条件 ・ 温度 ・ 気圧 ・ 湿度	-10 ° C ~ +65 ° C (14 ° F ~ 149 ° F) 700 ~ 1060 hPa 0 % ~ 95 % で結露しないこと
輸送時の環境条件 ・ 温度 ・ 気圧 ・ 湿度	-10 ° C ~ +65 ° C (14 ° F ~ 149 ° F) 700 ~ 1060 hPa 0 % ~ 95 % で結露しないこと
表示文字サイズ	25 mm
電源供給	AC アダプター
消費電流 ・ ワイヤレスモジュールがオフの場合 ・ ワイヤレスモジュールがオンの場合	約 20 mA 約 37 mA
指令 93/42/EEC に準拠した医療用装置 (ヨーロッパ内のみ)	測定機能付きのクラス I
EN 60601-1 : ・ 保護絶縁された装置、保護等級 II : ・ タイプ B の電子医療機器 :	
保護方式	IP20

一般的な技術データ seca 677	
運転方式	連続運転
無線送信 ・ 周波数帯 ・ 送信電力 ・ 適用規格	2.433 GHz ~ 2.480 GHz < 10 mW EN 300 328 EN 301489-1 EN 301489-17

11.2 重量測定データ

重量測定データ seca 677	
指令 2014/31/EU に準拠した検定 (ヨーロッパ内のみ)	クラス III
精度クラス (日本)	III
型式認定番号 (日本)	D1411 号
最大測定重量 ・ 体重測定範囲 1 ・ 体重測定範囲 2	200 kg 300 kg
最小測定重量 ・ 体重測定範囲 1 ・ 体重測定範囲 2	2.0 kg 4.0 kg
目盛りの粗さ ・ 体重測定範囲 1 ・ 体重測定範囲 2	100 g 200 g
風袋範囲	300 kg
初回検定時の精度 ・ 体重測定範囲 1、50 kg まで ・ 体重測定範囲 1、50 kg ~ 200 kg ・ 体重測定範囲 2、100 kg まで ・ 体重測定範囲 2、100 kg ~ 300 kg	±50 g ±100 g ±100 g ±200 g

12. オプションの付属品

seca 360° wireless 装置	商品番号
身長計 ・ seca 274 ・ seca 264	国ごとに異なる 国ごとに異なる
スロープ	470-00-00-009
ワイヤレスプリンター ・ seca 360° wireless printer 465 ・ seca 360° wireless printer advanced 466	国ごとに異なる 国ごとに異なる

seca 360° wireless 装置	商品番号
PC ソフトウェア ・ seca analytics 115	用途別ライセンスパッケージ
USB ワイヤレスアダプター ・ seca 360° wireless USB adapter 456	456-00-00-009

13. 交換部品

交換部品	商品番号
ユーロプラグ付きプラグイン AC アダプター 230 V~ / 50 Hz / 12 V= / 150 mA	68-32-10-252
アダプター付きスイッチモード AC アダプター 100 ~ 240 V~ / 50 ~ 60 Hz / 12 V= / 0.5 A	68-32-10-265

14. 廃棄処分について



この製品は家庭ゴミで廃棄しないでください。この製品は、電子機器廃棄物として適切に廃棄してください。各国の規定を遵守してください。その他の情報は、こちらにお問い合わせください。

info@seca.co.jp

15.保証

資材や製造時の不具合が原因とされる欠陥については、納品日より1年間の保証期間が適用されます。ただし、電池（充電電池）、ケーブル、ACアダプター、といった可動部品はすべて保証対象外となります。保証の対象となる不具合は、ご購入時の領収書を提示していただければ無償で修理いたします。保証書が保証している範囲以外は保証の対象にはなりません。本製品がお客様のご住所とは別の場所にある場合、往復の運送費はお客様のご負担になります。運搬中の損害で保証を請求することができるのは、運搬に純正の梱包材一式を使用し、その梱包内で本製品が発送時と同じ梱包状態で保護され、固定されていた場合のみです。そのため、すべての梱包材を保管しておいてください。

seca 社テクニカルスタッフでない人が本製品を開けた場合、保証は失効します。

国外にお住まいのお客様につきましては、保証をご請求される場合、各国の販売店へ直接お問い合わせいただきますようお願いいたします。

seca 株式会社

〒262-0011

千葉県千葉市花見川区三角町 94-2

電話：043-216-0850（代表）

ファックス：043-216-0851

seca corporation

94-2 Sankakucho, Hanamigawaku

Chiba City, Chiba 262-0011, Japan

Phone:+81 (0) 43-216-0850

Fax:+81 (0) 43-216-0851

Medical Measuring Systems and Scales since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburg · Germany
Telephone +49 40 20 00 00 0
Fax +49 40 20 00 00 50
info@seca.com

seca operates worldwide with headquarters
in Germany and branches in:

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria

seca polska

seca middle east

seca brasil

seca suomi

seca américa latina

and with exclusive partners in
more than 110 countries.

All contact data under www.seca.com