


seca 685

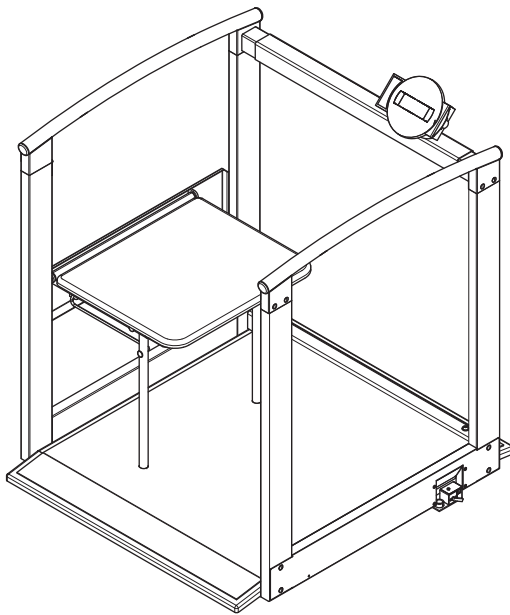

目录

1. 设备描述	4	转动显示盒	26
1.1 衷心祝贺!	4	使用折叠座椅	26
1.2 使用目的	4	5.2 称重	27
1.3 功能描述	4	启动秤	27
1.4 用户资格	4	开始称重过程	27
安装	4	扣除附加重量	
使用操作	4	(TARE (去皮))	28
2. 安全信息	5	持续显示测量结果	
2.1 使用说明书中的安全提示	5	(HOLD (保持))	28
2.2 基本安全提示	5	测定并评估身体体质指数	
使用设备	5	(BMI)	29
防止电击	6	自动计算出 BMI 并打印出	30
防止感染	7	将测量结果发送给无线	
防止受伤	7	接收器	30
防止损坏设备	8	自动称量范围切换	31
处理测量结果	8	关闭秤	31
处理包装材料	9	5.3 其他功能 (菜单)	31
3. 概况	10	菜单导航	32
3.1 控制元件	10	自动清除已存储数值	
3.2 显示屏中的符号	11	(ACLR (自动清除))	32
3.3 设备和铭牌上的标签	12	长期保存附加重量	
3.4 包装上的标签	13	(Pt (预设除皮))	33
3.5 菜单系统	14	激活 Autohold	
4. 在开始使用前	15	(自动保持) 功能 (AHOLD)	34
4.1 发货包装的所有配件	15	激活信号声	
组件	15	(bEEP (蜂鸣声))	34
连接元件	16	设置阻尼 (FIL (过滤))	35
4.2 设备组装	17	恢复出厂设置	
安装侧部支架	17	(rESet (复位))	35
安装侧部护板	18	6. 无线网络 seca 360° wireless	36
安装栏杆	19	6.1 导言	36
安装下横梁	20	seca 无线组	36
安装显示支架	21	频道	37
安装折叠座椅	23	设备识别	37
最终步骤	23	6.2 在无线组中 启动设备	38
4.3 供电	24	(菜单)	
连接电源设备	24	激活无线模块	
5. 使用操作	25	(SYS (系统))	38
5.1 秤投入运行前的准备工作	25	设置无线组	
移动秤	25	(Lrn (记忆功能))	38
校准秤	25	激活自动传输	
		(ASEnd (自动发送))	40
		选择打印选项	
		(APrt (自动打印))	40

调整时间 (tIME(时间))	41
7. 卫生处理	42
7.1 清洁保养	42
7.2 消毒	42
7.3 灭菌	43
8. 功能检查	43
9. 当 . . . 时, 做什么?	44
10. 保养 / 校准	45
10.1 保养和校准的有关信息	45
10.2 检查校准计数器内容	45
11. 技术数据	46
11.1 一般技术数据	46
11.2 称重技术数据	47
12. 选配附件	48
13. 备件	48
14. 处置	48
15. 保修	49

1. 设备描述

1.1 衷心祝贺！

电子多功能秤 **seca 685** 精度高且耐用。
自 170 多年以来 **seca** 将自身经验投入到保健事业中，作为市场引领者，在众多国家以创新的研发产品不断树立称重和身高测量领域的新标杆。

1.2 使用目的

电子多功能秤 **seca 685** 根据国家规定主要应用于医院、诊所和医疗护理机构。
此秤用于常规体重测量、确定总体营养状况并协助主治医生作出诊断或治疗决定。
为得出更加准确的诊断结果，除了获取重量之外医生还必须进行更多有针对性的检查，并应重视其检查结果。

1.3 功能描述

除了传统的体重测定方法外，**seca 685** 提供了用来测定身体体质指数的功能。为此，利用按键输入身高并自动计算出身体体质指数。**seca 360° wireless** 系统的身高测量仪可将身高无线传输给 **seca 685**。
通过无线网络 **seca 360° wireless** 可将测量结果无线传输给一台 **seca** 无线打印机或一台配备了软件 **seca analytics** 及 **seca USB** 无线适配器的电脑。
seca 685 可通过滚轮移动。
请只将该秤第 4 页使用目的用于章节中所提用途。

1.4 用户资格

- 安装

部分组装交货的设备，只能由足够资质的人员，例如专业零售商、医院技师或 **seca** 服务人员进行安装。
- 使用操作

该设备只能由医护专业人员进行操作。

2. 安全信息

2.1 使用说明书中的安全提示



危险！

表示状况非常危险。若您不遵守该指示，肯定会导致严重不可逆转的或致命的损伤。



警告！

表示状况非常危险。若您不遵守该指示，肯定会导致严重不可逆转的或致命的损伤。



小心！

表示状况危险。若您不遵守该指示，肯定会导致轻度或中度受伤。

注意！

表示仪器可能出现操作错误。若您不遵守该指示，将会导致仪器损伤或测量结果错误。

提示：

包含使用该设备的其它信息。

2.2 基本安全提示

使用设备

- ▶ 请注意本使用说明书中的指示。
- ▶ 请注意保管好使用说明书。本使用说明书是该设备的组成部分，必须能够随时供人查阅。



危险！

爆炸危险

请勿将此设备置于富含下列气体的环境中：

- 氧气
- 可燃麻醉气体
- 其他易燃物质 / 混合气体



小心！

病人危害、设备损坏

- ▶ 额外连接在电子医疗设备上的其他设备必须证明符合其相应的 IEC 或 ISO 标准（如数据处理设备必须符合 IEC 60950 标准）。另外，所有配置必须符合医疗系统标准要求（分别参见 IEC 60601-1-1 或 IEC 60601-1 第三版第 16 条）。将额外的设备连接到电子医疗设备上的人员为系统配置人员，必须负责保证系统符合系统标准要求。请注意，相对于

上述标准要求，这也适用于由 seca 推荐的其它设备。地方性法规有优先权。如有疑问，请联系您当地的专业经销商或技术服务部门。

- ▶ 请按照本文件相关章节所述对设备进行定期保养和校准。
- ▶ 不允许对设备进行技术改动。该设备不包含需要使用者维护的部件。请仅到授权的 seca 服务处进行仪器保养和维修。您可登陆网址 www.seca.com 寻找住址附近的服务处或发送邮件至 service@seca.com。
- ▶ 只能使用 seca 原始附件和备件。否则，seca 不提供保修服务。



小心！

患者受伤，故障

- ▶ 请与电子医疗设备如高频外科手术设备保持至少大约 1 米的距离，以防测量错误或无线传输故障。
- ▶ 请与高频设备如移动电话保持最少大约 1 米的距离，以防测量错误或无线传输故障。
- ▶ 高频设备的发送通常要求一米以上的间隔距离。详细信息请参见 www.seca.com。

防止电击



警告！

电击

- ▶ 请将可由电源设备供电的设备放置妥当，直到可以轻松够到电源插座并可快速将设备从电网断开。
- ▶ 请确保您当地的电源符合电源设备上的说明。
- ▶ 切勿用潮湿的手抓取电源设备。
- ▶ 请勿使用延长线缆及多头插座。
- ▶ 请注意不得挤压电缆或让锋利边缘损坏电缆。
- ▶ 请注意电缆不要接触高温物体。
- ▶ 请勿在海平面上 3000 m 使用此设备。

防止感染



警告！ 感染危险

- ▶ 请您在每次测量之前和测量之后洗手，以降低交叉污染和医院内感染的风险。
- ▶ 请按本文件 ng 相应章节所述对设备进行定期清洁。
- ▶ 请确保患者无传染病。
- ▶ 请确保患者的开放性伤口或感染的皮肤不会接触到本设备。

防止受伤



警告！ 由于摔倒造成患者受伤

- ▶ 请确认设备立稳立平。
- ▶ 请将连接线放置妥当（如果有），以防使用者及患者被绊倒。
- ▶ 该设备不可作为辅助站立架使用。请帮助行动不便人员例如竖直轮椅的时候。
- ▶ 请确保患者不直接踩踏或离开秤台边缘。
- ▶ 请确保患者缓慢安全地踏上和离开秤台。



警告！ 滑倒危险

- ▶ 请在患者踏上秤台前确认秤台是否干燥。
- ▶ 请在患者踏上秤台前确认患者双脚是否干燥。
- ▶ 请确保患者缓慢安全地踏上和离开秤台。

防止损坏设备

注意！ 设备损坏

- ▶ 注意，切勿让液体流入设备内部。这可能损坏电子器件。
- ▶ 从插座中拔出电源设备前，请关闭设备。
- ▶ 对于电源驱动设备：如果长时间不使用设备，请从插座中拔出电源设备。只有这样，设备才是断电的。
- ▶ 对于电池或蓄电池驱动设备：若长时间不使用设备，请取出电池组 / 蓄电池。只有这样，设备才是断电的。
- ▶ 请勿让设备跌落。
- ▶ 请勿让设备遭到碰撞或振动。
- ▶ 请按本文件相应章节所述定期进行功能检查。如果设备功能不正常或损坏，请勿使用设备。
- ▶ 请勿使设备受到阳光直射并确保设备附近无热源。过高的温度可能损坏电子器件。
- ▶ 请避免快速的温度波动。如果在设备运输过程中出现大于 20 °C 的温差，设备启动前必须静置至少 2 小时。否则会形成冷凝水，可能损坏电子器件。
- ▶ 请仅在合规的环境条件下使用设备。
- ▶ 请仅在合规的存放条件下存放设备。
- ▶ 请只使用明确适用于有机玻璃和其它敏感表面的无氯无酒精的消毒剂（有效物质：例如四元铵化合物）。
- ▶ 请不要使用腐蚀性或摩擦性的洗涤剂。
- ▶ 请勿使用有机溶剂（例如酒精或汽油）。

处理测量结果



警告！ 危害患者

此设备为**非诊断设备**。此设备协助主治医生作出诊断。

- ▶ 要作出精确的诊断并开始治疗，除了使用此设备外，主治医生还须安排有针对性的检查并重视检查结果。
- ▶ 诊断及以此为基础的治疗责任由主治医生承担。

注意！**数据丢失**

- ▶ 在保存并进一步使用（如在 **seca analytics** 个人电脑软件中或在医院信息系统中）此设备获取的测量值前，请确保测量结果可信。
- ▶ 将测量值传输给 **seca analytics** 个人电脑软件或医院信息系统后，请确认测量结果可信并属于正确的患者，之后才进一步使用测量值。

处理包装材料**警告！****窒息危险**

塑料薄膜（袋）包装材料可能导致窒息危险。

- ▶ 将包装材料置于儿童接触不到的地方。
- ▶ 如果原包装已丢失，请只使用带安全孔的塑料袋，以减小窒息危险。如有可能，请使用可回收利用的材料。

提示：

保存好原包装，以供以后使用（如将设备寄回维修）。


编号	控制元件	功能
5		Enter（确认）键 - 在测量过程中（当无线网络已经打开）： - 短按该键：测量结果会发送到可接收的仪器（带有 USB 无线适配器的电脑） - 长按该键：打印测量结果（无线打印机） - 在菜单中： - 确认所选菜单项 - 保存调整后的数值
6	显示屏	用于配置秤和显示测量结果的显示元件
7	折叠座椅	适用于行动不便、无法在整个测量过程中站立的患者
8	联锁	将折叠座椅固定在上翻状态
9	运输滚轮	秤可在滚轮上移动
10	水平仪	用来显示仪器是否水平放置
11	电源设备接口	用于连接附带的电源设备
12	地脚螺栓	四个用于准确定位的螺栓

3.2 显示屏中的符号



	标记	含义
A		用电源设备供电
B		不可校准功能激活
C		当前使用的存储位置
D		当前使用的称量范围 参见第 46 页技术数据

3.3 设备和铭牌上的标签

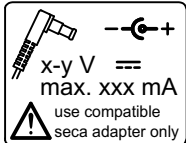
文字 / 符号	含义
	生产商的名称和地址，生产日期
	型号编号
	出厂编号，连续
GAL	以 m/s^2 为单位的值（经过校准的机型） • 标明地球上的重力加速度 • 根据预定位置
ProdID	产品识别码
Approval Type	型式批准的型号名称
	注意使用说明书
	电子医疗设备，型号 B
e	检定分度值，用于重量的分级和秤的校准
d	实际分度值，用于说明两个连续显示值的差值
	激活的称量范围
	此秤根据 2014/31/EU 指令 属于校准等级 III
CMIIT ID	设备许可号码，由中国信息产业部
	依据中华人民共和国计量法的型式批准证书标志
	电源接口旁的型号铭牌 • x-y V: 需要的电源电压 • max xxx mA: 最大电流消耗 • : 注意设备插头极性 • == : 用直流电供给设备
	该设备不能做为生活垃圾处理

3.4 包装上的标签

	防止受潮
	箭头指向产品上侧 直立运输并存储
	易碎 不可扔掷或下坠
	运输和存储的允许最低及最高温度
	运输和存储的允许最低及最高空气湿度
	未消毒
	不可重复使用
	在这里打开包装
	可以通过回收项目处理包装材料

3.5 菜单系统

设备菜单还包括其它功能。由此，您可根据您的使用条件对设备进行最佳配置（第 31 页起的详细信息）。

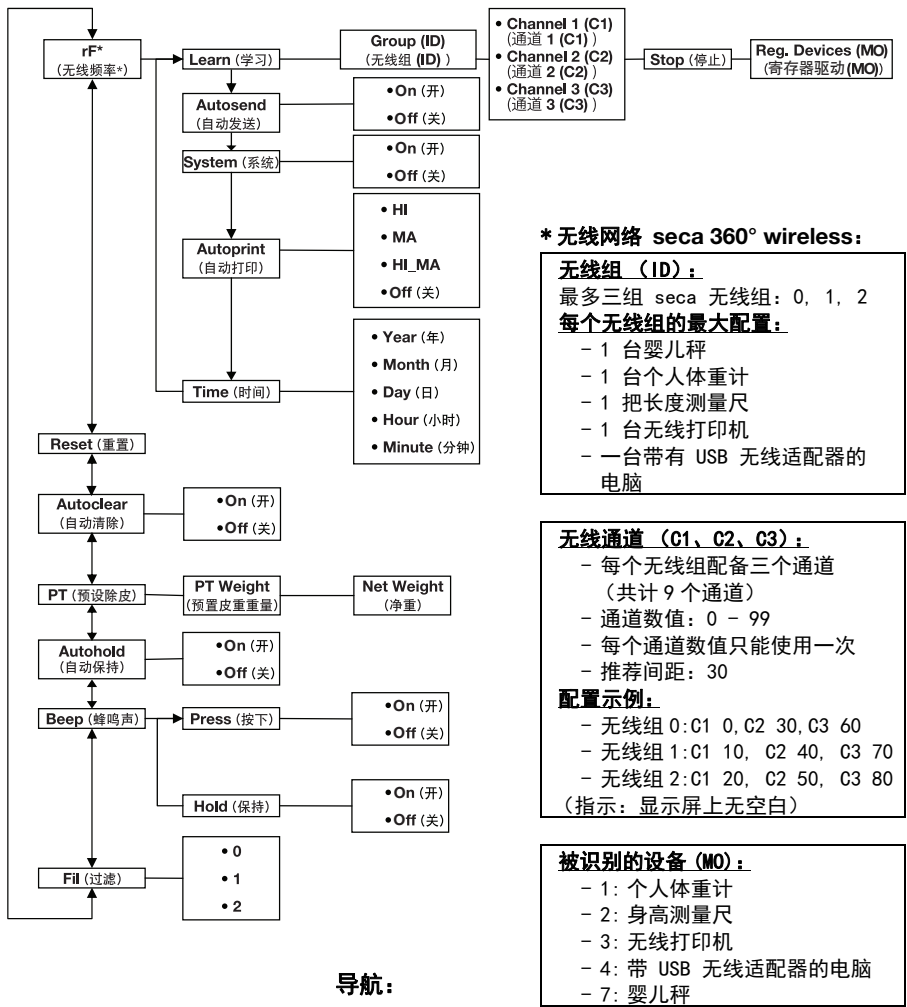

* 无线网络 seca 360° wireless:

无线网络组 (ID):

最多三组 seca 无线组: 0, 1, 2

每个无线组的最大配置:

- 1 台婴儿秤
- 1 台个人体重计
- 1 把长度测量尺
- 1 台无线打印机
- 一台带有 USB 无线适配器的电脑

无线通道 (C1、C2、C3):

- 每个无线组配备三个通道 (共计 9 个通道)
- 通道数值: 0 - 99
- 每个通道数值只能使用一次
- 推荐间距: 30

配置示例:

- 无线组 0: C1 0, C2 30, C3 60
 - 无线组 1: C1 10, C2 40, C3 70
 - 无线组 2: C1 20, C2 50, C3 80
- (指示: 显示屏上无空白)


被识别的设备 (MO):

- 1: 个人体重计
- 2: 身高测量尺
- 3: 无线打印机
- 4: 带 USB 无线适配器的电脑
- 7: 婴儿秤

调出菜单栏:




导航:

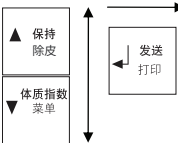


4. 在开始使用前 ...

4.1 发货包装的所有配件

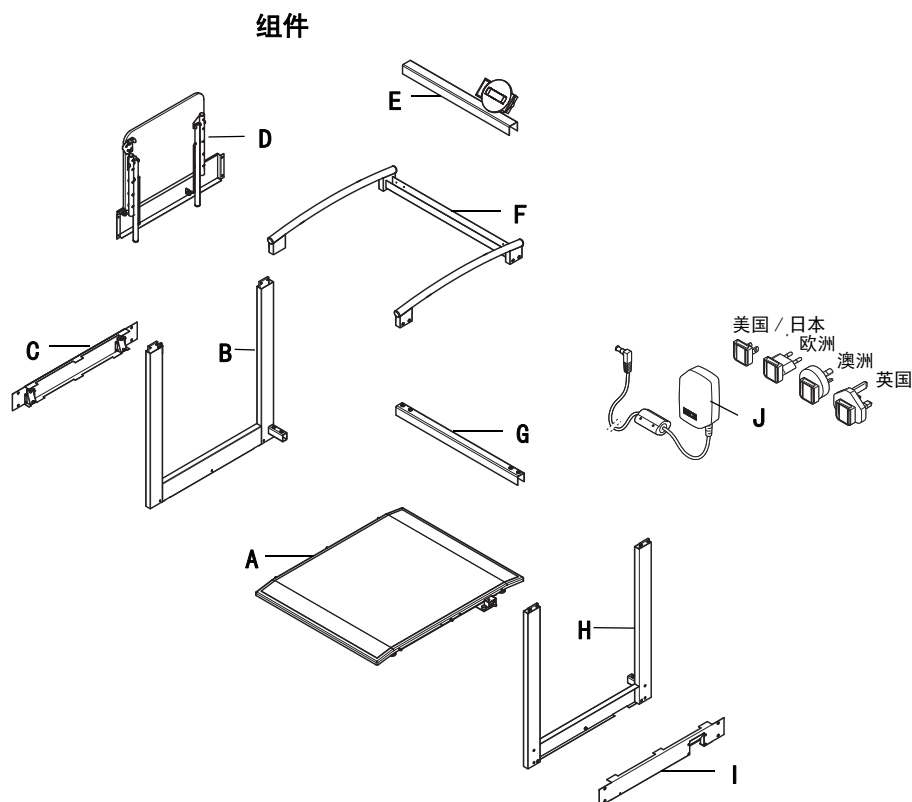

编号	组件	件数
A	秤台	1
B	左侧支架	1
C	带运输滚轮左侧护板	1
D	折叠座椅	1
E	带显示盒的显示支架	1
F	带上横梁的栏杆	1
G	下横梁	1
H	右侧支架	1
I	带电源设备接口空隙的右侧护板	1
J	带适配器的电源设备 (根据不同型号: 带欧洲插头的电源设备)	1

连接元件

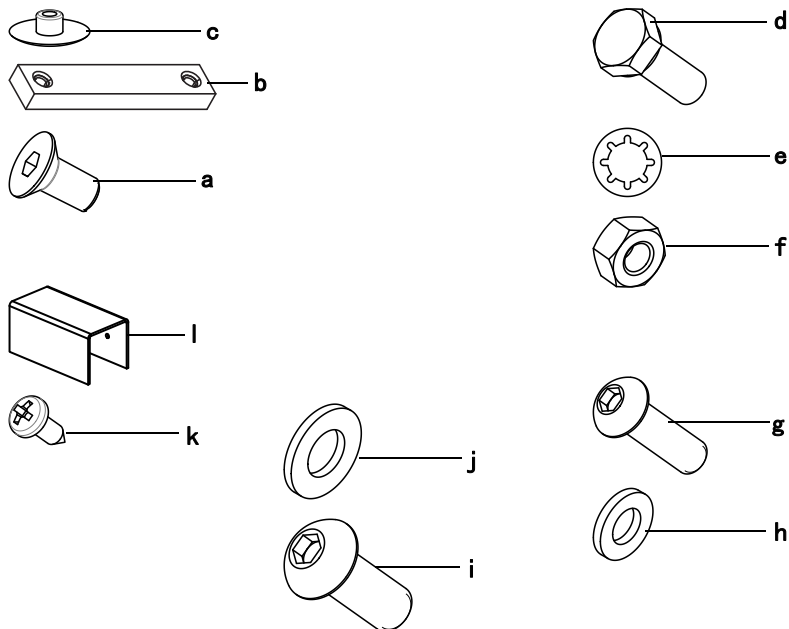

编号	组件	件数
a	埋头螺栓 M6 x 12	16
b	螺纹板	4
c	用于埋头螺栓的孔塞 - 黑色, 用于侧部护板 - 白色, 用于栏杆	8 8
d	六角螺栓 M6 x 16 (在秤台上安装)	6
e	齿盘 J 6.4 (在秤台上安装)	6
f	六角螺母 M6 (在秤台上安装)	6
g	半圆埋头螺钉 M6 x 20	4
h	垫圈 6.4	4
i	半圆埋头螺钉 M8 x 20	4
j	垫圈 8.4	4
k	半圆埋头自攻螺钉 B 3.5 x 9.5	4
l	用于显示支架的盖板	2
	内六角扳手, 扳手开口度 4 mm, 上图未显示	1
	内六角扳手, 扳手开口度 5 mm, 上图未显示	1
	十字螺丝刀 型号 1, 上图未显示	1
	套筒扳手 扳手开口度 8/10, 上图未显示	1
	螺帽扳手 扳手开口度 10, 上图未显示	1
	使用说明, 上图未显示	1

4.2 设备组装

我们建议由两人执行安装，因为必须将大零件互相对齐并彼此拧紧。

安装侧部支架 此安装步骤需要下列连接件（在秤台上安装）：




6 x M6 x 16



6 x J 6.4





6 x M6

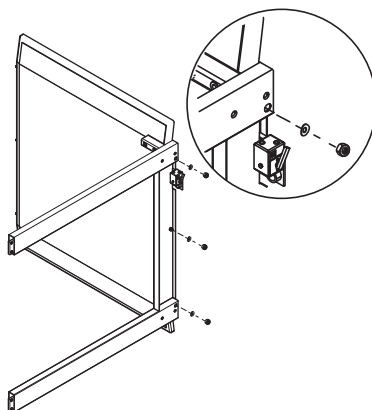

1. 移除秤台两侧的螺母和齿盘。
2. 保留孔中的螺栓。
3. 将秤台放置在前边缘上，并将其固定在此位置。
4. 请将右侧支架放置在秤台的螺栓上。
5. 分别在螺栓上放置一个齿盘和螺母。
6. 拧紧螺母。
7. 重复之前的步骤 4. 直到 6. 以便安装左侧支架。

安装侧部护板

此安装步骤需要下列连接件：

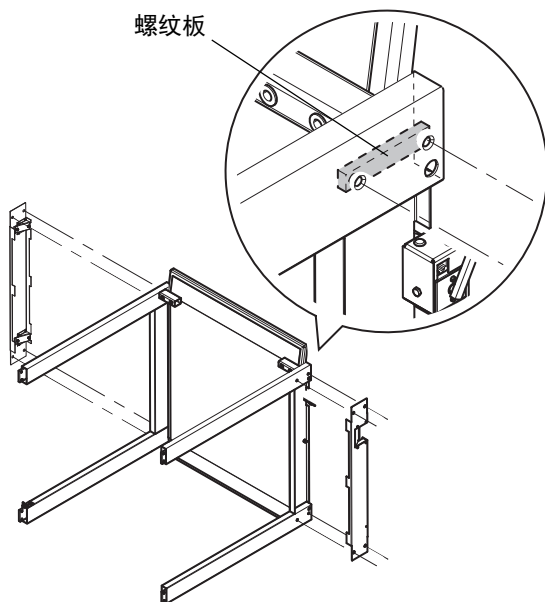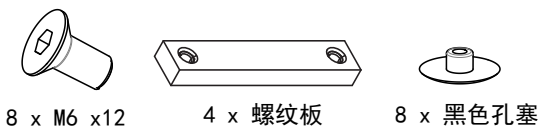

1. 请将右侧支架的两端上各自的螺纹板推动。
2. 请确保，侧部护板的孔位与侧部支架的孔位对齐。
3. 将右侧护板放置在右侧支架上。
4. 请分别用两个侧部部件的螺栓将护板的两端固定住。
5. 对左侧护板重复之前的步骤 1. 直到 4. 。
6. 竖起秤台。
7. 请将黑色孔塞盖住螺丝孔位。


安装栏杆 此安装步骤需要下列连接件：



8 x M6 x12





8 x 白色孔塞

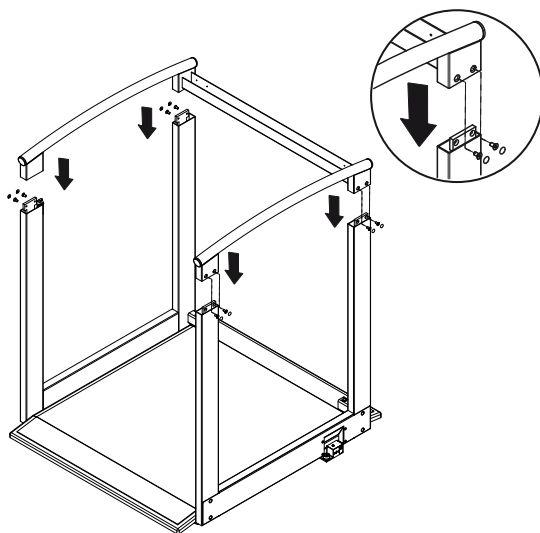



1. 请将栏杆置于侧部支架的立柱上。
2. 每根柱子分别用两个螺栓将栏杆拧紧在侧部支架上。
3. 请将白色孔塞盖住螺丝孔位。

安装下横梁 此安装步骤需要下列连接件：

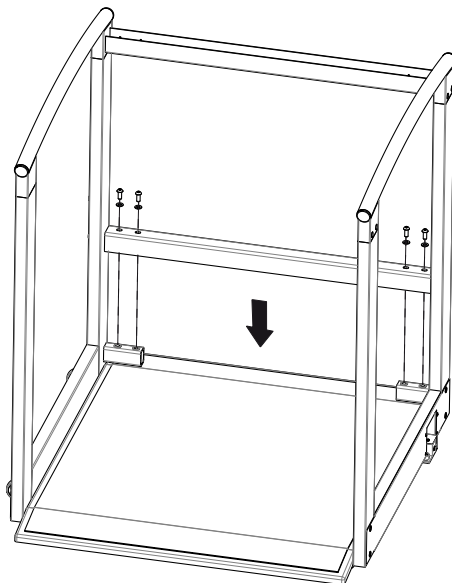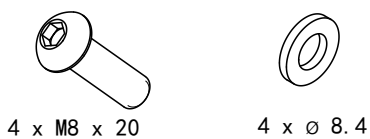

1. 请将下横梁置于侧部支架上。
2. 请确保，将横梁的孔位和侧部支架的孔位对齐。
3. 请将横梁拧紧到侧部支架上。

安装显示支架 此安装步骤需要下列连接件：

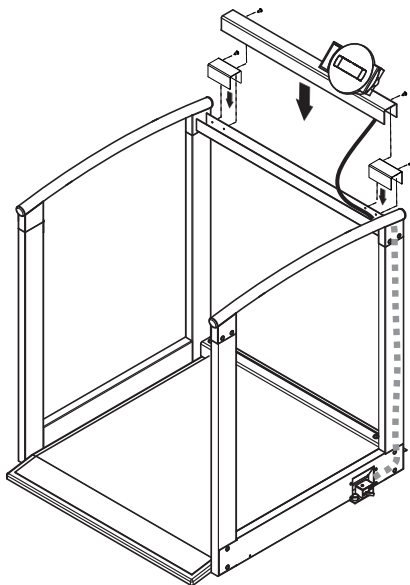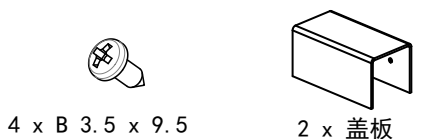

1. 将显示器的连接电缆从上横梁的一侧通过右后柱穿到下方，直至露出连接插头。




小心！ 摔倒危险


如果显示电缆穿过立柱过多的时候，就形成一个线团，患者和用户可能会在其上绊倒。

- 请不要移除显示电缆上的尼龙扎带。尼龙扎带决定了显示电缆的长度。这样可以方便地连接到电子箱而不会形成一个线团。

2. 请将显示电缆推过立柱，直到超过立柱下端的连接插头伸出。
3. 请确定这样敷设上横梁的显示电缆，防止其在进行下列安装步骤时被夹住。

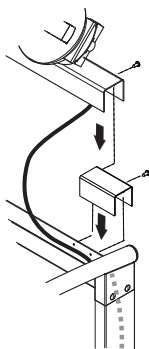


4. 请将盖板置于横梁上。
5. 请确保，将盖板的孔直接和横梁的孔彼此堆叠。
6. 请分别在盖板的外孔里放入一个螺栓并将其拧紧。
7. 请将显示支架置于横梁上。
8. 请确保，将横梁的孔刚好和盖板内孔和横梁的孔彼此堆叠。
9. 请分别在显示支架的孔里放入一个螺栓并将其拧紧。

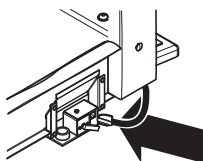

10. 请用秤台上的电子箱连接显示电缆。

安装折叠座椅


此安装步骤需要下列连接件：

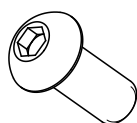

4 x M8 x 20



4 x Ø 8.4

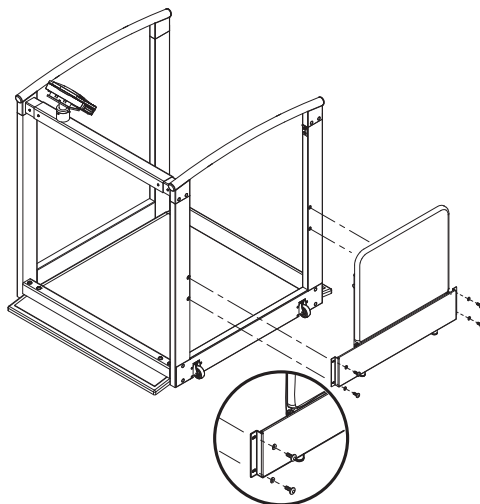

提示：

- 折叠座椅是为行动不便的、无法在整个测量过程中站立的患者设计的。
- 折叠座椅必须如此安装，使得其能够按照秤台方向被向下折叠。

1. 请将折叠座椅拧紧在左侧支架上。
2. 请移除折叠座椅椅腿上的尼龙扎带。

最终步骤

1. 请确保所有部件都被正确安装。
2. 请确保所有螺栓都被拧紧。

4.3 供电

秤的电源供电通过电源设备实现。

连接电源设备




警告！

由于不正确的电源设备引起的人身伤害及设备损伤
常见的电源设备能提供比在它们上面所规定的
更高的电压。该秤能过热、着火、熔化或短路。

► 请仅使用 9 伏或者经过调整的 12 伏输出
电压的原装 seca 插头式电源设备。

1. 如有必要，请将供电所需的电源插头插入电源
设备。

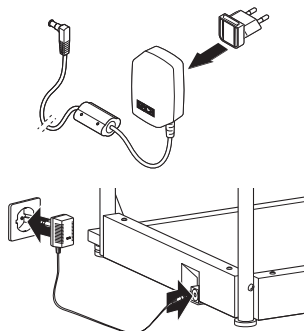

2. 请将电源设备的仪器插头插入秤的连接接口中。

3. 请将电源设备插入电源插座。

4. 请进行一次功能检查，如章节 第 43 页功能检查
所述。

5. 使用操作


小心！

人员损伤

请在每次使用该设备之前进行一次功能检查，如第 43 页功能检查章节所述。

5.1 秤投入运行前的准备工作

移动秤

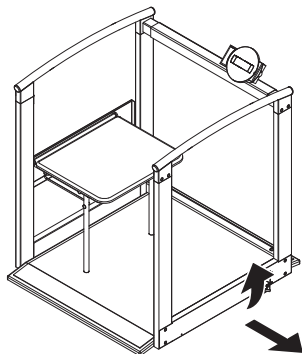

1. 使仪器往后倾斜，直到仪器能在滚轮上自由移动。
2. 请将此位置的秤移动到期望的安装地点或存放地点。


校准秤

注意！


由于分力造成的错误测量

如果将秤连同外壳一起放在如手巾上，重量测量不正确。

► 请安装秤，使得秤仅用地脚螺栓与地板有接触。

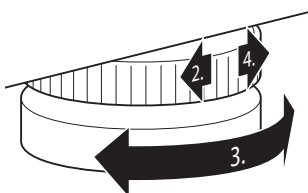

1. 请将秤放在一个结实、平坦的地基上。
2. 松开滚轮。
3. 转动地脚螺栓校准设备。

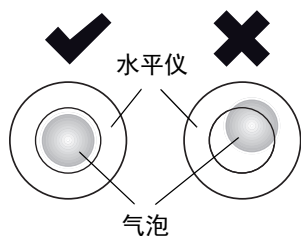


水平仪的气泡必须正好在圆圈的中央。

4. 按箭头的方向拧紧滚轮。
这样，地脚螺栓就不会松动了。

转动显示盒

设备的显示盒可摆动。这样，您可以在任何使用情况下将显示盒调准到最佳位置。

- 转动显示盒，以便操作和读取。

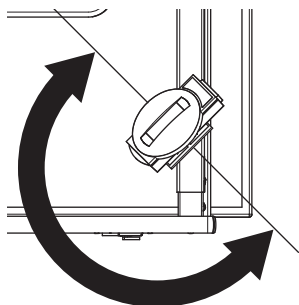

使用折叠座椅

行动不便的患者可以在折叠座椅上坐着，以便被称重。



小心！


人员受伤、设备损伤


折叠座椅的最大允许负载少于设备的最大允许负载。

- 加载折叠座椅时请不要超过其最大允许负载，参见第 46 页技术数据。
- 如果您已知患者体重超过了折叠座椅的最大允许负载，请不要使用折叠座椅。

向下翻转折叠座椅

1. 请扶稳折叠座椅，使其不会意外向下翻转。

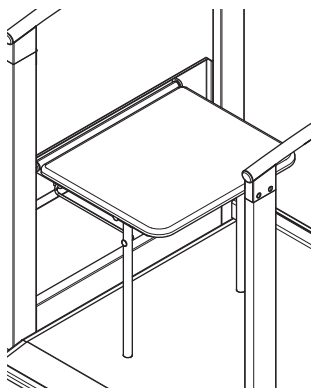

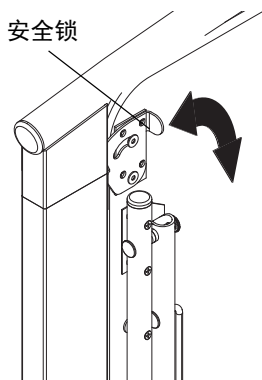

2. 请将折叠座椅的安全锁按顺时针方向旋转到最大程度，直到它不再超过座位平面。
3. 将座椅向下翻转。
4. 请确定椅腿被完全打开。

将折叠座椅折叠起来



小心！ 人员受伤

如果折叠座椅没有被正确固定，可能意外向下翻转。

- ▶ 请确保在不使用折叠座椅的时候，它被正确锁定。
- ▶ 请确保折叠座椅没有被意外解锁。

1. 将座椅向上翻转。
2. 请将折叠座椅的安全锁按逆时针方向旋转到最大程度，直到它安全进入相应侧部部件的开口。
3. 请确定椅腿被完全折叠起来。

5.2 称重



小心！ 由于摔倒造成患者受伤

如果行动不便的人员试图站在或坐在秤上，可能摔倒。

- ▶ 请帮助行动不便人员上秤和就坐。

启动秤



- ▶ 按下启动键。
显示屏的所有显示元素将短暂显示，然后显示屏上显示 **SECA**。
当在显示屏上显示 **0.0** 时，则秤准备就绪。

开始称重过程

1. 您需确认，秤是否已经无负载。
2. 请患者踏上秤。
3. 请患者站立不动。

提示：

如果患者不能很好站立，请帮助他使用折叠座椅。如需要，请帮助患者就坐。

4. 请读出测量结果。



扣除附加重量 (TARE (去皮))

使用 TARE (去皮) 功能, 可避免附加重量
(例如: 手巾或秤台上的垫板) 影响称重结果。

注意!

由于分力造成的错误测量

如果附加重量如大块的手巾碰到秤放置
表面时, 那么重量测量不准确。

► 请确保附加重量只在秤的称重表面上。

1. 打开秤。
2. 请将附加重量放在秤上。
3. 请按住箭头键 (**保持 / 去皮**), 直到显示屏上
显示 “NET (净重)”。
4. 请等待, 直到显示不再闪烁并出现 **0.0**。
5. 如章节 “开始称重过程” 所述为患者称重。
6. 请读出测量结果。
附加重量已自动扣除。



7. 为了停用 TARE (去皮) 功能, 请按箭头键
(**保持 / 去皮**), 直到不再显示
“NET (净重)”, 或者请关闭秤。

提示:

最大可显示重量减少了已放上物品的重量。

持续显示测量结果 (HOLD (保持))

若您激活 HOLD (保持) 功能, 则负重离开秤之后,
将会继续显示重量值。这样, 在您记录重量值前,
可以照管患者。

1. 您需确认, 秤是否已经无负载。
2. 打开秤。
3. 如章节 “开始称重过程” 所述为患者称重。
4. 请短按箭头键 (**保持 / 去皮**)。



- 显示闪烁, 直到测得一个稳定的重量。接着持续
显示重量值。显示 Δ (不可验证的功能) 符号以
及 “HOLD (保持)”。
5. 为了停用 “HOLD (保持)” 功能, 请短按箭头键
(**保持 / 去皮**)。
不再显示 Δ 符号以及 “HOLD (保持)”。

提示：

如果 Autohold（自动保持）功能已激活，重量值将持续显示，直至秤自动关闭或被切断，参见第 34 页激活 Autohold（自动保持）功能（AHOLd）。

测定并评估身体体质指数 (BMI)

身体体质指数将身高和体重彼此联系起来并因此实现更精确的数据信息，例如符合布洛卡公式的理想体重。给出了一个最理想的健康的公差范围。

此秤具备三个身高存储位置。您可输入并保存固定患者的身高。此外，您也可以保存不同的初始值，在此基础上可快速调到某个患者的实际身高。

1. 您需确认，秤是否已经无负载。
2. 打开秤。
3. 请短按箭头键（**体质指数 / 菜单**）。
出现信息“BMI”。
显示上次使用的存储位置（此例中为存储位置 2）。
4. 您可以采纳该存储位置或用箭头键选择另一个存储位置。
5. 按下 Enter（确认）键确认您的设置（**发送 / 打印**）。
显示屏中箭头闪烁。
上次保存在该存储位置中的身高被显示。
6. 您可以接受所显示的身高或者按箭头键调整成另外一个身高。
7. 按下 Enter（确认）键确认您的设置（**发送 / 打印**）。
输入的身高将被保存以供下次计算 BMI 时使用。

提示：

请记住存储位置，以在下次计算 BMI 时重新调出身高。

8. 如章节“开始称重过程”所述为患者称重。
患者的 BMI 会被自动计算并显示。
9. 请读出 BMI 并将它与下面列出的类别进行比较。





10. 为了停用 BMI 功能，请短按 Enter（确认）键（**发送 / 打印**）。

BMI	评估
低于 18.5	患者体重过轻。可能有厌食倾向。为了提高幸福感和工作能力，建议增加体重。如有疑问，应咨询专门医师。
在 18.5 和 24.9 之间	患者体重正常。
在 25 和 30 之间 (预肥胖)	患者有轻微至中等超重。如果已经有疾病（例如：糖尿病、高血压、痛风和高血脂），患者应降低体重。
超过 30	迫切需要减肥。新陈代谢、血液循环和骨骼承受负荷。建议进行坚定的节食、多运动和行为训练。如有疑问，应咨询专门医师。

自动计算出 BMI 并打印出

该秤与无线打印机和 **seca 360° wireless** 系统的身高测量尺一起使用，那么可自动算出 BMI 并打印出结果。

提示：

该功能的前提条件是，设备在无线组登记过（参见第 36 页无线网络 **seca 360° wireless**）。

1. 进行高度测量。
2. 请短按身高测量尺的 Enter（确认）键（**发送 / 打印**）。
测量值会被发送到无线打印机，但不会被打印出。
3. 进行称重。
4. 请长按体重秤的 Enter（确认）键（**发送 / 打印**）。
发送测量值到无线打印机。
算出 BMI。
打印出高度、重量和 BMI。

将测量结果发送给无线接收器



当秤置于 **seca 360° wireless** 无线网络中时，您可以通过按键将测量结果发送给接收就绪的设备（例如无线打印机、带有 USB 无线适配器的电脑）。

- 按压 Enter（确认）键（**发送 / 打印**）。
 - 短按键：将测量结果发送至所有准备好的接收设备
 - 长按键：在无线打印机上打印出测量结果

自动称量范围切换

秤有两个称量范围。称量范围 1 (→H←) 为较小承载力但有更精确的检定分度值。称量范围 2 (→L←) 可使用秤的最大承载力。

秤开启后 “称量范围 1” 为激活状态。如果超出一定的重量值，秤自动切换到 “称量范围 2”。

为了再次切换到称量范围 1，按照下列步骤进行：

- ▶ 将负重从秤上移开。
称量范围 1 再次变为激活状态。


关闭秤



- ▶ 按下启动键。

5.3 其他功能（菜单）

秤的菜单还包括其它功能。由此，您可根据您的使用条件对秤进行最佳配置。

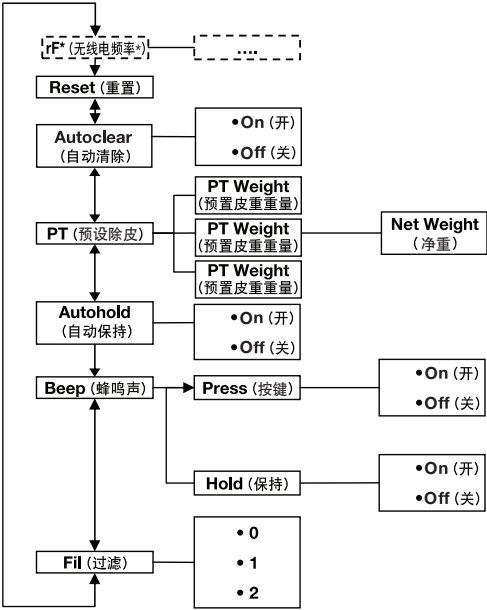

*关于菜单项 “rF (无线频率)” 的描述，请参见章节 第 38 页在无线组中 启动设备（菜单）。

菜单导航



自动清除已存储数值 (ACLR (自动清除))



1. 打开秤。
2. 请按住箭头键 (**体质指数 / 菜单**)，直至调出菜单。
上一次选取的菜单项显示在屏幕上 (此处：Autohold “AHOLD (自动保持)”)。
3. 多次按下箭头键中的一个，直到屏幕上显示所需的菜单项 (此处：阻尼 “FIL (过滤)”)。
4. 按下 Enter (确认) 键确认选项 (**发送 / 打印**)。该项操作对应的菜单项或者子菜单会在屏幕上显示 (此处 “0” 级)。
5. 为了改变设置或调出其他子菜单，请反复按下其中一个箭头键，直至期望的设置 (此处：“2” 级) 显示。
6. 按下 Enter (确认) 键确认选项 (**发送 / 打印**)。菜单将自动退出。
7. 如果还要进行其他调整，再调出菜单，按照所描述的方式进行操作。

提示：

若大约 24 秒没有按下任何键，菜单将自动退出。

8. 按下启动键。
设置已保存。
设备关闭。

为了避免在仪器存储器中不再保留最近测量结果并造成不正确的 BMI 计算，可以这样设置秤，以便测量结果在 5 分钟后自动清除。

提示：


对于某些类型，该功能在出厂时已激活。如果需要，可停用该功能。

1. 从菜单中选择 “ACLR (自动清除)” 项。
2. 确定您的选择。
3. 选择您想要的设置：
 - On (开)
 - Off (关)
4. 确定您的选择。
菜单将自动退出。

长期保存附加重量
(Pt (预设除皮))

利用预设除皮功能，能持续存储附加重量并且可以自动从测量结果中扣除该附加重量。例如能存储鞋和衣物的总重，当患者衣着完整时，可以从测量结果中扣除。

此秤具备三个重量值存储位置。您可以保存不同的重量值并根据不同情况调出单个重量值，以将其自动从测量结果中扣除。

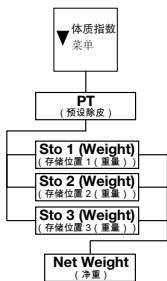

1. 在菜单中选择“Pt（预设除皮）”。
出现信息“Pt（预设除皮）”。
2. 确定您的选择。
上次使用的存储位置被显示。
3. 您可以采纳该存储位置或选择另一个存储位置。
4. 确定您的选择。
显示屏中箭头闪烁。
上次保存在该存储位置中的附加重量被显示。
5. 可接受已存储数值或者按箭头键改变。

提示：

当您输入数值“0”时，该功能关闭。
显示屏中不再显示信息“Pt（预设除皮）”。



6. 确定您的选择。
7. 请患者站到秤上。
显示患者体重。
存储的附加重量已自动扣除。
8. 为了停用该功能，请在菜单中重新选择菜单项“Pt（预设除皮）”置皮重项。
9. 确定您的选择。
该功能已停用。
菜单将自动退出。

提示：

如果关闭秤，此功能被关闭。重新启动秤时，显示屏中不再显示信息“Pt（预设除皮）”。

激活 Autohold (自动保持) 功能 (AHOLD)

AHOLD

On

若您激活 Autohold (自动保持) 功能, 则会在每次测量完成, 负重离开秤后, 继续显示测量结果。那么就不需要在每次称重过程中手动激活 Hold (保持) 功能。

提示:

对于某些类型, 该功能在出厂时已激活。如果需要, 可停用该功能。

1. 在菜单中选择菜单项 “AHOLD (自动保持)”。
2. 确定您的选择。
当前设置会在屏幕上显示。
3. 选择您想要的设置:
 - On (开)
 - Off (关)
4. 确定您的选择。
菜单将自动退出。

激活信号声 (bEEP (蜂鸣声))

bEEP

PrESS

On


您可以设置, 是否在每次按键及达到稳定的重量值时可听到一声信号声。后者对于 Hold/Autohold (保持 / 自动保持) 功能很重要。

提示:

“重量值稳定时的信号声” 功能在出厂时激活。如果需要, 可停用该功能。

1. 请在菜单中选择 “bEEP (蜂鸣声)” 菜单项。
2. 确定您的选择。
3. 选择一项菜单项。
 - PrESS (按键): 按键时的信号声
 - Hold (保持): 重量值稳定时的信号声
4. 确定您的选择。
当前设置会在屏幕上显示。
5. 选择您想要的设置:
 - On (开)
 - Off (关)
6. 确定您的选择。
菜单将自动退出。
7. 如果您想激活第二项功能的信号声, 请重复刚才的操作过程。

设置阻尼 (FIL (过滤))

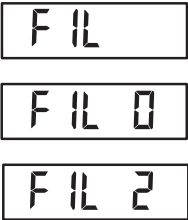

使用阻尼 (FIL = 过滤)，您可在测定重量时降低干扰（例如通过患者运动）。

- 1. 请在菜单中选择“FIL (过滤)”项。
- 2. 确定您的选择。

当前设置会在屏幕上显示。

- 3. 请选择阻尼等级。
 - 0: 无阻尼
 - 1: 中阻尼
 - 2: 强阻尼
- 4. 确定您的选择。

菜单将自动退出。

恢复出厂设置
(rESet (复位))

对于下列功能，您可恢复出厂设置：

功能	出厂设置
Autohold (AHOLd (自动保持))	根据不同型号
信号声 (PrESS (按键))	Off (关)
信号声 (HoId (保持))	On (开)
阻尼 (FIL (过滤))	0
Autoclear (Aclear (自动清除))	根据不同型号
Pre-Tare (PT (预设除皮))	0 kg
用于计算身体体质指数 (BMI (的预存身高值))	170 cm
无线模块 (SYS (系统))	Off (关)
Autosend (ASEnd (自动发送))	Off (关)
自动打印 (APrt (自动打印))	Off (关)

提示：

在恢复出厂设置时，无线模块被关闭。现有的无线组的信息将保存。无线组无需重新设置。



- 1. 在菜单中选择“rESet (复位)”菜单项。
- 2. 确定您的选择。

菜单将自动退出。
- 3. 关闭秤。

当再次打开该秤时，出厂设置已重新恢复并可供使用。

6. 无线网络 SECA 360° WIRELESS

6.1 导言

这台设备配置了无线模块。无线模块能使测量结果无线传输，用于对结果进行分析和进行存档。数据可以无线传输到以下设备上：

- seca 无线打印机
- 带 USB 无线适配器的电脑

seca 无线组


这个无线网络 **seca 360° wireless** 同无线组一起工作。无线组是一个发送设备和接收设备的虚拟组。如果要运行几种型号相同的发送器和接收器，可以最多添加三个无线组（0, 1, 2）。

如果多个实验室必须使用可比的设备装置，设立多个无线组可以保证可靠并正确地传输测量值。


发送设备和接收设备的最远距离约为 10 米。某些空间因素，比如墙的厚度和特性，会减少作用范围。

每个无线组可适用于以下仪器组合：

- 1 台婴儿秤
- 1 台个人体重计
- 1 台身高测量尺
- 1 台 seca 无线打印机
- 一台带 seca USB 无线适配器的电脑

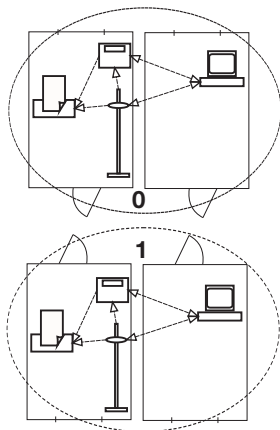

频道

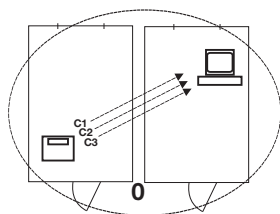

在一个无线组中，设备可以通过三条通道（C1，C2，C3）彼此联系。这样可以保证可信和无干扰的数据传输。

如果您要为秤配置无线组时，设备会提示您三条通道，这三条通道能保证最佳数据传输。我们建议您，采用建议的频道数值。

您也可以手动选择通道数值（0 - 99），如果您想装若干无线组的话。

为了保证数据传输不受干扰，频道间必须有足够的间隔。我们建议，通道数值间隔至少在 30 以上。每个通道数值只能被使用于一条通道。

配置示例；实例中，三个无线组的通道数值设置：

- 无线组 0：C1=_0，C2=30，C3=60
- 无线组 1：C1=10，C2=40，C3=70
- 无线组 2：C1=20，C2=50，C3=80


设备识别

如果您为秤配备了无线组时，该无线组会从 **seca 360° wireless** 系统中寻找其他已经激活的设备。已被识别的其他设备会在该秤的显示屏上作为模块（如“M03”）显示出来。数字表达的意义如下：

- 1: 个人体重计
- 2: 身高测量尺
- 3: 无线打印机
- 4: 带 seca USB 无线适配器的电脑
- 7: 婴儿秤
- 5、6 以及 8 到 12: 为系统扩展预留

6.2 在无线组中 启动设备（菜单）

为了使该设备在 seca 无线组中运转，所有您所需要的功能都可以在子菜单“rF（无线电频率）”中找到。有关您在菜单里面如何导航的信息请参见第 32 页。

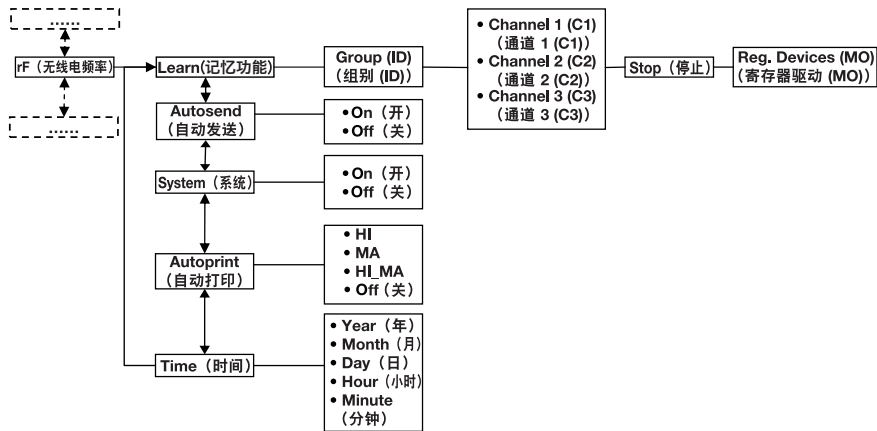

激活无线模块 (SYS (系统))

设备初始设置时，无线模块是没有激活的。因此在您安装无线组之前必须先激活无线模块。


1. 打开该设备。
2. 在子菜单“rF（无线电频率）”中选择菜单项“SYS（系统）”。
3. 确定您的选择。
4. 选择显示屏出现的“On（开）”。
5. 确定您的选择。
菜单将自动退出。
6. 如果不想进行任何其他设置，请按下启动键。
设置已保存。
设备关闭。



设置无线组 (Lrn (记忆功能))

要安装无线组，请按照以下方法进行操作：

1. 打开该设备。
2. 调出菜单。
3. 在菜单中选择“rF（无线电频率）”项。
4. 确定您的选择。

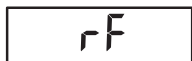









5. 在子菜单“rF（无线电频率）”中选择菜单项“Lrn（记忆功能）”。
6. 确定您的选择。

现在，已安装的无线组（此处：无线组 0 “ld 0”）会在屏幕显示出来。

如果无线组“0”已经存在，请利用箭头键选择另一个 ID（此处：无线组 1 “ld 1”）。

7. 确定您选择的无线组。

该设备将推荐通道 1 的通道数值（此处：“C1 0”）。

您可以采用建议的频道数值，或者按下箭头键设置另一个数值。

8. 确定您对频道 1 的选择。

该设备推荐一个通道 2 的通道数值（此处：“C230”）。

您可以采用建议的频道数值，或者按下箭头键设置另一个数值。

提示：

两位数的频道数值前无空格。屏幕上的“C230”意味着：频道“2”，频道数值为“30”。

9. 确定您对频道 2 的选择。

该设备将推荐通道 3 的通道数值（此处：“C360”）。

您可以采用建议的频道数值，或者按下箭头键设置另一个数值。

10. 确定您对频道 3 的选择。

屏幕上出现“StOP（停止）”信息。

该设备等待其他在作用范围内带有无线功能的设备发出的信号。

提示：


有一些设备当它们置于无线组时，有一套特殊的打开程序。请注意不同的设备上的使用说明。

11. 打开您想置于该无线组的设备，例如说无线打印机。

当这个无线打印机被识别后，会听到蜂鸣声。

提示：

您在将无线打印机成功置于无线组后，您必须紧接着选择打印选项（Menu\rF\APrt）并设置时间（Menu\rF\TIME）。

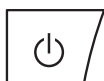

激活自动传输 (ASend (自动发送))



选择打印选项 (APrt (自动打印))



12. 重复这一操作 11. 对所有属于该无线组的设备上。
13. 按下 Enter (确认) 键, 结束查找过程。
14. 按下箭头键中的一个, 屏幕会显示, 哪些设备已经被识别 (此处: “MO 3” 表示被识别的无线打印机)。
如果您有多种设备都置于无线组下, 多次按下箭头键, 以确保所有设备被识别。
15. 按下 Enter (确认) 键退出菜单, 或者等待自动退出菜单。
16. 如果不想进行任何其他设置, 请按下启动键。
设置已保存。
设备关闭。

您可以这样配置长度测量仪, 使得测量结果自动发送到所有在无线组中登录的接收设备 (例如: 无线打印机和带 USB 无线适配器的电脑)。

提示:

当您想使用无线打印机时, 要确定打印选项不是 “Off (关)” 的状态 (参见第 40 页选择打印选项 (APrt (自动打印)))。

1. 打开该设备。
2. 在子菜单 “rF (无线电频率)” 中选择菜单项 “ASend (自动发送)”, 确定所选。
3. 选择出现的 “On (开)” 并确定所选。
菜单将自动退出。
4. 如果不想进行任何其他设置, 请按下启动键。
设置已保存。
设备关闭。

您可以这样配置该设备, 使测量结果可以自动的通过在无线组中登记过的无线打印机上打印出来。

提示:

这个功能只适用于在通过 “Learn (记忆功能)” 功能将, 一台 seca 无线打印机置于无线组时的情况。

1. 打开该设备。
2. 在子菜单 “rF (无线电频率)” 中选择菜单项 “APrt (自动打印)” 并确定所选。



调整时间 (tIME (时间))



3. 请为您的仪器组合选择相关设置：
 - HI：量高尺的测量结果
 - MA：秤的测量结果
 - HI_MA：量高尺和秤的测量结果
 - Off（关）：无法自动打印，只能通过在校量过程中长按 Enter（确认）键打印。
4. 确定您的选择。
菜单将自动退出。
5. 如果不想进行任何其他设置，请按启动键。
设置已保存。
设备关闭。

您可以设置系统，使无线打印机在打印测量结果时自动添加日期和时间。要实现这一点，您必须设置一次设备的日期和时间，并传输到无线打印机的内部时钟上。

提示：

这个功能只适用于在通过通过“Learn”（记忆功能）功能，一台 seca 无线打印机置于无线组时的情况。

1. 打开该设备。
2. 在子菜单“rF（无线频率）”中选择“tIME（时间）”菜单项。
3. 确定您的选择。
此时，屏幕上会出现“年”（YEA）。
4. 请设置成为正确的年份。
5. 确定您的选择。
6. 重复之前的步骤 4. 并且 5. 相应地对“月”（Mon）“日”（dAy），“时”（hour）和“分”（Min）。
7. 依次确定您的选择。
确定对分钟的设置后，菜单将自动退出。
设置将自动传输到无线打印机上。
无线打印机在每次打印时，会自动添加日期和时间。

提示：

关于无线打印机的其他操作，请注意查看其产品说明书。

8. 如果不想进行任何其他设置，请按启动键。
设置已保存。
设备关闭。

7. 卫生处理



警告！ 电击

按下打开 / 关闭键且显示屏熄灭后设备并未断电。在设备旁使用液体可能导致电击。

- ▶ 请在进行任何清洁工作前确认，设备已关闭。
- ▶ 请在进行任何清洁工作前拔下电源插头。
- ▶ 在每次卫生处理前，请从设备中取出蓄电池（如有并且已进行技术预设置）。
- ▶ 请确认无液体进入设备内部。



小心！ 设备损坏

不适用的清洁剂和消毒剂可能会损坏设备敏感的表面。

- ▶ 请只使用明确适用于有机玻璃和其它敏感表面的无氯无酒精的消毒剂（有效物质：例如四元铵化合物）。
- ▶ 请不要使用腐蚀性或摩擦性的洗涤剂。
- ▶ 请勿使用有机溶剂（例如酒精或汽油）。

7.1 清洁保养

- ▶ 如有必要，请用一块浸润了柔和肥皂泡沫的软布清洁设备上表面。

7.2 消毒

1. 请您确保您的消毒剂适用于敏感的表面和有机玻璃。
2. 请注意消毒剂使用说明。

3. 请消毒该设备：
- ▶ 用消毒剂浸湿软布并擦拭设备。
 - ▶ 遵守日期，参见表格。

期限	组件
在每次测量前	秤台
在每次测量后	秤台
必要时	• 显示屏 • 薄膜键盘

7.3 灭菌

不允许给设备进行灭菌。

8. 功能检查

- ▶ 每次使用前请进行功能检查。
- 一次完整的功能检查包括：
- 目测机械损坏情况
 - 显示屏幕的清晰性检查和功能检查
 - 对所有在第 10 页概况 章中描述的操作元件进行功能检查
 - 对选配附件进行功能检查

如果在进行功能检查时确定故障或偏差，请先尝试通过自第 44 页起当 . . . 时，做什么？章节中的描述排除故障。



**小心！
人员损伤**

如果在功能检查过程中确定了故障或偏差且不能通过自第 44 页起当 . . . 时，做什么？章节中的描述排除故障，则不允许使用设备。

- ▶ 请联系 seca 维修服务或授权服务点进行维修。
- ▶ 请注意第 45 页保养 / 校准章节。

9. 当 . . . 时，做什么？

故障	原因 / 排除方法
... 在负载时没有出现重量显示？	秤没有插上电源。 - 检查秤是否已开启
... 称重前 0.0 未显示？	秤在开启前已负载。 - 将负重从秤上移开 - 关闭并重启秤
... 某部分一直或者完全不亮？	相应的位置发生故障。 - 通知保养服务人员
... 出现显示 “StOP（停止）”？	已超出最大负载。 - 将负重从秤上移开
... 出现显示 “tEMP（温度）”？	秤的周围环境温度过高或者过低。 - 将秤放置在 +10 °C 和 +40 °C 的环境温度 度内 - 等待约 15 分钟，直到秤已适应环境温度
... 当按下按键测量结果首次发送时，听到两次信号声？	该秤不能将测量结果发送到无线接收器（seca 无线打印机或者带有 seca USB 无线适配器的电脑）上。 - 您需确认，是否已把秤置于无线网络下了 - 您需确认，接收设备是否已经打开 接收由于附近存在高频设备（比如移动电话）而受到干扰。 - 请您将高频设备放置离在 seca 无线网络中的发送设备和接收设备至少间隔一米的距离。 高频设备的实际发送功率可要求间隔距离至少为一米。详情请见 www.seca.com 。 提示： 如果干扰没有消除，在随后进行的发送尝试中不会再出现警告音。
... 在“rF（无线电频率）”菜单中只能看到“SYS（系统）”项？	无线模块没有激活。 - 激活无线模块（参见第 38 页激活无线模块（SYS（系统）））
... 在“rF（无线电频率）”菜单中只能看到“SYS（系统）”和“Lrn（记忆功能）”项？	无线模块已激活且尚未安装无线组。 - 安装无线组（参见第 38 页设置无线组（Lrn（记忆功能）））
... 在“rF（无线电频率）”菜单中不能看到“APrt（自动打印）”和“tIME（时间）”项？	在无线组没有无线打印机登录。 - 通过“Lrn（记忆功能）”菜单项在无线组登记无线打印机（参见第 38 页设置无线组（Lrn（记忆功能）））

故障	原因 / 排除方法
... 调出菜单后未显示 “rF (无线电频率)” 菜单项？	秤的无线模块故障。 - 请联系 seca 维修服务
... 出现显示 “Er: [No.]:11”？	秤负载过高或者在一角上负载过大。 - 将负重从秤上移开或者均匀分布重量 - 重新开启秤
... 出现显示 “Er: [No.]:12”？	秤开启时，负载过大。 - 将负重从秤上移开 - 重新开启秤
... 出现显示 “Er: [No.]:16”？	秤在摆动，不能确定零点。 - 重新开启秤
... 当按压 Enter (确认) 键 (发送 / 打印) 时显示 “Er: [No.]:71”？	不能传输数据，因为无线模块未激活。 - 激活无线模块 (参见第 38 页激活无线模块 (SYS (系统)))
... 按下 Enter (确认) 键 (发送 / 打印) 时出现 显示 “Er: [No.]:72: ”？	不能传输数据因为未安装 无线组。 - 安装无线组 (参见第 38 页设置无线组 (Lrn (记忆功能)))

10. 保养 / 校准

10.1 保养和校准的有关信息

我们建议，在校准设备前进行一次保养。

注意！

如若保养不当，可能出现测量错误

- 请只委托 seca 服务部或授权的服务点进行保养和维修工作。
- 您可登陆网址 www.seca.com 寻找住址附近的服务处或发送邮件至 service@seca.com。

请按照国家法律规定由经过授权的人员进行校准。

当一个或多个安全密封损坏或者校准计数器内容与有效校准计数器标记上的数字不一致时，必须进行校准。如果安全密封已损坏，请直接与 seca 服务部联系。

10.2 检查校准计数器内容

该 seca 秤已校准。只允许由授权机构进行校准。为了确保这些，该秤配备了记录校准技术数据每次变化的校准计数器。

如果您要检查，秤是否已按规定校准，请采取如下步骤：

1. 请在必要时关闭秤。
2. 请按住任意按键并开启秤。
显示屏上闪烁了几秒当前校准计数器内容。
3. 请将给出的校准计数器内容与在校准计数器标记上规定的数字进行比较。



对于一次有效校准，两个数字必须一致。当标记和校准计数器不一致时，必须进行校准。请与您的服务处或者 seca 客户服务部门联系。重新校准后，用更新的校准计数器标记标明校准计数器状态。该标记由经过授权的重新校准人员额外盖章。校准计数器标记可从 seca 服务部门获取。

11. 技术数据

11.1 一般技术数据

一般技术数据 seca 685	
秤规格 • 长度 • 宽度 • 高度	965 mm 910 mm 1100 mm
秤台规格 • 长度 • 宽度 • 高度	850 mm 800 mm 57 mm
自重	59 kg
温度范围 • 运行 • 存储 • 运输	+10 ° C 至 +40 ° C (+50 ° F 至 104 ° F) -10 ° C 至 +65 ° C (+14 ° F 至 149 ° F) -10 ° C 至 +65 ° C (+14 ° F 至 149 ° F)
气压 • 运行 • 存储 • 运输	700–1060 hPa 700–1060 hPa 700–1060 hPa

一般技术数据 seca 685	
空气湿度 - 运行 - 存储 - 运输	30 % - 80 % 非冷凝 0 % - 95 % 非冷凝 0 % - 95 % 非冷凝
表盘高度	25 mm
电源：电源设备 - 电源电压 - 耗电量 - 带停用的无线模块 - 耗电量 - 带激活的无线模块 - 保护绝缘设备，保护等级二级 (EN 60601-1)	12 V 约 20 mA 约 37 mA ☐
符合指令 93/42/EEC 的医疗产品	带有测量功能的 I 级设备
EN 60601-1：电子医疗设备，型号 B	
保护方式	IP20
运行方式	连续运转
无线传输 - 频带 - 发送功率 - 使用标准	2.433 GHz - 2.480 GHz < 10 mW EN 300 328 EN 301489-1 EN 301489-17

11.2 称重技术数据

称重技术数据	
按照指令 2014/31/EU 校准	III 级设备
最大称量 - 折叠座椅 - 称量范围 1 - 称量范围 2	150 kg 200 kg 300 kg
最小称量 - 称量范围 1 - 称量范围 2	2.0 kg 4.0 kg
检定分度值 - 称量范围 1 - 称量范围 2	100 g 200 g

称重技术数据	
确定皮重范围	300 kg
初始校准精度	
• 称量范围 1, 到 50 kg	± 50 g
• 称量范围 1, 50 kg 到 200 kg	± 100 g
• 称量范围 2, 到 100 kg	± 100 g
• 称量范围 2, 100 kg 到 300 kg	± 200 g

12. 选配附件

seca 360° wireless 无线设备	产品编号
身高测量尺 • seca 274 • seca 264	国家特有机型配置 国家特有机型配置
坡道板	470-00-00-009
无线打印机 • seca 360° wireless printer 465 • seca 360° wireless printer advanced 466	国家特有机型配置 国家特有机型配置
个人电脑软件 • seca analytics 115	按照用途不同, 许可证型号不同
USB 无线适配器 • seca 360° wireless USB adapter 456	456-00-00-009

13. 备件

备件	产品编号
带欧洲插头的电源设备: 230 V~ / 50 Hz, 12 V= / 150 mA	68-32-10-252
带适配器的开关式电源供应器: 100-240 V~ / 50-60 Hz / 12 V= / 0.5 A	68-32-10-265

14. 处置



电子器件不得作为生活垃圾来废弃处理。该仪器须作为电子废料而处置。请注意您所在国家的各种规定。如果您还想了解其他情况, 您可以在下面的网站, 得到咨询服务:

service@seca.com

15. 保修

由于原料或者制造上出现的问题造成的缺陷，我们提供自发货起两年保修。所有可卸除的部分，比如电池、电线、电源供应器、蓄电池等除外。只要机器还在保修期，顾客可以凭借购买发票，免费修理故障。其他的要求恕不能满足。如果仪器不在顾客所在地时，产生的来回运输费请自理。只有当您使用原来的包装，并且秤也是按原来打开包装时的状态固定的时候，我们才会负责运输过程中出现的损坏。因此，请您保存好所有包装部分。

如果打开设备使用的人没有得到过 **seca** 明确的授权而造成损坏，我们也不提供保修。

需要保修的情况下，请跟您购买产品的 **seca** 分公司或经销商联系。

赛康医用度量系统（杭州）有限公司
萧山经济技术开发区桥南区鸿达路 201 号
浙江杭州（邮政编码 311231）
中国
电话：+86 571 82 86 96 89
传真：+86 571 82 86 96 87
邮箱：info.nlv@seca.com



Medical Measuring Systems and Scales since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburg · Germany
Telephone +49 40 20 00 00 0
Fax +49 40 20 00 00 50
info@seca.com

seca operates worldwide with headquarters
in Germany and branches in:

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria

seca polska

seca middle east

seca brasil

seca suomi

seca américa latina

seca asia pacific

and with exclusive partners in
more than 110 countries.

All contact data under www.seca.com

seca[®]
Precision for health