


## seca 761

# Инструкция по эксплуатации

### Точность для здоровья

Купленные Вами весы- прецизионный, надежный прибор с хорошим дизайном.  
 Более 150 лет, seca ставит свой опыт на службу здоровью, а, как компания, занимающая ведущие позиции на рынке в многих странах мира постоянно намечает новые рубежи инновативными конструкциями для взвешивания и измерения.  
 Сегодня, Вы найдете под крышей seca точность для здоровья: медицинское взвешивание, взвешивание для личных целях.

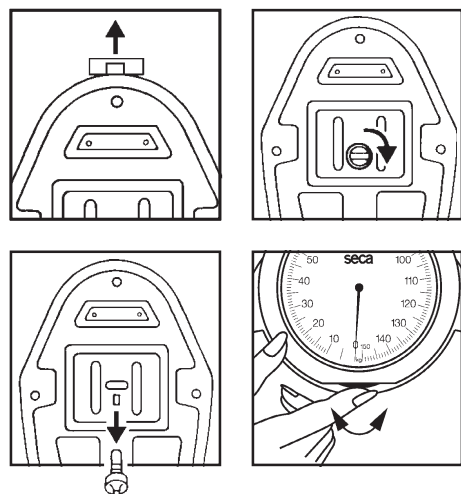

А так работать

- Удалить фиксацию для транспортировки:  
 Поворачивать красный предохранительный штифт на нижней стороне и вытягивать его.  
 Просто вынимать угловатый красный фиксатор
- Устанавливать указание на ноль.  
 Колесико находится прямо под нулем.

Уход

С помощью обычных средств очистки и ухода. Нелѣзя употреблять средства для чистки!

Сняв лимб, можно чистить лимбовое стекло изнутри.  
 Повернуть лимб на лево и снять.  
 Снова поставить и повернуть на право.

Гарантия на 3 года

### CE Декларация о конформности

Неавтоматические, механические медицинские весы

Допуск к эксплуатации типа EC D 94-09-038

... соответствует описанному в удостоверении о допуске к эксплуатации типа модели. Весы выполняют действующие требования следующих предписаний:  
 90/384/EWG о неавтоматических весах  
 93/42/EWG о медицинской продукции и  
 Европейский стандарт DIN EN 45501