


取扱説明書 – 追加情報


本章では新たに追加・更新された機能について補足しております。

6.1 マルチ機能ディスプレイをオンにする

電子カルテシステムに接続されている製品用の新しいスクリーンセーバー:

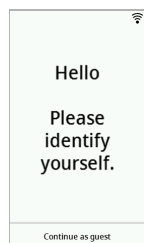


ソフトウェア **seca analytics 125** に接続されている製品、およびスタンドアロン製品用の新しいスクリーンセーバー:

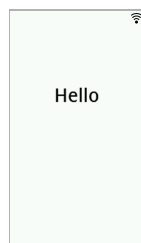


6.6 生体インピーダンスの測定

患者の電極接触の確認の新しい表示:

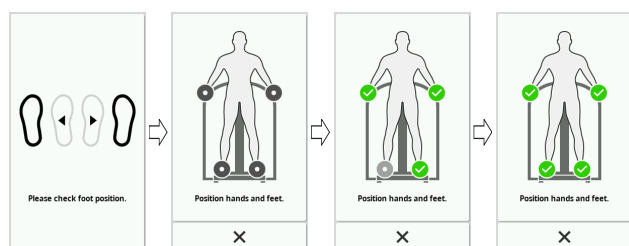


生体インピーダンス測定の進行状況の新しい表示:

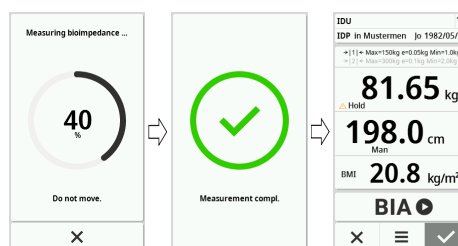


6.7 測定プロセスの終了

スキャンしたIDが正しいかどうかを示す新しい表示:

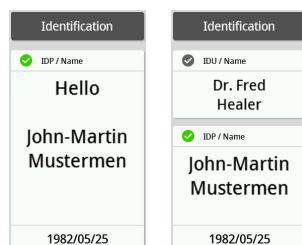

測定結果が送信される、およびデータが電子カルテシステムまたは **seca analytics 125** に送信されたことを示す新しい表示。

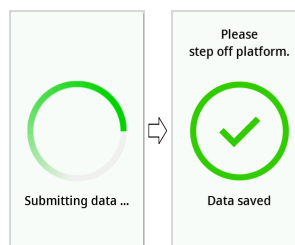

7.3 ディスプレイ設定の調整

名前の形式を設定する

作動モード	機能を利用可能
Basic (ベーシック)	-
Advanced (アドバンス)	•
Expert (エキスパート)	•
Service (サービス)	•

患者および使用者の氏名が表示される形式を設定できます。

1. ☰ ボタンをタップします。
メニュー **Settings (設定)** が表示されます。
2. ✓ ボタンまたは ⏏ ボタンを、メニュー項目 **Display (表示)** が表示されるまでタップします。
3. メニュー **Display (表示)** で項目 **Name format (名前の形式)** を選択します。
4. 希望する名前の形式をタップします。
設定がオンになりました。

5. 🏠 ボタンをタップして、メニューを終了します。

