

seca 354

Pèse-bébé électronique
et pèse-personne plat
pour enfants

optimisé



- Balance multifonctionnelle pèse-bébé et pèse-personne plat pour enfants.
- Nacelle amovible facilement détachable du support.
- Fonction de prise de lait BMIF (Breast Milk Intake).
- Construction robuste pour un transport sans problème.

seca 354 :

Convertible et robuste – Qualité compacte et multifonctionnelle

Utilisation à domicile, dans les cabinets de consultation et dans les maternités : le contrôle fiable du poids d'un enfant est décisif pour un bon départ dans la vie. La balance multifonctionnelle seca 354 a été mise au point sur la base de considérations pratiques. Elle peut servir à la fois de pèse-bébé et de pèse-personne plat pour enfants en bas âge.



Balance multifonctionnelle pèse-bébé et pèse-personne plat pour enfants.

La nacelle de la balance seca 354 permet de peser les bébés commodément et en toute sécurité. Grâce à ses formes arrondies et à ses bords relevés, le bébé s'y sent bien et peut être pesé en douceur. En ôtant la nacelle du support on obtient un pèse-personne plat électronique d'une capacité de 20 kg.

Blocage de la nacelle pour une pesée en toute sécurité.

Il suffit d'un geste pour transformer le pèse-bébé en un pèse-personne plat : en appuyant sur une touche, on débloque la jonction entre la nacelle et le support. En position verrouillée, la nacelle reste fixée au support et le pèse-bébé peut être soulevé et transporté sans problème.

Touches de commande fonctionnelles conçues pour une utilisation intuitive.

La balance multifonctionnelle seca 354 est dotée de touches de commandes permettant une utilisation intuitive ne nécessitant pas d'explication. La fonction Auto-HOLD mémorise le résultat de la pesée et permet ainsi de s'occuper d'abord du bébé avant d'en noter le poids. Pour une pesée fiable, le poids des langes ou d'un drap doux peuvent être déduits à l'aide de la fonction TARE. La fonction BMIF permet de déterminer la quantité de lait ingérée par le nourrisson lors de l'allaitement. Il suffit en effet d'appuyer sur une touche pour que le résultat de la pesée du nourrisson avant l'allaitement soit mémorisé et soustrait de celui de la pesée après l'allaitement.



Construction robuste pour un transport sans problème.

La construction compacte et robuste de la balance seca 354 la prédestine à une utilisation quotidienne professionnelle mobile pour le suivi médical des petits. L'électronique économe permet jusqu'à 20,000 pesées avec un seul jeu de piles et assure donc l'autonomie et la mobilité de cette balance.



seca 414



seca 413



Il suffit d'appuyer sur un bouton pour détacher facilement le plateau de son support.



seca 354

Caractéristiques techniques

- Capacité : 20 kg
- Graduation : 5 g < 10 kg > 10 g
- Dimensions (LxHxP) : 552 x 156 x 332 mm
- Dimensions de la nacelle (LxHxP) : 525 x 80 x 250 mm
- Dimensions de la plateforme (LxHxP) : 280 x 65 x 235 mm
- Poids : 2.3 kg
- Alimentation : piles
- Fonctions : TARE, BMIF, Auto-HOLD, extinction automatique
- En option : chariots seca 403 et seca 402, toise pliable légère seca 417, sac à dos seca 409 (pour la combinaison avec une toise ou une toisemate-las), sacoche de transport seca 414 (pour combinaison avec toise pliable), seca 431 et seca 413