

seca 417

轻便稳定的测量板，
适合移动使用



- 操作简便，可快速移动使用。
- 折叠后可节省空间。
- 高品质材料保证了长使用寿命。
- 光滑的表面易于清洗。

secu 417:

使繁重的工作变得简单

与 secu 416 婴儿量板相比, secu 417 可移动使用。secu 417 的可折叠机械装置使其变得紧凑小巧, 此外, secu 417 重量轻, 方便运输。它操作简单, 表面光滑易清洗。高质量材料保证了产品的耐用性和长使用寿命。



操作简单

secu 417 两部分的连接处有一个交点。该款婴儿量板有一体化的头部挡板和可移动脚部挡板, 脚部挡板可以沿着凸起的滑槽顺滑地移动。每次测量, 使用者应该轻轻地把婴幼儿的头靠在头部挡板上定位, 然后慢慢拉直婴儿双脚, 最后将脚部挡板移至婴儿脚掌。

读数简单

secu 417 婴儿量板是理想的移动使用测量装置。在常规检查中, 医护人员要快速地检查婴幼儿的营养状况与成长情况, 因此, 能够简便地读取测量数据很重要。量板上高品质的红色刻度即使经过多年的使用也不会褪色。

快速清洗

圆形光滑的表面防止在测量过程中的碰撞和摇晃, 而且便于清洗。移除脚部挡板便可以方便地清洗滑槽。对皮肤无害的 ABS 塑料材质和表面刻度不受普通清洁剂和消毒剂的影响而损坏或褪色。

长使用寿命


这款轻便的测量板是由高质量的折叠装置、头部挡板和脚部挡板组成。值得我们关注的是这种材质可以经过多年的使用而不变形。由防水材质做成的尼龙便携袋 secu412 给这款测量板以额外的保护。



较大的刻度尺, 便于读出测量结果。



高品质可折叠装置确保了产品的长使用寿命。

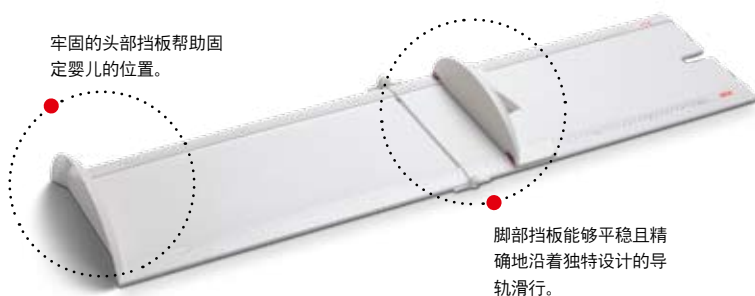

secu 417

技术参数

- 测量范围: 10 - 100 cm
- 检定分度值: 2 mm
- 测量板尺寸 (长x高x宽): 1100 x 115 x 333 mm
- 折叠后尺寸 (长x高x宽): 577 x 115 x 333 mm
- 重量: 1.6 kg