

# seca analytics 115

Guida rapida  
all'installazione



Guida rapida ( **seca analytics 115** )



## Guida rapida all'installazione

### Allestimento di una postazione di lavoro individuale

Questa guida rapida vi mostra come mettere in funzione il software seca analytics 115 con gli apparecchi di misurazione seca 360° wireless in modo semplice e rapido. Sono necessarie solo 4 fasi:


- |   |             |
|---|-------------|
| <b>1. Installazione del software</b>                    | Pagg. 3-5   |
| <b>2. Abilitazione della licenza per singolo utente</b> | Pagg. 6-8   |
| <b>3. Modifica della lingua finestre di dialogo</b>     | Pagg. 9-10  |
| <b>4. Configurazione radio</b>                          | Pagg. 11-14 |

Le istruzioni per l'esecuzione di misurazioni, per la valutazione dei risultati dell'analisi, sul funzionamento in rete, sulla gestione degli utenti nonché su tutte le altre funzioni del software sono riportate nella documentazione completa dell'utilizzatore composta dal Manuale dell'amministratore e dalle Istruzioni per l'uso su DVD. La presente guida rapida vi mostra anche come accedere a questa documentazione. **Per l'installazione occorre disporre dei diritti di amministratore sul proprio PC.**

# 1. Installazione del software



## Fase 1

Inserire il DVD. **Indicazione:** se il DVD non si avvia automaticamente, aprire la directory del DVD in Windows Explorer e fare doppio clic su "Setup".

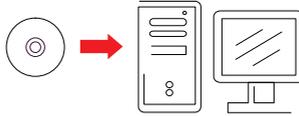


## Fase 2

Seguire le istruzioni a schermo

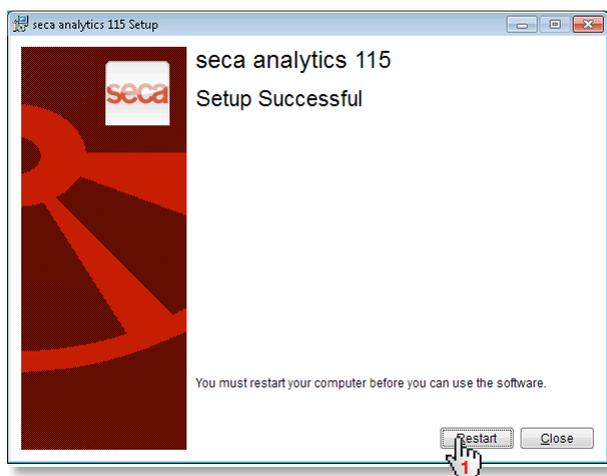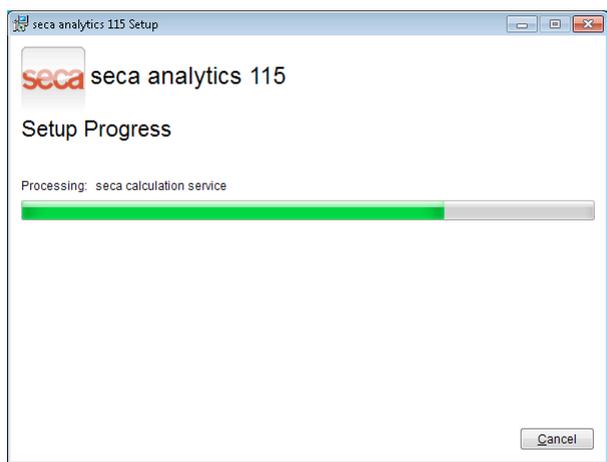


Dopo il riavvio del sistema compare automaticamente:

Postazione di lavoro individuale:

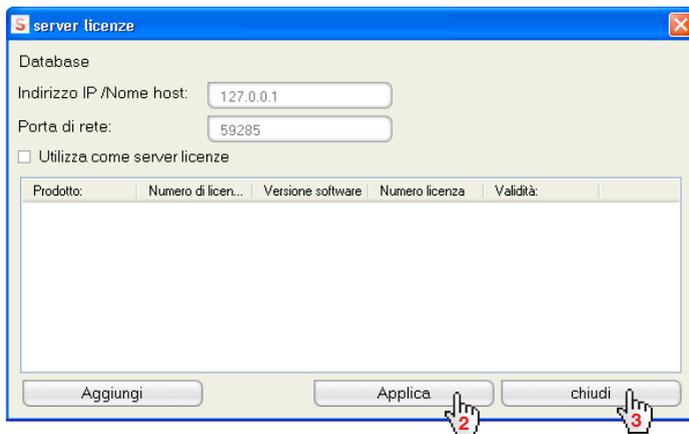


Rete **seca 115**: inserire l'indirizzo IP + la porta del server nella rete **seca 115**, ved. Manuale dell'amministratore

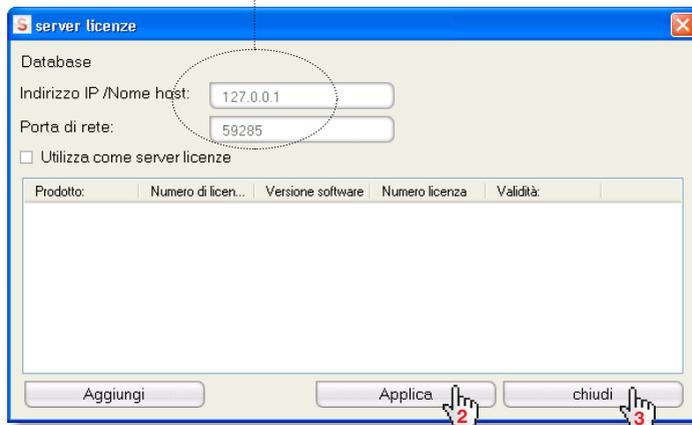

## 2. Abilitazione della licenza per singolo utente

### Fase 1

Avviare il software seca

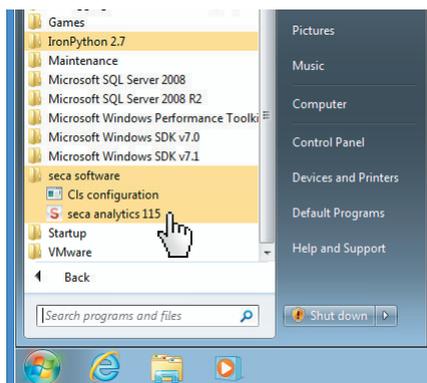


### Fase 2

Inserire il codice di installazione (ved. adesivo della licenza all'interno della custodia del DVD) e generare il codice di registrazione



Comparare automaticamente al 1° avvio del programma:

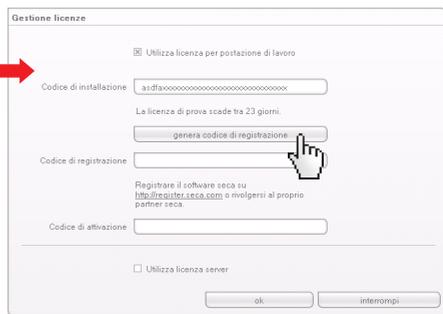

### Fase 3

Inserire il codice di registrazione generato sul sito Internet seca per ricevere il codice di attivazione

Registrazione del software su: <http://register.seca.com>

Gestione licenze

Utilizza licenza per postazione di lavoro

Codice di installazione:

La licenza di prova scade tra 23 giorni.

Codice di registrazione:

Registrazione del software seca su <http://register.seca.com> o rivolgersi al proprio partner seca

Codice di attivazione:

Utilizza licenza server



seca  
Precision for health

software registration

Are you already registered on the seca license database? Please enter your log-on data and click on Continue

E-mail:

Password:

**Set up account**  
You are visiting the seca license database for the first time and would like to log on as a new user.  
[Log on for the first time](#)

**Forgotten your password?**  
Are you already logged on but have forgotten your password? Request a new password here.  
[Forgotten your password?](#)

Contact | Flag | Data protection | Conditions of use

## Fase 4

Dopo aver ricevuto il codice di attivazione per e-mail, inserirlo e completare l'abilitazione della licenza



**Gestione licenze**

Utilizza licenza per postazione di lavoro

Codice di installazione: asdfaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La licenza di prova scade tra 23 giorni.

genera codice di registrazione

Codice di registrazione: VCD0BXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Registrare il software seca su  
<http://register.seca.com> o rivolgersi al proprio partner seca.

Codice di attivazione: X650DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Utilizza licenza server

ok interrompi



**Fatto!**



### 3. Modifica della lingua finestre di dialogo


#### Fase 1

Avviare il software seca

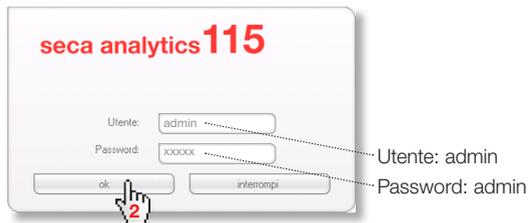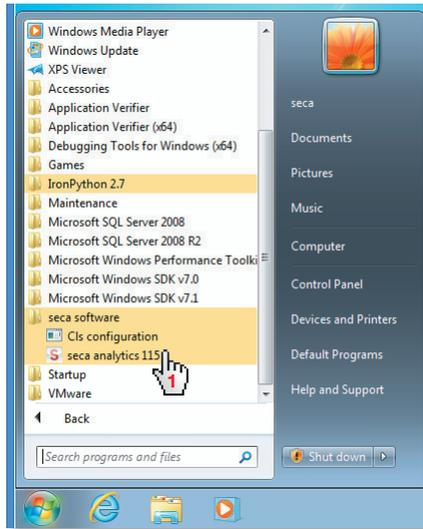

## Fase 2

Aprire la finestra di dialogo "Impostazioni"

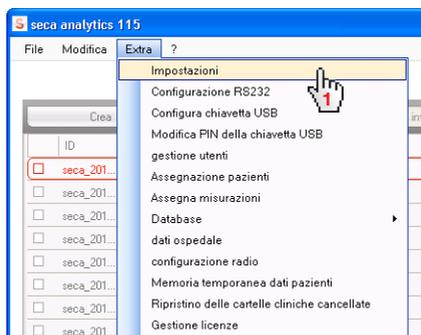


## 4. Configurazione radio

### Guida rapida

La configurazione di una rete radio è il modo più rapido per instaurare un trasferimento dati tra apparecchi seca 360° wireless. **Consiglio:** per un trasferimento dati più veloce consigliamo di collegare l'mBCA al PC tramite Ethernet. Informazioni a riguardo sono contenute nel Manuale dell'amministratore del software e dell'mBCA.


#### Fase 1

Collegare l'adattatore radio USB seca 456 e avviare il computer

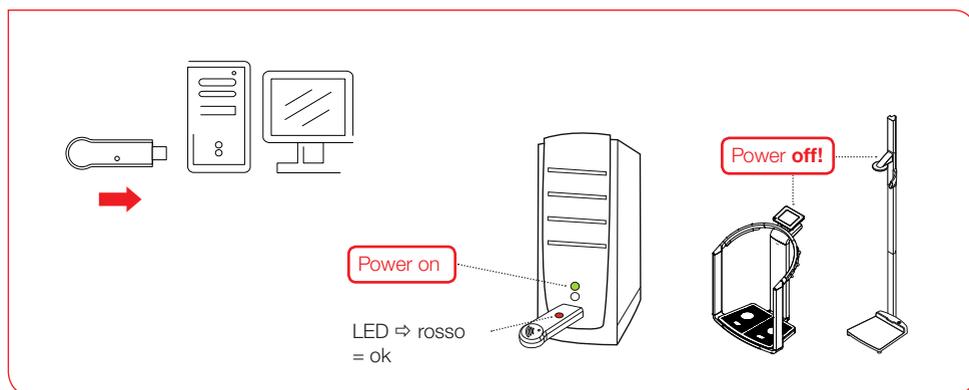

#### Fase 2

Avviare il software seca

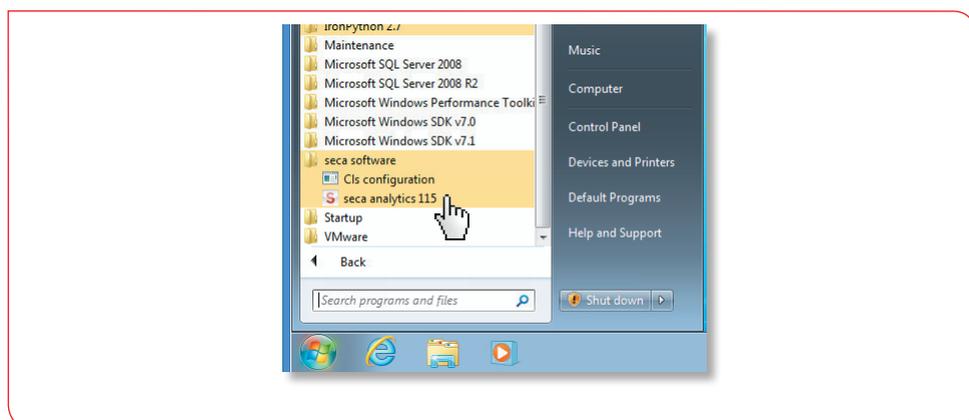

## Fase 3

Aprire la finestra di dialogo "Configurazione radio"



seca analytics 115


Utente: admin

Password: xxxxxx

ok    interrompi

1

Utente: admin  
Password: admin

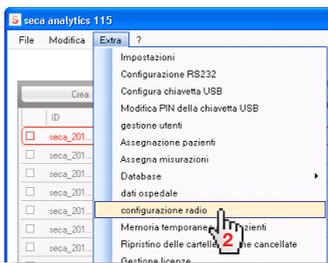

seca analytics 115

File Modifica Extra ?


Crea

ID
<input checked="" type="checkbox"/> seca_201
<input type="checkbox"/> seca_201
<input type="checkbox"/> seca_201
<input type="checkbox"/> seca_201
<input type="checkbox"/> seca_201
<input type="checkbox"/> seca_201
<input type="checkbox"/> seca_201

Impostazioni

- Configurazione RS232
- Configura chiavetta USB
- Modifica PIN della chiavetta USB
- gestione utenti
- Assegnazione pazienti
- Assegna misurazioni
- Database
- dati ospedale
- configurazione radio**
- Memoria temporanea pazienti
- Ripristino delle cartelle cancellate
- Gestione finanze

2

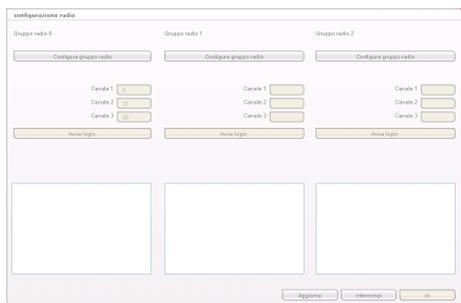


configurazione radio

Gruppo radio 0	Gruppo radio 1	Gruppo radio 2
Configura gruppo radio	Configura gruppo radio	Configura gruppo radio
Canale 1	Canale 1	Canale 1
Canale 2	Canale 2	Canale 2
Canale 3	Canale 3	Canale 3
Area login	Area login	Area login

aggiorna    interrompi    ok

## Fase 4

Ricerca i canali radio (automaticamente) e avviare la registrazione dell'apparecchio

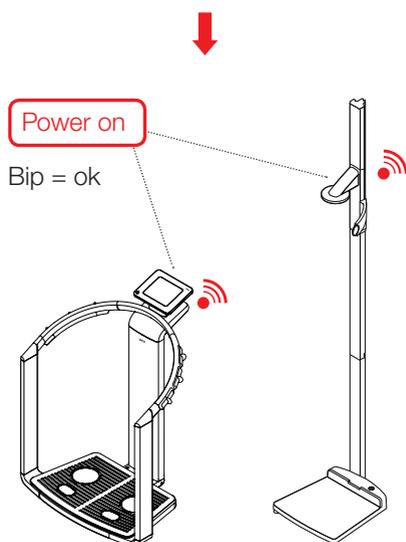

# Fase 5

Memorizzazione degli apparecchi registrati e conclusione della configurazione radio

1. Attendere che gli apparecchi accesi vengano visualizzati.

configurazione radio

Gruppo radio 0

Configura gruppo radio

Sono disponibili i seguenti canali

Canale 1 0

Canale 2 34

Canale 3 81

Termina login

Accendere tutti gli apparecchi del gruppo radio selezionato.

Längenmessgerät  
mBCA

3. Attendere che gli apparecchi accesi vengano visualizzati con i numeri di serie.

configurazione radio

Gruppo radio 0

Configura gruppo radio

Sono disponibili i seguenti canali

Canale 1 0

Canale 2 34

Canale 3 81

Termina login

Sono registrati i seguenti apparecchi:

Längenmessgerät 05704183104409  
mBCA 01274201109207

configurazione radio

Gruppo radio 0 Gruppo radio 1 Gruppo radio 2

Configura gruppo radio Configura gruppo radio Configura gruppo radio

Sono disponibili i seguenti canali

Canale 1 0 Canale 1 Canale 1

Canale 2 34 Canale 2 Canale 2

Canale 3 81 Canale 3 Canale 3

Termina login Anza login Anza login

Sono registrati i seguenti apparecchi:



Längenmessgerät 05704183104409  
mBCA 01274201109207

Aggiorna Interrompi ok

Fatto!




## Accesso alla documentazione dell'utilizzatore

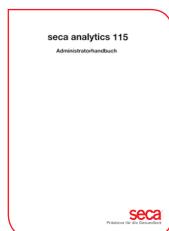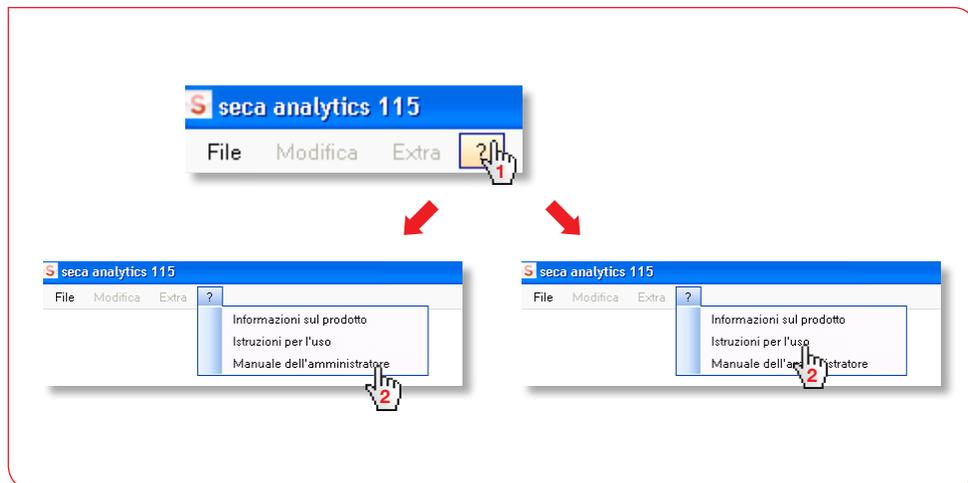

### seca analytics 115

#### Manuale dell'amministratore

- Gestione utenti
- Configurazione di gruppi radio
- Configurazione del PC in rete
- Configurazione degli apparecchi RS232
- Selezione della stampante per mBCA
- ....

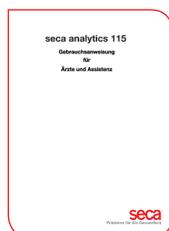

### seca analytics 115

#### Istruzioni per l'uso

- Gestione delle cartelle cliniche seca
- Esecuzione di misurazioni
- Valutazione dei risultati dell'analisi
- Stampa dei rapporti dell'analisi
- Invio delle cartelle cliniche seca a seca mBCA
- ....

# Altimetri e bilance per il settore medicale dal 1840

seca gmbh & co. kg

Hammer Steindamm 9-25


22089 Amburgo • Germania

Telefono +49 40 20 00 00 0

Fax +49 40 20 00 00 50

technicalservice.de@seca.com

Tutti i dati di contatto su [www.seca.com](http://www.seca.com)

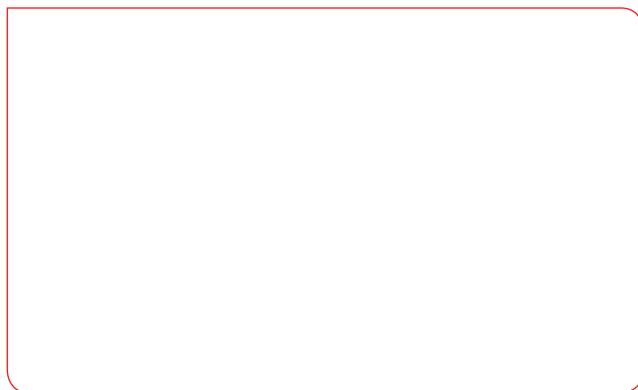

**seca è un'azienda attiva a livello mondiale con sede principale in Germania**  
e filiali in Francia, Gran Bretagna, Nordamerica, Svizzera, Cina, Giappone, Messico, Austria,  
Polonia, Medio Oriente, Brasile e Finlandia

**seca**<sup>®</sup>  
Precisione per la salute